

# シンフォニーバスケットSP メンテナンスチェックリスト

No.1

購入年月日      年      月      日				
車体識別No.	メンテナンス実施者			
<b>1. バッグ部システムの点検 [メンテナンスガイドP.1～P.3]</b>				
	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
①取扱説明書のバッグ内の有無	弊社ホームページ よりダウンロード	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②バッグ部本体（2点）全てのホックを留めることができる	バッグ部システム BS0302 BS0301	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③バッグ部本体（2点）にほつれ、破れ、汚れがない	バッグ部システム BS0302 BS0301	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④本体表示の汚れや破れがない	バッグ部システム B00400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤傘止めバンドの有無 左1ヶ所	バッグ部システム B00500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ハンドルウレタンスポンジに破れ、汚れがない 1ヶ所	バッグ部システム B00600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦ハンドルカバーの破れ、汚れがない 1ヶ所	バッグ部システム B00700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧カゴ受けレバーに割れ、汚れがない 1ヶ所	バッグ部システム B00800 B00900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨フタに割れ、汚れがない 1ヶ所	バッグ部システム B00900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑩フタ取付フレームの取付ネジの有無、緩みがない 左右2ヶ所				
<b>2. バッグ部システムの可動点検 [メンテナンスガイドP.3]</b> ※フタやカゴ受けレバーの点検				
①スムーズにフタを開閉することができる	バッグ部システム B00800 B00900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②スムーズにカゴ受けレバーをスライドすることができる	バッグ部システム B00700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③カゴ受けレバーを引き出した時、カゴ受け（赤）がきちんと可動する	バッグ部システム B00700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. 補修スプレーの使用（外観点検） [メンテナンスガイドP.4]</b> ※本体からバッグ2点を取り外して下さい				
①フレーム部分に塗装剥げや傷がない	補修システム B01802	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. フレームの点検 [メンテナンスガイドP.4]</b> ※フレームの歪みや凹み、錆の点検				
①フレームに歪み、がたつきがない	<メーカー修理> 本体システム BS0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②フレームに凹みがない	本体システム BS0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③フレームに錆がない	本体システム BS0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. フレームの開閉点検 [メンテナンスガイドP.4]</b> ※可動部の性能点検				
①スムーズに車体を折りたたむことができる	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②スムーズに車体を開くことができる	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③車体を開いた状態で、座面がスムーズに上げ下げができる	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④フレームを折りたたんだ時、手を離しても車体は自立している	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## シンフォニーバスケットSP メンテナンスチェックリスト

No.2

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
<b>6. ハンドルの高さ調節部点検</b> 【メンテナンスガイドP.5】 ※可動部の性能点検  ①ハンドルの高さを調節する時、スムーズにハンドルを上げ下げ出来る	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. 溶接部分の点検</b> 【メンテナンスガイドP.5】 ※がたつき、外れの点検  ①前脚下部 左右2ヶ所 ②後脚U字型パイプ部 左右2ヶ所 ③ブレーキプレート部 左右2ヶ所 ④後脚パイプ上部 左右2ヶ所 ⑤車体開閉可動プレート部 左右2ヶ所	本体系統 BS0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	本体系統 BS0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	本体系統 BS0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	本体系統 BS0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	本体系統 BS0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	本体系統 BS0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. リベット部の点検</b> 【メンテナンスガイドP.6】 ※錆や外れ、がたつきの点検  ①本体樹脂前脚部 左右2ヶ所 ②本体樹脂後脚部 左右2ヶ所 ③座面折りたたみバネ掛け部 左右2ヶ所 ④座面U字パイプ本体つなぎ樹脂部 左右2ヶ所 ⑤座面折りたたみ可動パイプ部 左右4ヶ所 ⑥座面受け可動パイプ三角板部 左右6ヶ所 ⑦車体開閉可動プレート部（前脚側） 左右2ヶ所 ⑧車体開閉可動プレート部（可動部） 左右2ヶ所 ⑨車体開閉可動プレート部（後脚側） 右1ヶ所 ⑩車体折りたたみ開閉用バネ掛け部 左右4ヶ所 ⑪車体開閉時可動リベット 左右2ヶ所 ⑫バスケットフレーム前面パイプ部 6ヶ所 ⑬前脚つなぎパイプ部 2ヶ所 ⑭バスケット背面パイプ下部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. フレームの点検 5. フレームの開閉点検 6. ハンドルの高さ調節部点検  
 7. 溶接部分の点検 8. リベット部の点検

上記項目の点検作業で異常があれば、これより先の点検作業でパーツ交換を行っても異常が改善されない場合があります

特に「フレームの歪み」は車輪の可動、ブレーキの制動に大きく影響します

※フレームの歪み具合により修理が出来ない場合もあります

※フレームの凹みは製品の構造上、修理は出来ません（本体系統 BS0102：フレーム交換推奨）

※溶接部分の異常は金属の性質上、修理は出来ません（本体系統 BS0102：フレーム交換推奨）

# シンフォニーバスケットSP メンテナンスチェックリスト

No.3

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
<b>9. シールシステムの点検</b> [メンテナンスガイドP.7]				
※剥がれや汚れの点検				
①反射シール 前後左右脚部 4ヶ所	シール系統 B01000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキシール ハンドル部左右 4ヶ所	シール系統 B01100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ブレーキ調節シール 左右 2ヶ所	シール系統 B01200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスターシール 左右 2ヶ所	シール系統 B01300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤踏込み注意シール 1ヶ所	シール系統 B01400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥滑り止めシリコンシール (大) 1ヶ所	シール系統 B01500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦滑り止めシリコンシール (小) 2ヶ所	シール系統 B01600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧衝撃緩和クッションシール 2ヶ所	シール系統 B01700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨プレート部反射シール 1ヶ所	シール系統 BS6900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10. バネシステムの点検</b> [メンテナンスガイドP.7] ※バネの外れや緩み、錆の点検				
①後輪ブレーキバネ 左右 2ヶ所	バネ系統 B01900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②前輪キャスターバネ 左右 2ヶ所	バネ系統 B02000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③車体折りたたみ開閉用バネ 左右 2ヶ所	バネ系統 B02100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④座面折りたたみバネ 左右 2ヶ所	バネ系統 B02200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤カゴ受けレバー部バネ (黒) 1ヶ所	バネ系統 B02300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11. ネジシステムの点検</b> [メンテナンスガイドP.8] ※ネジの抜け落ちや緩み、錆の点検				
①ブレーキ本体ネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 B02400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキ本体上部ネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 B02500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ブレーキレバー部ネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 B02600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスター受けネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 BS2700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤前輪キャスター上部樹脂取付ネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 B02800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ワイヤー流れ止めネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 B02900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦カゴ受けレバー取付ネジ 2ヶ所	ネジ系統 B03002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧カゴ受けレバー部バネ掛けネジ 1ヶ所	ネジ系統 B03100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨傘受けブラケットネジ 左 1ヶ所	ネジ系統 BS3202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑩ブレーキプレート取付ネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 B03300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑪キャスター切り替えレバー部ネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 B03400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑫ハンドル高さ調節部六角ボルト 左右 2ヶ所	ネジ系統 B03500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑬ハンドル高さ調節部ノブナット 左右 2ヶ所	ネジ系統 B03600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑭ハンドル高さ調節部波型ワッシャー 左右 2ヶ所	ネジ系統 B03700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## シンフォニーバスケットSP メンテナンスチェックリスト

No.4

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
<b>12. 樹脂パーツ①の点検</b> [メンテナンスガイドP.9] ※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①パイプエンドツメ6分パイプ用②（後脚パイプ部φ15） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① B03802	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②パイプエンドツメ6分パイプ用①（座面折りたたみ可動パイプ部φ13） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① B03902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③パイプエンドツメ5分パイプ用①（バスケットフレーム取付パイプ部φ12） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① B04002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④パイプエンドツメ4分パイプ用①（ブレーキプレート部φ11） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① B04102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤パイプエンドツメ4分パイプ用①（車体開閉可動パイプ部φ11） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① B04102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥パイプエンドツメ4分パイプ用③（座面受け可動パイプ部φ11） 左右4ヶ所	樹脂パーツ① B04202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦パイプエンドツメ4分パイプ用③（バスケットフレーム部φ11） 左右4ヶ所	樹脂パーツ① B04202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧傘受けブラケット 左1ヶ所	樹脂パーツ① B04302	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>13. 樹脂パーツ②の点検</b> [メンテナンスガイドP.10] ※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①ブレーキタイヤ押さえ 左右2ヶ所	樹脂パーツ② B04402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②折りたたみプレートカバー 左右2ヶ所	樹脂パーツ② B04500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ハンドルグリップ 左右2ヶ所	樹脂パーツ② B04602	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ワイヤー流れ止め 左右2ヶ所	樹脂パーツ② B04700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>14. 車輪系統の点検</b> [メンテナンスガイドP.10] ※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検 ※車輪部の劣化点検				
①車輪 前後6本	車輪系統 BS4802 BS4902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②車輪キャップの有無 前後6ヶ所	車輪系統 B05002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③前輪キャスター受け 左右2ヶ所	車輪系統 BS5102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスター 左右2ヶ所	車輪系統 BS5402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤キャスター切り替えレバー 左右2ヶ所	車輪系統 BS5500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥前輪キャスター上部樹脂 左右2ヶ所	車輪系統 BS5602	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦後輪部樹脂 左右2ヶ所	車輪系統 B05702	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧車輪止めナット 前後左右4ヶ所	附属パーツ系統 B06500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>15. ブレーキ系統・附属パーツの点検</b> [メンテナンスガイドP.11] ※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①ブレーキレバー 左右2ヶ所	ブレーキ系統 B05802	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキワイヤーに折れ曲がりや金属部に錆がない 左右2ヶ所	ブレーキ系統 B05902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ワイヤー止めナットの抜け落ちやゆるみ、錆がない 左右2ヶ所	ブレーキ系統 B06000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ブレーキ調節ネジ 左右2ヶ所	ブレーキ系統 B06100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ブレーキワイヤーエンドかぶせの有無 左右2ヶ所	附属パーツ系統 B06600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## シンフォニーバスケットSP メンテナンスチェックリスト

No.5

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
<b>16. 車輪系統可動部の性能点検 [メンテナンスガイドP.11]</b>				
※車輪の可動点検				
①前輪がスムーズに回転する 前 4 本	車輪系統 B05200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②後輪がスムーズに回転する 後 2 本	車輪系統 B05300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスター切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスター回転止めレバーを固定位置（上げた状態）で車体を 前方へ軽く押した時、前輪と後輪が空回りせず車体が動く	車輪系統 BS4802 BS4902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
※キャスターの可動点検 [メンテナンスガイドP.12]				
①キャスター回転止めレバーが上下に可動する 左右 2ヶ所	車輪系統 BS5402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②キャスター切り替えレバーが上下に可動する 左右 2ヶ所	車輪系統 BS5500 BS5602	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスター切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスター回転止めレバーを下げた状態で前輪を右60度位置に保ち 前輪を持ち上げた時スムーズに前輪が正面方向に転換する 左右 2ヶ所	バネ系統 車輪系統 B02000 BS5402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④キャスター切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスター回転止めレバーを下げた状態で前輪を左60度位置に保ち 前輪を持ち上げた時スムーズに前輪が正面方向に転換する 左右 2ヶ所	バネ系統 車輪系統 B02000 BS5402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤キャスター切り替えレバーを360度回転位置（上げた状態）で尚且つ キャスター回転止めレバーを下げた状態で前輪を持ち上げ、前輪キャスターを 右回転、左回転共に360度ずつスムーズに手で回転させることが出来る 左右 2ヶ所	車輪系統 BS5402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>17. 走行点検 [メンテナンスガイドP.13]</b>				
①キャスター切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスター回転止めレバーを固定位置（上げた状態）で車体を違和感なく前方へ押せる	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②キャスター切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスター回転止めレバーを下げた状態で車体を前方へ動かした時 前輪キャスターがスムーズに左右60度ずつに方向転換が出来る	バネ系統 車輪系統 B02000 BS5402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスター切り替えレバーを360度位置（上げた状態）で尚且つ キャスター回転止めレバーを下げた状態で車体を前方へ動かした時 前輪キャスターがスムーズに左右360度方向転換が出来る	車輪系統 BS5402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④車体をゆっくりと前方へ走行させながらブレーキレバーを握り 車体を制動させることが出来る	パーツ交換マニュアル P.3～P.5 ブレーキ設定参照	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤車体をひろげた状態で尚且つ静止させた状態でブレーキレバーを 下げれば駐車用ストッパがかかる	パーツ交換マニュアル P.3～P.5 ブレーキ設定参照	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>18. 点検の終了にあたって [メンテナンスガイドP.14]</b>				
・バッグ部本体（2点）をフレームに装着してください		・バッグに取扱説明書を入れてください		
※車体の保管の際、駐車用ストッパをかけた状態で保管された場合は後車輪が凹んでしまう恐れがあります				
※駐車用ストッパをかけない状態で車体を折りたたんでも自立する、出来る限り水平な場所での保管をお勧めします				
※点検が終了して異常が見当たらない車体も長時間使用しない場合は定期的に点検作業を行ってください				

お疲れ様でした

No.2024.04