

SHIMA  
SHIMA PRODUCT

# S字クオッドケイン オールアルミ四点式

## 〔取扱説明書〕 〔保管用〕


この取扱説明書は必ずお読みいただき、大切に保管してください。

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この説明書の内容をよくお読みいただき、  
充分ご理解の上、ご利用ください。

ご使用に際しては、ケアマネージャーまたは福祉用具専門相談員に  
ご自身の体調や状態をお知らせのうえ、ご相談ください。

### 各部の名称

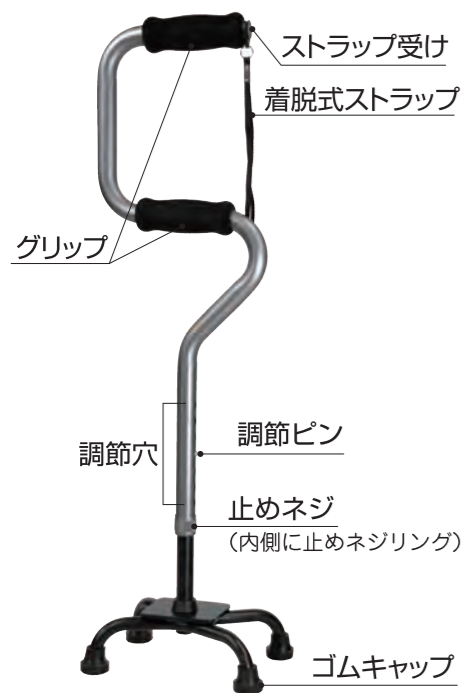

材質：アルミパイプ  
ラバー

サイズ：H72~84 W17.5 D24cm

重量：約680g

ゴムキャップ内径：15mm

### 安全に関するご注意

<b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●この製品は、歩行訓練用の杖です。それ以外の用途には使用しないでください。</li> <li>●勝手に改造・分解しないでください。 強度や耐久性が劣化して危険です。また、事故になる恐れがありますので絶対に改造・分解しないでください。</li> <li>●本製品を火気に近づけないでください。 スポンジ等が変形したり、熱くなった金属部分でやけどするなど、危険です。</li> <li>●滑りやすい床面や濡れている床面では転倒する場合がありますので、充分ご注意ください。</li> </ul>
<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●調節ピンは、確実に固定されているか必ず確認してください。</li> <li>●次のような場所・状況でのご使用は危険です。使用を避けるか、介助者に同行してもらってください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・凹凸の激しい道</li> <li>・夜間、雨や雪、風の強い日</li> <li>・凍結路</li> <li>・深い砂利道や砂道</li> </ul> </li> <li>●杖を投げたり落としたり、衝撃を加えないでください。</li> <li>●湿気の多いところや雨風の当たるところに本製品を放置しないでください。 サビの原因になります。</li> <li>●屋外に放置すると、サビなどにより製品が劣化します。 保管は屋内でおこなってください。</li> </ul>

ご使用にあたっては、体調の状態により危険なこともありますので、  
充分注意してください。

### ⚠️ ご使用前の注意(点検)

- 自分の身体にあった長さにしてご使用ください。
- ご使用前には、各部を点検(キズやひび、持ち手のゆるみなどがないかを確認)した後、使用してください。
- ゴムキャップが破れたり、摩耗等があれば、即ゴムキャップを交換してください。
- ぬかるみ・泥地などの滑りやすい路面等での使用は充分注意してください。
- 坂道など傾斜面では十分に注意してください。
- 止めネジをしっかりと締めてあるかを確認して、使用してください。
- 使用者が自分自身で身体を十分に安定させられない場合、介添者の付き添いが必要です。
- 平らな路面でご使用ください。
- 平らな路面に4本の脚部のゴムキャップが路面に接地しているかを確認してからご使用ください。

### ⚠️ 警告事項(思わぬケガの恐れがあります)

- 雪・凍結等のゴムキャップのすべり止め効果のききにくい所では使用しないでください。
- 杖以外の目的には、使用しないでください。
- お子様の手の届くところには、置かないでください。
- ご自分で、改造などして使用しないでください。

### ⚠️ ご注意事項

#### 〈使用後〉

- 雨ざらしにしないでください。サビや劣化の原因となります。
- 雨水にぬれた場合は、拭きとってください。
- フレームに砂や泥をつけたまま放置しないでください。

#### 〈保管・お手入れ方法〉

- ゴムキャップや本体についた泥や汚れなどは、そのまま放置しないで、必ず落としてください。
- よく絞った布で、土やほこりをふき取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性溶剤を使用しないでください。
- 乾いた布で水分を取り、日陰で乾燥してください。
- 長時間使用しない時は、汚れを落とし、日陰で保管してください。
- 説明書は本体とともに保管してください。
- 本製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡しください。

#### 〈保 全〉


- 非常口、消火器、消火栓の前に放置しないでください。
- 各部の破損、ゆるみ、摩耗がないか確認してください。
- 幼児や子供の手の届く所には放置しないでください。
- 当社のサービス員以外の分解、組立、改造はしないでください。

#### 〈廃 棄〉

- 廃棄については各自治体の指示に従って処分・廃棄してください。


## 長さ調節の方法

- 止めネジをゆるめてください。
- 調節ピンを押して、適当な長さの調節穴に合わせてください。
- 調節ピンがカチッという音がして飛び出せばセット完了です。
- 止めネジを確実に締めてください。  
(注意)調節ピンが、長さ調節穴に確実にハマっていることを確認してください。

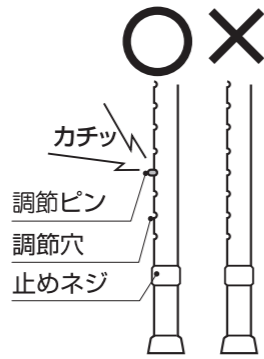

### 正しい長さのつえの選び方

身体に合ったつえをお選びください。その他に握りの大きさや重さも注意してお選びください。  
つえの先を足先の前外方20cmにおき、肘は30~40°屈曲した位置になるように、つえをつく状態が正しいつえの長さの目安です。

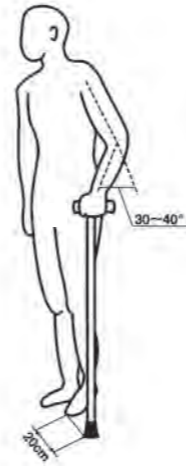

図：正しいつえの長さ

**注意** 止めネジを確実に強く締めても、調節ピンを押すと簡単にスライドする時は、止めネジリング(調節ロックの中に入っている)が抜け落ちている場合があります。止めネジリングが入っているか確認してください。

## パーツの価格

- ゴムキャップ……………4個(1台分) 1,200円(消費税別)
- グリップ……………1個 600円(消費税別)
- 着脱式ストラップ……………1個 600円(消費税別)
- ストラップ受け……………1個 400円(消費税別)



(お買い求めは、お買い求めのお店、またはお近くの販売店でどうぞ)

修理・お取り扱いなどのご相談は、まず、お買い求めの販売店へお申し付けください。

## グリップの向きの変え方


左手用、右手用に簡単に切りかえができます。簡単に長さ調節ができます。

- ① 止めネジを緩めます。
- ② 調節ピンを押して、グリップを180度回転します。
- ③ 長さを合わせて止めネジをしっかり締めます。

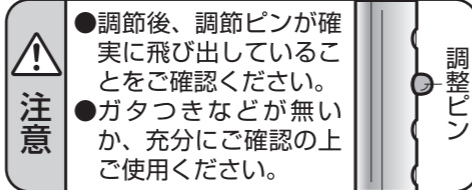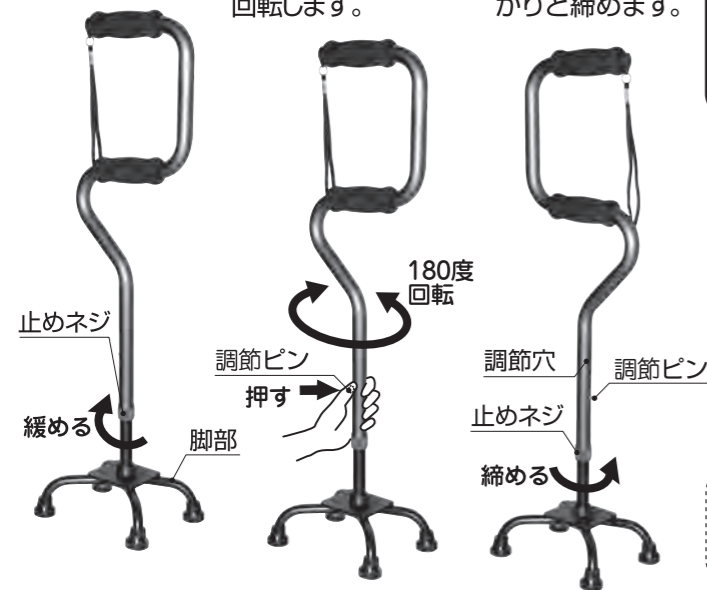


調節穴を180°回転すると右用、左用に切り換えができます。

### 左使用

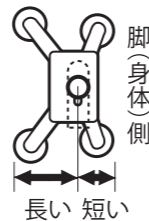

### 右使用

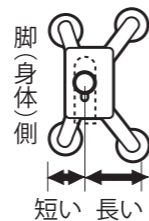


通常は上図のように、杖の脚から中心までが短い方が脚(身体)側になるように使用します。

## 着脱式ストラップの使用法

### 着脱式ストラップのはずし方

本体を固定しストラップを引くと着脱式ストラップはストラップ受けからはずれます。  
(例えば)ストラップを手に通して使用している時に転倒などした場合、着脱式ストラップがはずれます。

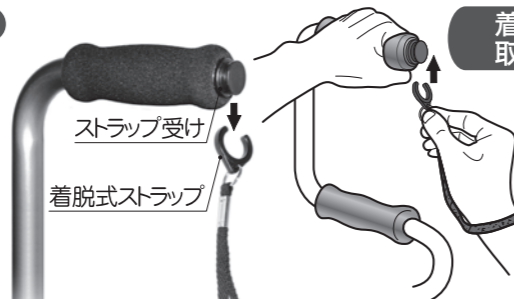

### 着脱式ストラップの取り付け方

着脱式ストラップをストラップ受けにはめてください。

**注** 指などをはさまないように注意してください。

ご不明な点やご質問などがありましたら、弊社サービス係またはご購入店までお問い合わせください。  
※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。