

シンフォニーライト メンテナンスチェックリスト				No.1	
車種	色	サイズ	購入年月日		
メンテナンス実施日	年	月	日	メンテナンス回数	
				回	
				メンテナンス実施者	
I. 付属品の点検（有無の確認） [メンテナンスガイド P1～P4]				必要なパーツ	事業者様 修理可能
1. 取扱説明書[P1] ⑦ <input type="checkbox"/>				▲L-2	
2. シール部分の剥がれと汚れの点検[P1～P2]					
①反射シール 前後左右脚部に4ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				▲10	○
②ブレーキシール ハンドル部左右2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				▲L-13	○
③前輪キャスターシール 左右2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				▲L-9	○
④固定用ロックレバー部シール 1ヶ所 <input type="checkbox"/>					
⑤ブレーキ調整シール 左右2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				▲15	○
3. かさ止めバンド[P3] ⑦ <input type="checkbox"/>				▲16	○
4. バッグ部の点検[P3]					
①全てのホックを止められる（ホック外れは止めて下さい） <input type="checkbox"/>					×
②バッグ部のほつれ、破れ、汚れがない <input type="checkbox"/>					×
③バッグの底板（有無）と割れがない <input type="checkbox"/>				▲L-7	○
④本体表示の汚れや破れがない 座面部の裏面に1ヶ所 <input type="checkbox"/>				▲L-6	○
⑤押し手カバー 汚れや破れがない <input type="checkbox"/>				▲L-69	○
II. 外観点検（本体からバッグを取りはずして下さい） [P5～P11]					
1. フレームの点検[P5] ※はずし方はP4を参照					
①フレーム部分の傷や汚れがない <input type="checkbox"/>				▲L-17	○
②フレーム本体のゆがみ点検					
・前脚の曲がりがない <input type="checkbox"/>					×
・後脚の曲がりがない <input type="checkbox"/>					×
・ハンドル部分のよじれがない <input type="checkbox"/>					×
③固定用ロックレバー部の割れ等の破損がない <input type="checkbox"/>					×

	必要なパーツ	事業者様修理可能	
4. バネ部の点検（バネのはずれ、錆等の点検） [P8]			
※又はバネの先端が外を向いて指等にふれないかを点検して下さい。			
①後ブレーキバネ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-18	○
②本体折りたたみバネ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-20	○
③前輪キャストバネ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-19	○
④座面折りたたみバネ 1ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-21	○
⑤座面部丸棒 1本	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		×

5. ネジ部の点検（ネジの抜け落ちとゆるみ、錆の点検） [P9]			
①ブレーキ本体 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-22	○
②ブレーキ本体上部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-24	○
③ブレーキレバー部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-23	○
④ワイヤー流れ止め部 本体樹脂部左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-26	○
⑤かさ止めブラケット部 左1ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-27	○
⑥前輪キャスト受け部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-25	○
⑦押し手の高さ調節部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲P-28~30	○
⑧固定用ロックレバー部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-37	○
⑨キャスト回転レバー部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-47	○

6. 樹脂パーツの点検（樹脂の割れや汚れや傷の点検） [P10~P11]			
①押し手グリップ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-34	○
②固定用ロックレバー 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-37	○
③高さ調節部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲P-28~30	○
④ブレーキタイヤ押さえ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-57	○
⑤かさ止めブラケット 左後脚1ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-36	○
⑥開閉用ストッパレバー 左1ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲L-71	○
⑦ブレーキワイヤー調整ネジ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲51	○
(次ページへ続く)			

シンフォニーライト メンテナンスチェックリスト

No.4

	必要なパーツ	事業者様修理可能
<p>⑧パイプエンドツメの点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パイプエンドツメ5分(中) 座面後部左右2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・パイプエンドツメ6分(大) 座面横部左右2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・パイプエンドツメ6分(大) 押し手下パイプ底部左右2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 	<p>▲L-32 ▲L-31 ▲L-70</p>	<p>○ ○ ○</p>
<p>Ⅲ. 性能点検[P11~P14]</p>		
<p>1. 車輪の点検[P11~P12]</p>		
<p>①車輪部の磨耗や割れ 6本 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>▲L-39・L-40</p>	<p>○</p>
<p>②車輪のキャップの有無と傷 6ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>▲L-41</p>	<p>○</p>
<p>③前輪キャスター部キャスター受けの抜け落ちや緩み 左右2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>▲L-42</p>	<p>○</p>
<p>④車輪止めナット(抜け落ちや緩みの点検) 4ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>▲L-43</p>	<p>○</p>
<p>⑤前輪後輪の点検</p>		
<p>・前輪がスムーズに回転する 4ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>		<p>×</p>
<p>・後輪がスムーズに回転する 2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>		<p>×</p>
<p>⑥前輪キャスター部の性能点検</p>		
<p>・左右60度にした時、前輪を持ち上げ車輪を60度方向転換した時、スムーズに正面方向に転換する <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>▲L-46・L-47</p>	<p>○</p>
<p>・キャスターロックのロック及び解除がスムーズに行える 左右2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>		<p>×</p>
<p>2. 走行点検[P12]</p>		
<p>①キャスター固定時に押した時、違和感なくまっすぐ押せる <input type="checkbox"/></p>		<p>×</p>
<p>②キャスターフリー(360度)の状態を押した時、前輪車輪がスムーズに方向転換する <input type="checkbox"/></p>		<p>×</p>
<p>3. ブレーキ、ストッパの点検[P13]</p>		
<p>①ブレーキ部本体の傷や割れ 左右2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>		<p>○</p>
<p>①ブレーキ部レバーの傷や割れ 2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>▲L-74</p>	<p>○</p>
<p>①ブレーキ部ワイヤーの折れ曲がりと錆 左右2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>▲L-49</p>	<p>○</p>
<p>①ワイヤー止めナットの抜け落ちやゆるみ 左右2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>▲50</p>	<p>○</p>
<p>①ブレーキ部ワイヤーエンドかぶせの抜け落ち 左右2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>▲52</p>	<p>○</p>
<p>②ストッパの性能点検 左右2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>		<p>×</p>
<p>③ブレーキの性能点検 左右2ヶ所 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>		<p>×</p>

4. 各開閉等の点検[P14]

必要なパーツ

事業者様修理可能

①フレームを折りたたむ時の点検

- ・固定用ひっかけ部がカラーに当たっている
- ・固定用ロックレバーから手を離し、静止する
- ・押し手を上から押し固定用ロックレバーが元の位置に戻る

②フレームを広げる時の点検

- ・押し手を上げきった時に固定用ひっかけ部が固定用ロック部パイプに入りきる
- ・固定用ロックレバーを押し下げ、パイプにしっかり引っ掛かる

③座面の上げ下げがスムーズにできるか ④高さ調節がスムーズにできるか ⑤開閉用ストップレバーが音がするまで確実にかけられるか

×

×

×

×

IV. 点検の終了にあたって[P14]

- ・袋部をフレーム本体に装着して下さい。(袋部の付け方参照)
- ・バッグに取扱説明書を入れ、本体を折りたたみ、ケースに入れて下さい。

お疲れさまでした。