

車種	色	サイズ	購入年月日
メンテナンス実施日	年	月	日
メンテナンス回数	回	メンテナンス実施者	

I. 付属品の点検(有無の確認)[メンテナンスガイドP1~P4]				事業者様 修理可能	
1. 取扱説明書[P1] ① <input type="checkbox"/>					

2. シール部分の剥がれと汚れの点検[P1~P2]					
① 蛍光シール 前後左右脚部に4ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
② ブレーキシール ハンドル部左右表裏4ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
③ サイズシール 後脚左側1ヶ所	<input type="checkbox"/>				○
④ 前輪キャスター回転シール 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○
⑤ 本体シール バック部の底板1ヶ所	<input type="checkbox"/>				○
⑥ 背もたれシール 正面背もたれ部1ヶ所	<input type="checkbox"/>				○
⑦ ブレーキ調整ネジシール 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○
3. 傘止め用マジックテープ[P3] ① <input type="checkbox"/>					

4. バッグ部の点検[P3]					
① 全てのホックを止められる(ホック外れは止めて下さい)	<input type="checkbox"/>				×
② バッグ部のほつれ、破れ、汚れがない	<input type="checkbox"/>				×
③ バッグの底板(有無)と割れがない	<input type="checkbox"/>				○
④ 背もたれクッション部分の破れ、汚れがない	<input type="checkbox"/>				○
II. 外観点検(本体からバッグを取りはずして下さい)[P5~P11] ※はずし方はP4を参照					
1. フレームの点検[P5]					
① フレーム部分の傷や汚れがない	<input type="checkbox"/>				○
② フレーム本体のゆがみ点検					
・前脚の曲がりがない	<input type="checkbox"/>				×
・後脚の曲がりがない	<input type="checkbox"/>				×
・ハンドル部分のよじれがない	<input type="checkbox"/>				×
③ 背もたれ部のがたつきや傷がない	<input type="checkbox"/>				○
④ 肘掛け部のがたつきや傷がない	<input type="checkbox"/>				×
⑤ 折りたたみレバー部のがたつきや傷がない	<input type="checkbox"/>				×

2. 溶接部のがたつきや外れの点検[P6]

事業者様修理可能

①前脚下部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×
②前脚上部 左右4ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			×
③折りたたみレバー前脚つなぎパイプ部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×
④座面部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×
⑤後脚部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×
⑥後脚座面受け部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×
⑦後脚ブレーキ調整部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×
⑧ブレーキプレート部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×

3. リベット部のかしめの点検(リベットの錆やぐらつきの点検)[P7]

①ブレーキ本体部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×
②ひじかけ部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×
③前輪キャスター部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×
④前輪キャスターロック部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×
⑤後脚とブレーキプレート部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×
⑥座面部 左右6ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×
⑦つなぎパイプつなぎプレート部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×
⑧後脚つなぎプレート部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×

4. バネ部の点検(バネのはずれ、錆等の点検)[P8]

※又はバネの先端が外を向いて指等にふれないかを点検して下さい。

①後輪部ブレーキバネ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					○
②折りたたみバネ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					○
③前輪キャスター部バネ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					○
④座面部バネ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					○
⑤座面部丸棒 2本	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					×

		事業者様 修理可能
5. ネジ部の点検(ネジの抜け落ちとゆるみ、錆の点検)[P9]		
①ブレーキ本体 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	○
②ブレーキレバーとワイヤー止め部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	○
③ワイヤー流れ止め下部 座面パイプ部左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	○
④かさ止めブラケット部 左1ヶ所	<input type="checkbox"/>	○
⑤ワイヤー流れ止め上部 ひじかけ部左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	○
⑥前輪キャスト部分 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	○
⑦前脚と座面パイプ部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	○
⑧押し手の高さ調節部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	○
<hr/>		
6. 樹脂パーツの点検(樹脂の割れや汚れや傷の点検)[P10~P11]		
①押し手グリップ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	○
②折りたたみレバー 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	×
③高さ調節部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	○
④ひじかけ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	×
⑤かさ止めブラケット 左後脚1ヶ所	<input type="checkbox"/>	○
⑥背もたれ	<input type="checkbox"/>	○
⑦開閉用ロックレバー	<input type="checkbox"/>	○
⑧ブレーキワイヤー調整ネジ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	○
⑨パイプエンドキャップの点検		
・パイプエンドキャップ(大) 座面受け部左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	○
・パイプエンドキャップ(中) 折りたたみレバー部左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	○
・パイプエンドキャップ(中) 座面部左右4ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	○
・パイプエンドキャップ(小) ブレーキプレート部左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	○

Ⅲ. 性能点検[P11～P14]

事業者様
修理可能

1. 車輪の点検[P11～P12]

- | | | |
|--|---|---|
| ①車輪部の磨耗や割れ 6本 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ②車輪のキャップの有無と傷 6ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ③前輪キャスター部キャスター受けの抜け落ちやゆるみ 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ④車輪止めナット(抜け落ちやゆるみの点検) 4ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ⑤前輪後輪の点検 | | |
| ・前輪がスムーズに回転する 4ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | × |
| ・後輪がスムーズに回転する 2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | × |
| ⑥前輪キャスター部の性能点検 | | |
| ・左右60度にした時、前輪を持ち上げ車輪を60度
方向転換した時、スムーズに正面方向に転換する | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ・キャスター回転止めのロック及び解除がスムーズに
行える 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | × |

2. 走行点検[P12]

- | | | |
|--|--------------------------|---|
| ①キャスター固定時に押した時、違和感なくまっすぐ押せる | <input type="checkbox"/> | × |
| ②キャスターフリー(360度)の状態を押した時、前輪車輪が
スムーズに方向転換する | <input type="checkbox"/> | × |

3. ブレーキ、ストッパーの点検[P13]

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| ①ブレーキ部本体の傷や割れ 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ①ブレーキ部レバーの傷や割れ 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ①ブレーキ部ワイヤーの折れ曲がりと錆 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ①ブレーキ部ナットの抜け落ちやゆるみ 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ①ブレーキ部ワイヤーの端カバーの抜け落ち 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ②ストッパーの性能点検 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | × |
| ③ブレーキの性能点検 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | × |

4. 各開閉等の点検[P14]

事業者様修理可能

①フレームの折りたたみがスムーズにできるか

×

②座面の上げ下げがスムーズにできるか

×

③高さ調節がスムーズにできるか

×

④開閉用ロックレバーが確実にかけられるか

×

IV. 点検の終了にあたって[P14]

- ・袋部をフレーム本体に装着して下さい。(袋部の付け方参照)
- ・バッグに取扱説明書を入れ、本体を折りたたみケースに入れて下さい。

お疲れさまでした。