

色				購入年月日		
メンテナンス実施日	年	月	日	メンテナンス回数	回	メンテナンス実施者

I. 付属品の点検(有無の確認)[メンテナンスガイドP1~P4]						事業者様 修理可能	
1. 取扱説明書[P1]						(有) <input type="checkbox"/>	
2. シール部分の剥がれと汚れの点検[P1~P2]							
①反射シール	前後左右脚部に4ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	
②ブレーキシール	ハンドル部左右表裏4ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	
③本体シール	バック部の底板1ヶ所				<input type="checkbox"/>	○	
④ブレーキ調整ネジシール	左右2ヶ所		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○	
3. 傘止め用マジックテープ[P3]						(有) <input type="checkbox"/>	○
4. バッグ部の点検[P3]							
①	全てのホックを止められる(ホック外れは止めて下さい)				<input type="checkbox"/>	×	
②	バッグ部のほつれ、破れ、汚れがない				<input type="checkbox"/>	×	
③	バッグの底板(有無)と割れがない				<input type="checkbox"/>	○	
II. 外観点検(本体からバッグを取りはずして下さい)[P5~P11]							
1. フレームの点検[P5]							
※はずし方はP4を参照							
①	フレーム部分の傷や汚れがない				<input type="checkbox"/>	○	
②	フレーム本体のゆがみ点検						
	・前脚の曲がりがない				<input type="checkbox"/>	×	
	・後脚の曲がりがない				<input type="checkbox"/>	×	
	・ハンドル部分のよじれがない				<input type="checkbox"/>	×	
③	肘掛け部のウレタンの破れや汚れがない				<input type="checkbox"/>	○	
④	折りたたみレバー部のがたつきや傷がない				<input type="checkbox"/>	×	

事業者様
修理可能

2. 熔接部のがたつきや外れの点検[P6]

①前脚下部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×
②前脚上部 背もたれ部 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×
③座面受け部 丸棒 左右4ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×
④後脚部 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×
⑤後脚座面受け部 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×
⑥後脚ブレーキ調整部 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×
⑦ブレーキプレート部 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×

3. リベット部のかしめの点検(リベットの錆やぐらつきの点検)[P7]

①ブレーキ本体部 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×	
②前脚とひじかけつなぎ部 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×	
③前輪キャスター部 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×	
④前輪キャスターロック部 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×	
⑤後脚とブレーキプレート部 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×	
⑥座面部 左右6ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×
⑦つなぎパイプつなぎと座面バネ部 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×	
⑧後脚つなぎプレート部 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×	
⑨つなぎパイプと折りたたみバネ部 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×	
⑩前脚と背もたれパイプ部 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×	

4. バネ部の点検(バネのはずれ、錆等の点検)[P8]

※バネの先端が外を向いて指等にふれないか、又は伸びて引きが悪くなっていないかを点検して下さい。

①後輪部ブレーキバネ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
②折りたたみバネ 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
③前輪キャスター部バネ 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
④座面部バネ 左右2ヶ所			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
⑤座面部丸棒 1本	<input type="checkbox"/>				×

5. ネジ部の点検(ネジの抜け落ちとゆるみ、錆の点検)[P9]	事業者様修理可能		
①ブレーキ本体 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
②ブレーキレバーとワイヤー止め部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
③かさ止めブラケット部 左1ヶ所		<input type="checkbox"/>	○
④ワイヤー流れ止め上部 ひじかけ部左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
⑤前輪キャスター受け部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
⑥前脚と座面パイプ部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○

6. 樹脂パーツの点検(樹脂の割れや汚れや傷の点検)[P10~P11]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
①押し手グリップ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	×
②折りたたみレバー 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
③高さ調節部 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
④ひじかけ ウレタン 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
⑤かさ止めブラケット 左後脚1ヶ所		<input type="checkbox"/>	○
⑥前輪キャスター 回転止めプレート 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
⑦ブレーキワイヤー調整ネジ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
⑧パイプエンドツメの点検			
・パイプエンドツメ6分パイプ用 座面受け部左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
・パイプエンドツメ5分パイプ用 前脚つなぎパイプ部左右2ヶ所 (座面下部)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
・パイプエンドツメ5分パイプ用 座面部左右2ヶ所 (座面上部)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
・パイプエンドツメ4分パイプ用 ブレーキプレート部左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○
・パイプエンドツメ4分パイプ用 背もたれパイプ部左右2ヶ所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○

Ⅲ. 性能点検[P11～P14]

1. 車輪の点検[P11～P12]

- | | | |
|--|---|---|
| ①車輪部の磨耗や割れ 6本 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ②車輪のキャップの有無と傷 6ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ③前輪カスター部カスター受けの抜け落ちや緩み 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ④車輪止めナット(抜け落ちや緩みの点検) 4ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ⑤前輪後輪の点検 | | |
| ・前輪がスムーズに回転する 4ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | × |
| ・後輪がスムーズに回転する 2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | × |
| ⑥前輪カスター部の性能点検 | | |
| ・左右60度にした時、前輪を持ち上げ車輪を60度
方向転換した時、スムーズに正面方向に転換する | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ・カスター回転止めのロック及び解除がスムーズに
行える 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | × |

2. 走行点検[P12]

- | | | |
|--|--------------------------|---|
| ①カスター固定時に押した時、違和感なくまっすぐ押せる | <input type="checkbox"/> | × |
| ②カスターを左右60度の状態で押した時、前輪車輪が
スムーズに方向転換する | <input type="checkbox"/> | × |

3. ブレーキ、ストッパーの点検[P13]

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| ①ブレーキ部本体の傷や割れ 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ①ブレーキ部レバーの傷や割れ 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ①ブレーキ部ワイヤーの折れ曲がりと錆 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ①ブレーキ部ナットの抜け落ちやゆるみ 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ①ブレーキ部ワイヤーエンドかぶせの抜け落ち 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ○ |
| ②ストッパーの性能点検 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | × |
| ③ブレーキの性能点検 左右2ヶ所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | × |

4. 各開閉等の点検[P14]

事業者様修理可能

①フレームの折りたたみがスムーズにできるか

×

②座面の上げ下げがスムーズにできるか

×

③高さ調節がスムーズにできるか

×

IV. 点検の終了にあたって[P14]

- ・袋部をフレーム本体に装着して下さい。(袋部の付け方参照)
- ・バッグに取扱説明書を入れ、本体を折りたたみケースに入れて下さい。

お疲れさまでした。