

シンフォニーワイドSP メンテナンスチェックリスト

No.1

車種	色	サイズ	購入年月日
メンテナンス実施日	年	月	日
メンテナンス回数	回	メンテナンス実施者	

I. 付属品の点検 (有無の確認) [メンテナンスが 1~4]		必要なパーツ	事業者様 修理可能
1. 取扱説明書[P1]	(有) <input type="checkbox"/>	▲W-2	

2. シール部分の剥がれと汚れの点検[P1~P2]			
①反射シール 前後左右脚部に4ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲10	○
②ブレーキシール ハンドル部左右表裏4ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲W-13	○
③サイズシール (小タイプのみ) 後脚左側1ヶ所	<input type="checkbox"/>	▲W-12	○
④前輪キャスター回転シール 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲9	○
⑤肘置きクッションシール 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲W-62	○
⑥ブレーキ調整ネジシール 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲15	○

3. かさ止めバンド[P3]	(有) <input type="checkbox"/>	▲16	○

4. バッグ部の点検[P3]			
①全てのホックを止められる (ホック外れは止めて下さい)	<input type="checkbox"/>		×
②バッグ部のほつれ、破れ、汚れがない	<input type="checkbox"/>		×
③バッグの底板 (有無) と割れがない	<input type="checkbox"/>	▲7	○
④本体表示の汚れや破れがない 座面部の裏面に1ヶ所	<input type="checkbox"/>	▲W-6	○
⑤押し手カバー 汚れや破れがない	<input type="checkbox"/>	▲W-69	

II. 外観点検 (本体からバッグを取りはずして下さい) [P5~P11]			
1. フレームの点検[P5] ※はずし方はP4を参照			
①フレーム部分の傷や汚れがない	<input type="checkbox"/>	▲P-17	○
②フレーム本体のゆがみ点検			
・前脚の曲がりがない	<input type="checkbox"/>		×
・後脚の曲がりがない	<input type="checkbox"/>		×
・ハンドル部分のよじれがない	<input type="checkbox"/>		×
③肘掛け部のがたつきや傷がない	<input type="checkbox"/>		×
④折りたたみレバー部のがたつきや傷がない	<input type="checkbox"/>		×

シンフォニーワイドSP メンテナンスチェックリスト

No.2

必要なパーツ

事業者様修理可能

2. 溶接部のがたつきや外れの点検[P6]

①前脚下部 左右2ヶ所

▲W-1

×

②背もたれ部上下 左右4ヶ所

×

③折りたたみレバー前脚つなぎパイプ部 左右2ヶ所

×

④座面部 左右2ヶ所

×

⑤後脚部 左右2ヶ所

×

⑥後脚座面受け部 左右2ヶ所

×

⑦後脚ブレーキ調整部 左右2ヶ所

×

⑧ブレーキプレート部 左右2ヶ所

×

3. リベット部のかしめの点検（リベットの錆やぐらつきの点検）[P7]

①ひじ置き部 左右2ヶ所（ブラインドリベット）

×

②ひじかけ部 左右2ヶ所

×

③前輪キャスター部 左右2ヶ所

×

④前輪キャスターロック部 左右2ヶ所

×

⑤後脚とブレーキプレート部 左右2ヶ所

×

⑥座面部 左右4ヶ所

×

⑦本体折りたたみバネひっかけ部 左右2ヶ所

×

⑧後脚つなぎプレート部 左右2ヶ所

4. バネ部の点検（バネのはずれ、錆等の点検）[P8]

※又はバネの先端が外を向いて指等にふれないかを点検して下さい。

①後輪部ブレーキバネ 左右2ヶ所

▲18

○

②折りたたみバネ 左右2ヶ所

▲20

○

③前輪キャスター部バネ 左右2ヶ所

▲19

○

④座面部バネ 左右2ヶ所

▲W-21

○

⑤座面部丸棒 2本

×

シンフォニーワイドSP メンテナンスチェックリスト

No.3

5. ネジ部の点検（ネジの抜け落ちとゆるみ、錆の点検） [P9]

必要なパーツ

事業者様修理可能

①ブレーキ本体 左右2ヶ所

▲22

○

②ブレーキレバーとワイヤー止め部 左右2ヶ所

▲23

○

③ワイヤー流れ止め下部 座面パイプ部左右2ヶ所

▲26

○

④かさ止めブラケット部 左1ヶ所

▲27

○

⑤肘かけ部 左右2ヶ所

▲W-25

○

⑥前輪キャスター受け部 左右2ヶ所

▲24

○

⑦前脚と座面パイプ部 左右2ヶ所

▲W-59・W-60

○

⑧押し手の高さ調節部 左右2ヶ所

▲28・29・30

○

⑨本体折りたたみサイド部 左右2ヶ所

▲W-58

×

⑩背もたれパイプ止め上部 左右2ヶ所

▲W-63

⑪背もたれパイプ止め下部 左右2ヶ所

▲W-64

6. 樹脂パーツの点検（樹脂の割れや汚れや傷の点検） [P10～P11]

①押し手グリップ 左右2ヶ所

×

②折りたたみレバー 左右2ヶ所

×

③高さ調節部 左右2ヶ所

▲28

○

④ひじかけ 左右2ヶ所

×

⑤ブレーキタイヤ押さえ 左右2ヶ所

▲P-57

○

⑥かさ止めブラケット 左後脚1ヶ所

▲36

○

⑦開閉用ロックレバー

▲37

○

⑧ブレーキワイヤー調整ネジ 左右2ヶ所

▲51

○

⑨パイプエンドツメの点検

・パイプエンドツメ（大） 座面受け部左右2ヶ所

▲P-74

○

・パイプエンドツメ（大） 座面横部左右2ヶ所

▲31

・パイプエンドツメ（中） 座面部、前脚接続部左右4ヶ所

▲32

○

・パイプエンドツメ（小） ブレーキプレート部左右2ヶ所

▲33

○

シンフォニーワイドSP メンテナンスチェックリスト

No.4

Ⅲ. 性能点検[P11～P14]

必要なパーツ
事業者様修理可能

1. 車輪の点検[P11～P12]

①車輪部の磨耗や割れ 6本	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲P-39・W-40	○
②車輪のキャップの有無と傷 6ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲41	○
③前輪キャスター部キャスター受けの抜け落ちや緩み 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲42	○
④車輪止めナット（抜け落ちや緩みの点検） 4ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲43	○
⑤前輪後輪の点検			
・前輪がスムーズに回転する 4ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		×
・後輪がスムーズに回転する 2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		×
⑥前輪キャスター部の性能点検			
・左右60度にした時、前輪を持ち上げ車輪を60度方向転換した時、スムーズに正面方向に転換する	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲46・47	○
・キャスター回転止めのロック及び解除がスムーズに行える 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		×

2. 走行点検[P12]

①キャスター固定時に押した時、違和感なくまっすぐ押せる	<input type="checkbox"/>		×
②キャスターフリー（360度）の状態では押した時、前輪車輪がスムーズに方向転換する	<input type="checkbox"/>		×

3. ブレーキ、ストッパの点検[P13]

①ブレーキ部本体の傷や割れ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		○
①ブレーキ部レバーの傷や割れ 1ヶ所	<input type="checkbox"/>	▲W-68	○
①ブレーキ部ワイヤーの折れ曲がり錆 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲W-49	○
①ワイヤー止めナットの抜け落ちやゆるみ 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲50	○
①ブレーキワイヤーエンドがかぶせの抜け落ち 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	▲52	○
②ストッパの性能点検 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		×
③ブレーキの性能点検 左右2ヶ所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		×

シンフォニーワイドSP メンテナンスチェックリスト

No.5

4. 各開閉等の点検[P14]

必要なパーツ

事業者様修理可能

①フレームの折りたたみがスムーズにできるか

×

②座面の上げ下げがスムーズにできるか

×

③高さ調節がスムーズにできるか

×

④開閉用ロックレバーが確実にかけられるか

×

IV. 点検の終了にあたって[P14]

- ・袋部をフレーム本体に装着して下さい。(袋部の付け方参照)
- ・バッグに取扱説明書を入れ、本体を折りたたみケースに入れて下さい。

お疲れさまでした。