

洗える2層クッション




硬さの違う2層のクッション

- 低反発と高反発のウレタンの2層で体圧を分散し、包み込むような座り心地です。
- 通気性が良く、ムシを防ぎ、洗うことができるので清潔に使うことができます。

クッション未使用

クッション使用

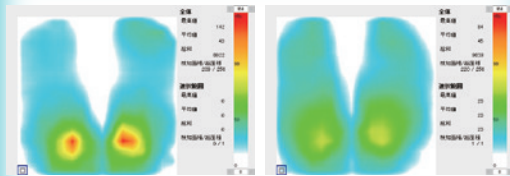


- 重いすを使用しての実験結果、青から赤になるほど圧力がかかっています。
- 使用モデルは体重70kgの男性です。かかる圧力、使用感には個人差があります。





洗える2層クッション

◆ 快適な座位を保つのにクッションは効果的

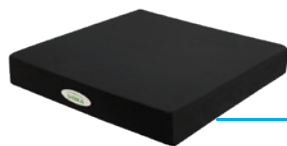


クッション底はすべり止め加工

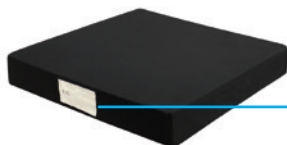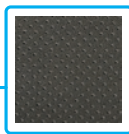

名前を記載することができます
※油性ペンを使用してください



カバーはファスナー形式で取り外せます

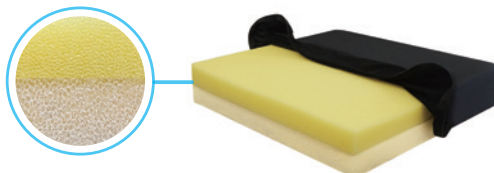

製品スペック

材質：中身 / 上部：低反発ウレタン・下部：高反発ウレタン
カバー / ポリエステル、底面にシリコンのすべり止め加工
サイズ：約 横幅 40× 奥行 40× 厚さ 6cm
重量：約 450g

△ ご使用上の注意

- 床ずれができやすい方が初めてご使用になる場合は、医師や看護師、セラピストなどの専門家にご相談ください。
- クッションとしてのみご使用ください。
- 疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- 破損した場合はご使用をやめてください。
- カバーのファスナー開閉で、中のクッションを傷つけないように注意してください。
- カバーは最後までしっかりと閉めてください。
- 無理な力(引っ張る・ねじる・折り曲げる・強く握る)を加えないでください。製品が破損する恐れがあります。
- 鋭利なものでカバーやクッションを傷つけないように注意してください。
- 本製品の改造はしないでください。

お手入れ・洗濯方法

- カバーをつけたままで、中性洗剤を水か、ぬるま湯に薄めて、十分水に浸しながら優しく手の平などで押し洗いをお願いします。
- 洗濯機は使わないでください。ウレタンが破損する恐れがあります。
- ※ポリエステル素材のカバーのみを洗うときは、洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- 柔軟剤や漂白剤は使用しないでください。
- 吊るしたり、絞ったりせず、風通しの良い場所に陰干しで、十分に乾燥させてください。
- ※季節や気温、室温で乾度時間が異なり、乾燥に2-3日かかる場合があります。
- ストープ・ドライヤー・アイロンでの乾燥や、熱湯やスチームによる殺菌は破損の原因になります。

保管方法

- 直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 火気の近く、高温多湿の場所での保管は避けてください。
- 圧縮状態や、上に重い物を置いている状態で保管していると、ヘタリや破損の原因となります。

※ 各自自治体の指示に従って処分・廃棄してください。

※ 製品改良のため、仕様・外観は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

TAISコード 00576-000047

分類コード 122406 (シート) (座) (背もたれ・車いす用) (ベッド・クッション)



株式会社 島製作所

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目12-5
TEL 06-6793-0991 FAX 06-6793-0992

