



折りたたみ
シャワーチェア

楽湯 DX 7250

〔取扱説明書〕 〔保管用〕

この取扱説明書は必ずお読みいただき、大切に保管してください。

このたびは、折りたたみシャワーチェア楽湯DX 7250をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、十分ご理解の上、ご使用ください。
読んだ後は大切に保管し、必要に応じてお読み直してください。

ご購入に際しては、ケアマネジャーまたは、福祉用具専門相談員等の専門家に、ご自身の体調や状態をお伝えの上、適切な選択やフィッティングなどのアドバイスを受けてご利用ください。



目 次

ご使用前の注意(点検).....	1
警告事項(思わぬケガの恐れがあります)...	1
各部の名称	2
使用方法	2
広げ方	2
折りたたみ方	2
座面の高さ調節	3
肘掛けの使い方	3
背もたれの高さ調節	3
シャワーホルダーの使い方	4
お手入れ方法	4
座面・背もたれパットの着脱	4
本体及びパットのお手入れ	4
ご使用後の注意	4
保証書	5

製品に不具合が発生した場合、まずはご購入販売店に連絡してください。

島製作所 お問い合わせ窓口 TEL:050-3385-7668 mail:shima@bi.mbn.or.jp
受付時間：9：00～17：00 土、日、祝日休み

ご使用にあたっては、体調の状態により危険なこともありますので、
ご自身で利用できるかをご判断ください。

転倒や故障の防止のために、下記の事項を必ず守ってください。

ご使用前の注意（点検）

- 組み立て及び調整は確実に行ってください。
- 浴室でご使用ください。浴槽内では使用しないでください。
- 製品各部を点検し、部品の緩み、傷、割れがないかを確認してください。
- 各部のネジ、ナット、リベットの緩み、サビや腐食などの異常がないかを確認してください。
- 4本の脚部がすべて同じ高さに設定されており、高さ調節用のロックボタンが確実にセットされているかを必ず確認してください。（転倒し、ケガの原因となります）
- 使用者が自分の身体を十分に安定できない場合は、必ず介助者の付き添いのもと、ご使用ください。
- 使用者の身体状況によっては、ご使用を中止されたり、介助者が付き添うなどの適切な判断をしてください。
- ゴムキャップが外れた状態で使用しないでください。（転倒し、ケガの原因となります）
- ゴムキャップが破れたり、摩耗等があれば、すぐに交換してください。
- 毛染め液を使用される際は、製品につかないようにしてください。
（付着した場所が劣化する恐れがあります）

警告事項（思わぬケガの恐れがあります）

- 入浴用椅子以外の用途では、使用しないでください。
- 必ず平たんで、安定した場所で使用してください。
- 踏み台代わりに使用しないでください。
- 幼児や子供だけで使用させないでください。
- 座るときは、均等に体重が加わるように、座面の中央にゆっくりとお座りください。
- 座面に浅く座らないでください。また、座面から立ち上がるときは、ゆっくりと行ってください。
（転倒する恐れがあります）
- 背もたれに過度の荷重をかけた場合、本体が動いたり、転倒したりすることがありますので
十分注意してください。
- 座る・立ち上がる・移動する場合、製品を支えにしないでください。（転倒する恐れがあります）
- 人が座っている状態のまま、本体を持って移動しないでください。
- 最大使用者体重は100kgです。（ご使用される方の体重が100kg以下の方に限ります）
- 勢いよく倒れかかるような座り方をしないでください。
- 石鹸やシャンプーなどで座面や床と接する部分が滑りやすくなっていますので、十分注意
してください。
- サウナなどの高温の場所では使用しないでください。
（熱くなった部分でのやけどや、製品の破損につながります）
- 分解・改造等はしないでください。

各部の名称

使用時サイズ：約H67.5～79×W50×D45～52cm

座面高：約37～47cm 5段階調節(約2.5cmピッチ)

背もたれの高さ：2段階調節(約3cmピッチ)

材質：本体/アルミ(粉体塗装)、座面・背もたれパット/EVA、
肘掛け/PP、座部・背もたれ/PE、ゴムキャップ/TPR
高さ調節用ロックボタン(バネ)/ステンレス

重量：約3.9kg

最大使用者体重：100kg


耐熱温度：80℃

折りたたみサイズ

高さ：約76.5cm

幅：約50cm


奥行：約26cm

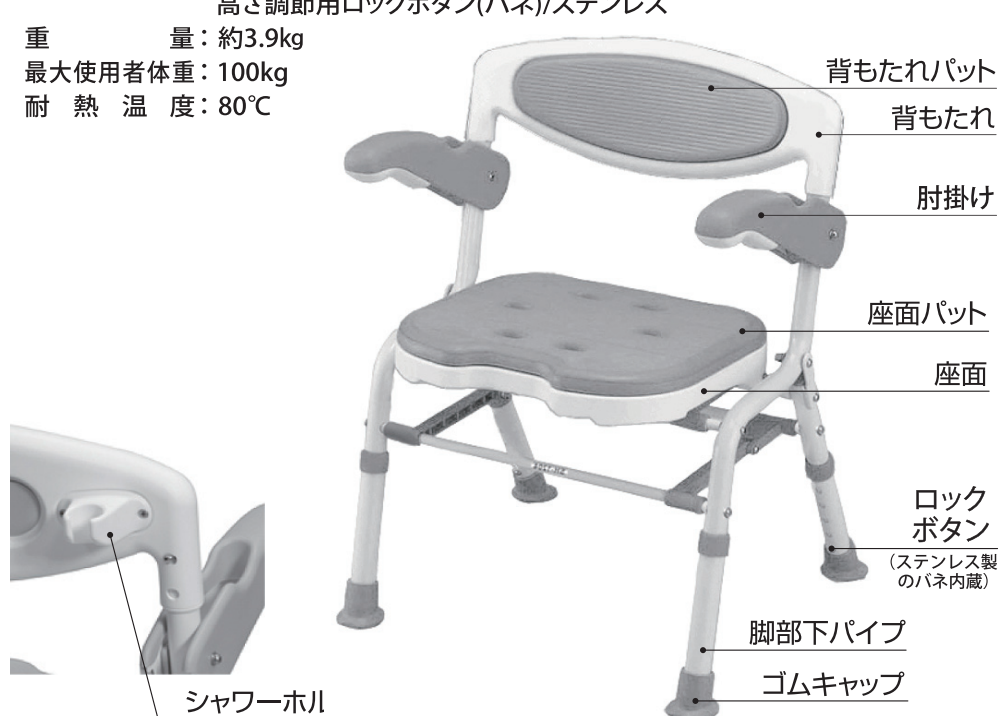

使用方法

広げ方

- ①座面を手前に倒し、座面を上から押すと座面裏ロックが「パチッ」と音がしてロックされます。
- ②必要に応じて肘掛けを水平になるまで下ろします。

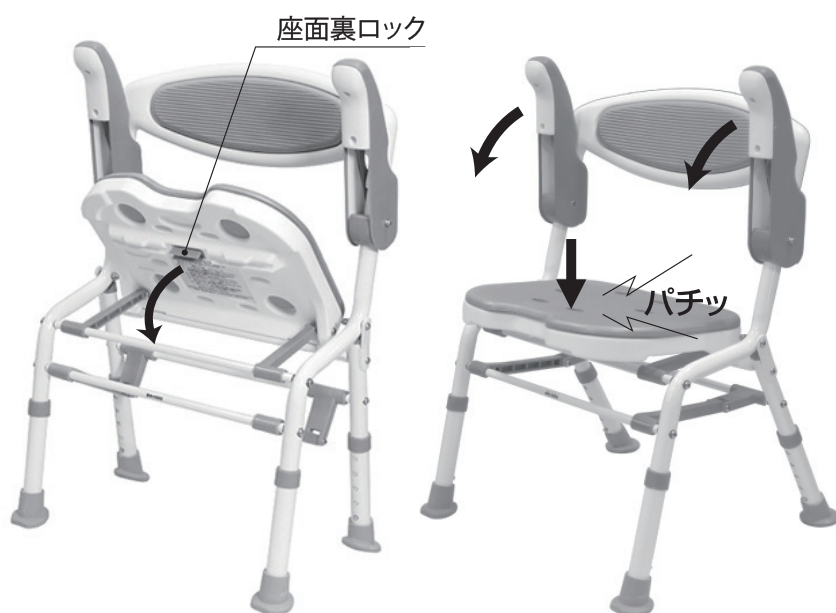

折りたたみ方

- ①座面を上引き上げると座面裏ロックが外れ、折りたためます。
- ②肘掛けを上げます。



- 注** ※肘掛けを上下するときに、手や指を挟まないように十分注意してください。
 ※折りたたんだり、広げるときに、手や指を挟まないように十分注意してください。
 ※座面裏ロックがしっかりと固定されているかを確認してください。

座面の高さ調節

- 座面の高さは37cmから47cmまで5段階に調節できます。
- 高さ調節はロックボタンを押しながら脚部下パイプを引いてください。なお、最適な高さは、座ってひざが直角に曲がり、足の裏がきちんと床についた状態です。ロックボタンが「カチッ」という音がして穴にはまっていればセット完了です。
- 高さ調節を行うときは、4本の脚部下パイプの高さが同じになるように正しくセットしてください。


注

※4本の脚部下パイプがすべて同じ高さに設定されており、高さ調節用のロックボタンが確実にセットされているかを必ず確認してください。

同じ高さにセットされていない場合や、ロックボタンが確実にセットされていないと転倒しケガをされる場合があります。

※ゴムキャップが外れていないかをご確認ください。


※高さ調節部のロックボタンのバネ（ステンレス製）が使用状況によってはサビたり腐食する場合がありますのでご注意ください。

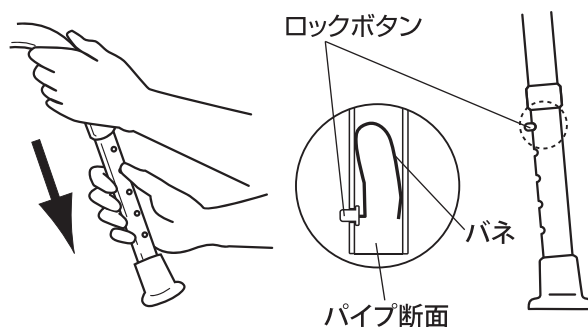


注

ロックボタンを強く押しすぎると、ロックボタンがズレてしまい、高さ調節が正しく設定できず、転倒やケガをする恐れがあります。

※特に、細い棒や、工具でロックボタンを押すと、位置がズレてしまう恐れがあるので、やめてください。

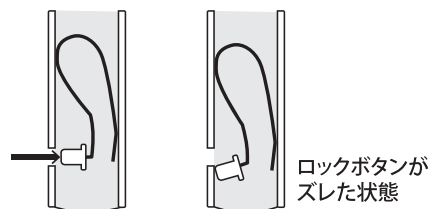

ロックボタンが脚部下パイプから出てこない場合（パイプの中にロックボタンが入りこんでしまった状態）、脚部下パイプを抜き、ロックボタンの位置を確認後、ズレを解消し、脚部下パイプをセットし直してください。

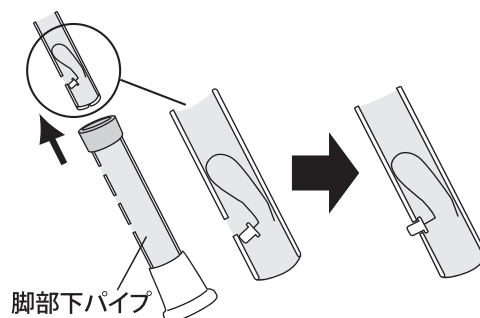

肘掛けの使い方

肘掛けは必要に応じて上下に稼働することができます。

肘掛けを下ろした状態での使用

- 立ち座り時に身体を支えたり、着座のときに安定を確保することができます。

注

※座面に座るときや、立ち上がる場合は、左右の肘掛けに均等に力を加えるようなかたちで使用してください。片方だけの肘掛けを使用された場合、転倒してケガをする恐れがありますので、十分注意してください。

肘掛けを上げた状態での使用

- 肘掛けを上げることにより、座ったままで身体を左右に回転させることができます。
- 狭いスペースを有効に使うことができます。

注

※上げている肘掛けを支えにして立たないでください。大変危険です。

※肘掛けを上下するときに、手や指を挟まないように十分注意してください。



背もたれの高さ調節


背もたれの高さを 3cm(2 段階) 調節できます。

- 背もたれの裏側にあります左右のプッシュボタンを押して背もたれを調節します。
- 片側のプッシュボタンを押しながら背もたれを少し引いて、次に反対側のプッシュボタンを押しながら引いてください。左右のプッシュボタンが「カチッ」と音がして穴にはまればセット完了です。

- 注** ※座っているときに過度にのけぞったりして背もたれに強い力をかけないように十分注意してください。
※高さ調節部のプッシュボタンのパネ（ステンレス製）が使用状況によってはサビたり腐食する場合がありますのでご注意ください。



シャワーホルダーの使い方

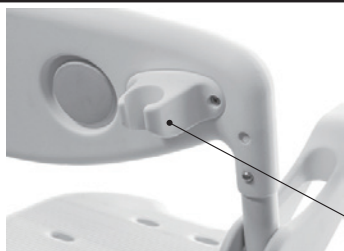

シャワーホルダー

必要に応じてシャワーホルダーを使用してください。

- 注** ※シャワーのホースを足に引っ掛けたりして転倒する恐れがありますので十分注意してください。

お手入れ方法



座面・背もたれパットの着脱方法

①パットの取り外し方

座面・背もたれの裏側から、パット凸部を押してください。パットを取り外すことができます。

②パットの取り付け方

パットの裏面に出ている凸部を座面・背もたれの穴と合わせて上からしっかりと押さえ込んでください。(座面パットの前後や背もたれパットの上下を間違わないように注意してください。背もたれパットの裏には『上』の印が付いています)

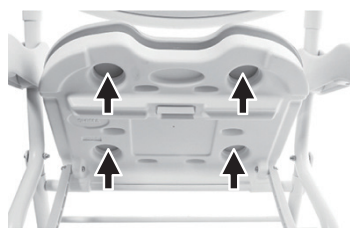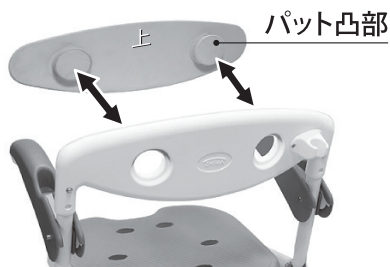

本体及びパットのお手入れ方法

- 薄めた中性洗剤をスポンジか柔らかい布に含ませて汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、乾いた布で拭いてください。

- 注** ※タワシや磨き粉、研磨材入りのスポンジ等は使用しないでください。
※洗剤（塩素系・酸性・アルカリ性）・シンナー・クレゾール等は絶対に使用しないでください。その他薬剤を使用しての殺菌消毒や温泉水などの使用は注意してください。(プラスチックや金属が劣化、または破損し、ケガの原因になることがあります)

⚠ご使用後の注意

- 火のそばに置かないでください。
(パットや樹脂が変形し、確実に固定できなくなったり、強度が弱くなる恐れがあります)
- 非常口・消火器・消火栓の前に放置しないでください。
- 廃棄は各自治体の指示に従って処分してください。

※製品改良のため、仕様・外観は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

交換パーツ

- 座面パット……………1枚
- 背もたれパット…1枚
- ゴムキャップ………4個(1台分)

※お求めは製品を購入された販売店または、お近くの販売店で
お願い致します。

MADE IN CHINA 24.10