

SHIMA
SHIMA PRODUCT

折りたたみ シャワーチェア 楽湯 7550 ST

〔取扱説明書〕 〔保管用〕

この取扱説明書は必ずお読みいただき、大切に保管してください。

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この説明書を必ずお読みいただき、十分ご理解の上、ご使用ください。

読んだ後は大切に保管し、必要に応じてお読み直してください。

ご購入に際しては、ケアマネージャーまたは福祉用具専門相談員等の専門家にご自身の体調や状態をお伝えの上、適切な選択やフィッティングなどのアドバイスを受けてご利用ください。



目次

ご使用前の注意(点検)	1
警告事項	1
各部の名称	2
使用方法	2
広げ方	2
折りたたみ方	2
座面の高さ調節	3
お手入れ方法	3
座面・背もたれパットの着脱	3
本体及びパットのお手入れ	3
パーツの価格	3
製品サイズ・製品仕様	4
注意事項	4
保証書	5
SGマーク	5

この取扱説明書に関しまして、ご不明な点やご質問などがありましたら、弊社サービス係、またはご購入販売店までお問い合わせください。

株式会社 島製作所 サービス係 ☎ 06-6793-0991

ご使用にあたっては、体調の状態により危険なこともありますので、
十分注意してください。

転倒や故障の防止のために、下記の事項を必ず守ってください。

ご使用前の注意（点検）

- 広げるときなどの開閉操作を行う際には、乳幼児や子供を近づけないでください。
- 広げるときに、手や指を挟まないように十分注意してください。
- 組み立て及び調整は確実に行ってください。
- 製品各部を点検してください。
- 各部のカシメ、鋸、ネジ、ナットが緩んでいないか、サビや腐食、破損などの異常がないかを点検・確認してください。
- 4本の脚部下パイプがすべて同じ高さに設定されており、高さ調節用のロックボタンが確実にセットされているかを必ず確認してください。（転倒し、けがの原因となります）
- 使用者がご自分の身体を十分に安定できない場合は、必ず介助者の付き添いのもとにご使用ください。
- 使用者の身体状況によっては、ご使用を中止されたり、介助者が付き添うなどの適切な判断をしてください。
- 使用前に座面裏パイプ受けに折りたたみパイプがはまっていることを確認してからご使用ください。（不意に折りたたまれ、転倒する恐れがあります）
- ゴムキャップが外れたままで使用しないでください。（転倒し、けがの原因となります）

警告事項（思わぬケガの恐れがあります）

- 必ず平坦で安定した場所で使用してください。
- 踏み台代わりにしないでください。
- 乳幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
- 座面に浅く座らないでください。転倒する恐れがあります。
- 座面から立ち上がる時は、ゆっくりと行ってください。
- 背もたれや、肘掛けに寄りかかったり、過度の荷重をかけた場合、本体が動いたり、転倒したりすることがありますので十分注意してください。
- 座るときや、立ち上がる場合、背もたれや肘掛けに手を付いて支えにしないでください。転倒する恐れがあります。
- 背もたれを支えにしての移動や立ち上がりをしないでください。
- 人が座っている状態で本体を持って移動しないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 最大使用者体重は100kgです。（ご使用される方の体重が100kg以下の方に限りです）
- 勢いよく倒れかかるような座り方をしないでください。
- 座るときは、均等に体重が加わるように座面の中央にお座りください。
- 石鹼やシャンプーなどで座面や床と接する部分が滑りやすくなっていますので十分注意してください。

各部の名称

肘掛け

ロック
ボタン
(ステンレス
のバネ内)



パット

本体




(自立)

使用方法



広げ方

●座面を手前に倒し、広げてください。

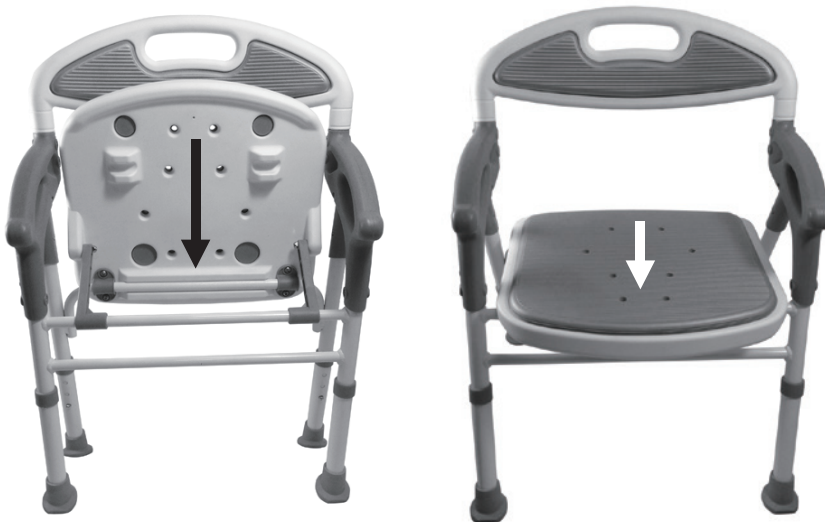

折りたたみ方

●座面を上引き上げると折りたためます。

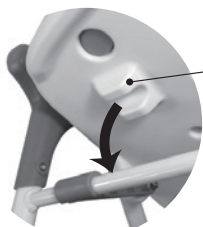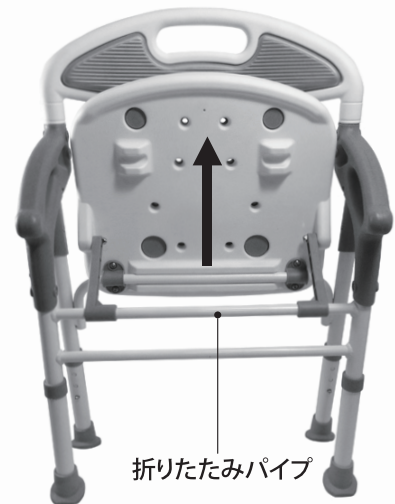

座面裏パイプ受け

注


※折りたたんだり、広げるときに手や指を挟まないように十分注意してください。
※座面裏パイプ受けに折りたたみパイプがはまって固定されているかを確認してください。

座面の高さ調節

- 座面の高さは36cmから41cmまで3段階に調節できます。
- 高さ調節はロックボタンを押しながら脚パイプを引いてください。なお、最適な高さは、座ってひざが直角に曲がり、足の裏がきちんと床についた状態です。ロックボタンが「カチッ」という音がして穴にはまっていればセット完了です。
- 高さ調節を行うときは、4本の脚部下パイプの高さが同じになるように正しくセットしてください。

注

- ※ 4本の脚部下パイプがすべて同じ高さに設定されており、高さ調節用のロックボタンが確実にセットされているかを必ず確認してください。
- 同じ高さにセットされていない場合や、ロックボタンが確実にセットされていないと転倒し、けがをされる場合があります。
- ※ ゴムキャップが外れていないかをご確認ください。
- ※ 高さ調節部のロックボタンのバネ（ステンレス製）が使用状況によってはサビたり腐食する場合がありますのでご注意ください。

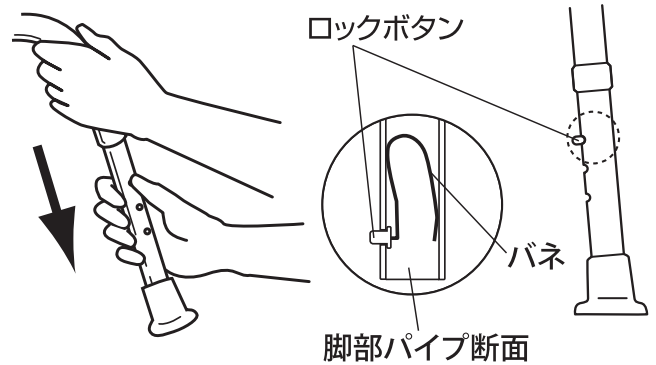

お手入れ方法


座面・背もたれパットの着脱方法

①パットの取り外し方

座面の裏側、背もたれの背面から、パット凸部を押してください。パットを取り外すことができます。

②パットの取り付け方

パットの裏面に出ている凸部を穴に合わせてしっかりと押さえ込んでください。
(座面、背もたれパットの前後や上下を間違わないように注意してください。)

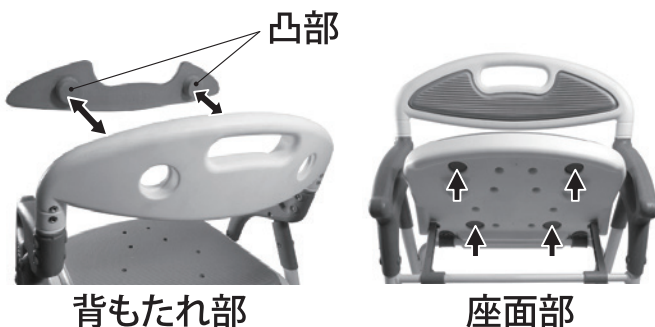


本体及びパットのお手入れ方法

- 薄めた中性洗剤をスポンジか柔かい布に含ませて汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、乾いた布で拭いてください。

注

- ※ タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないでください。
- ※ 洗剤（塩素系・酸性・アルカリ性）・シンナー・クレゾール等は絶対に使用しないでください。その他の薬剤を使用しての殺菌消毒や温泉水などの使用は注意してください。（プラスチックや金属が腐食、または破損し、けがの原因になることがあります）

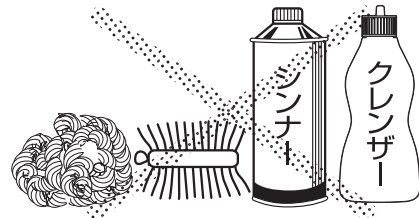

パーツの価格

- 背もたれパット……………1枚 2,057 円 (税抜 1,870円)
- 座面パット……………1枚 3,993 円 (税抜 3,630円)
- ゴムキャップ……………4個(1台分) 3,146 円 (税抜 2,860円)

お買い求めは、お近くの販売店でお願いします

製品サイズ・製品仕様



使用時 サイズ：約H66～71×W51.5×D48～51.5cm

折りたたみサイズ：約H75.5×W51.5×D24cm

座 面 高：約36～41cm 3段階調節(約2.5cmピッチ)

材 質：本体/アルミ(粉体塗装)、肘掛け・座部・背もたれ/PE
座面・背もたれパット/EVA、ゴムキャップ/TPR
高さ調節用のロックボタン(バネ)/ステンレス

重 量：約3kg

最大使用者体重：100kg

耐 熱 温 度：80℃

⚠ 注意事項

〈環 境〉

- 火のそばに置かないでください。樹脂が変形し、性能を維持できなくなります。

〈使用前〉

- 使用者が、ご自身の身体を十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添ってください。
- 使用者の身体状況によっては、ご使用を中止されたり、介助者が付き添うなどの適切な判断をしてください。
- ゴムキャップが破れたり、摩耗等の異常があれば、すぐに交換してください。

〈使用中〉

- 用途以外には使用しないでください。
- 最大使用者体重は100kgです。体重が100kgを超える方は使用できません。
- 浴用の洗い場でご使用ください。浴槽内では使用しないでください。
- 座るときはゆっくりと座面中央に座ってください。
- 座ったまま移動しないでください。
- 踏み台として使用しないでください。
- 背もたれ、肘掛けを支えにしての移動や立ち上がりをしてしないでください。

〈保 全〉

- 非常口、消火器、消火栓の前に放置しないでください。
- 各部の破損、緩みがないかを確認してください。
- 改造等はしないでください。

〈廃 棄〉

- 各自治体の指示に従って処分・廃棄してください。

※製品改良のため、仕様・外観は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 22.10



株式会社 島製作所

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目12-5
TEL 06-6793-0991 FAX 06-6793-0992



外袋



説明書