


バスグリップ

〔取扱説明書〕 〔保管用〕

この取扱説明書は必ずお読みいただき、大切に保管してください。

このたびは、バスグリップをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書を必ずお読みいただき、十分ご理解の上、ご使用ください。
読んだ後は大切に保管し、必要に応じてお読み直してください。
ご購入に際しては、ケアマネージャーまたは福祉用具専門相談員等の専門家にご自身の体調や状態をお伝えの上、適切な選択やフィッティングなどのアドバイスを受けてご利用ください。

●●●●●●●●●● 各部の名称 ●●●●●●●●●●

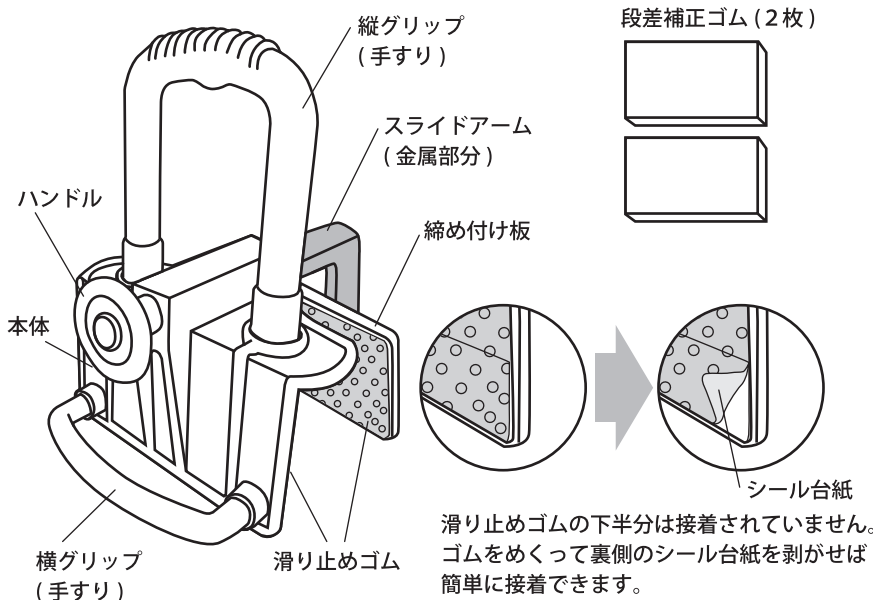

グリップにつかまりながら、片足ずつゆっくりと浴槽縁をまたいで出入りしてください。

サイズ：約H30×W22.5×D17.5 cm 重量：約1.5 kg
材質：ナイロン樹脂、スライドアーム：アルミ合金

この取扱説明書に関しまして、ご不明な点やご質問などがありましたら、
弊社サービス係、またはご購入販売店までお問い合わせください。


安全にお使いいただくために、ご使用前の注意と警告を必ず読んでからお使いください

取り付けができる浴槽


縁幅が55～140 mmであり、下記のタイプの浴槽のみ取り付けすることができます。

普通タイプの浴槽

浴槽の縁の断面図

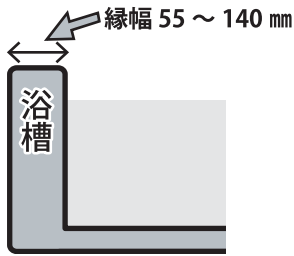


取り付けイメージ (横)

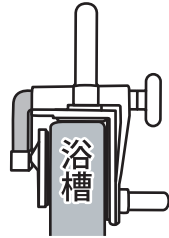


段差のあるタイプの浴槽

浴槽の縁の断面図

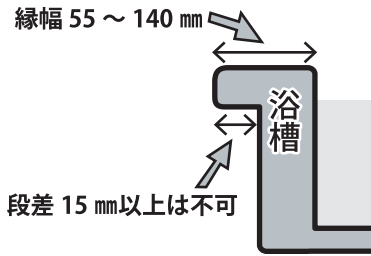

取り付けイメージ (横)

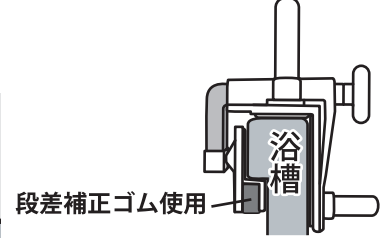


●別売りの補助板ゴムを使用すると46～54 mmの縁幅の浴槽にも取り付けすることができます。

※補助板ゴム……1枚 2,662円(税抜 2,420円) お買い求めはお近くの販売店でお願いします。

段差のない浴槽に取り付ける方法


1 準備

締め付け板に貼られている滑り止めゴムの下半分は接着されていません。シール台紙を剥がして締め付け板に接着してください。

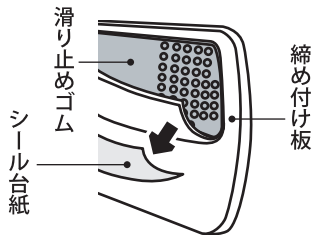


2 取り付ける

浴槽の取り付け面に水分や洗剤等が付いている場合、確実に固定できない場合があります。取り付け部分を乾いた布で拭いてから、横グリップが浴槽の内側に向くように取り付けてください。




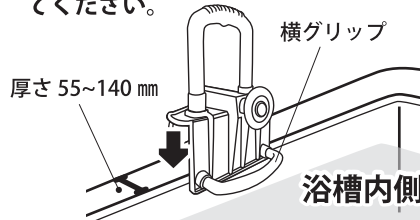


3 固定させる

ハンドルを回し、浴槽縁に確実に固定させるように締め付けてください。ハンドルの締め加減は縦グリップに左右の力を加えて、動かないことが目安です。

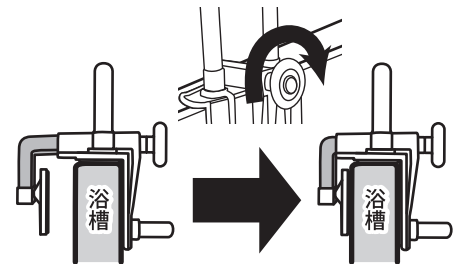

浴槽に段差がある場合の補正方法

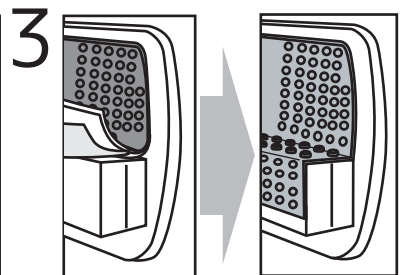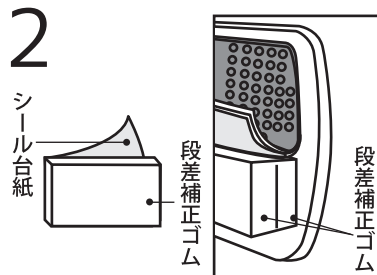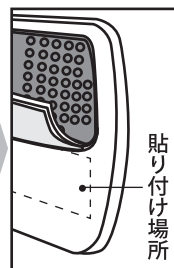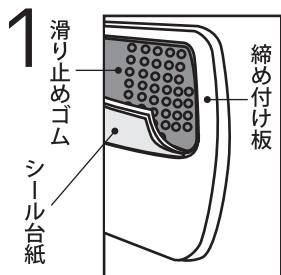

滑り止めゴムは階段状になるため、幾分足りない部分ができますが使用上特に問題はありません。

1 締め付け板に貼られている滑り止めゴムの下半分は接着されていません。締め付け板の接着されていない場所に段差補正ゴムを貼り付けて段差を補正しますので、滑り止めゴムのシール台紙を剥がさずにめくってください。

2 段差補正ゴムのシール台紙を剥がし、段差補正ゴムを貼ります。段差がおよそ4～8 mm位で1枚。9～13 mm位で2枚重ね貼りしてください。

※段差補正ゴムの貼り付けは1枚ずつ確実に貼ってください。しっかりと接着されていないとグリップが外れ、転倒する恐れがあります。

※段差補正ゴムの重ね貼りは2枚までです。

※2枚重ねて段差を補正しても、浴槽と滑り止めゴムの間に4 mm以上の段差がある場合は取り付けできません。

3 滑り止めゴムのシール台紙を剥がして段差補正ゴムの上に重ねて接着します。

補正ができたなら **段差のない浴槽に取り付ける方法** の取り付け方を参照して確実に浴槽に取り付けてください。

●交換部品 段差補正ゴム……2枚入り 1,331円(税抜 1,210円) お買い求めはお近くの販売店でお願いします。

安全にお使いいただくために、下記の事項を必ず守ってください。

ご使用前の注意(点検)

- 本製品は家庭用です。付け、外しが簡単なため、不特定多数の方の利用する浴場(公衆浴場など)には適していませんので使用しないでください。
- 浴槽の取り付け面に水分や洗剤等がついている場合は、確実に固定できない場合があります。取り付け部分を乾いた布で拭いてから取り付けてください。
- 浴槽に段差がある場合は、**浴槽に段差がある場合の補正方法**を参照して本製品を確実に浴槽に取り付けてください。
- ご使用前に浴槽に本製品がしっかりと固定されていることを確認してください。
- 火のそばに置かないでください。樹脂が変形し、確実に固定できなくなったり、グリップの強度が弱くなる恐れがあります。
- 使用者が自分自身で身体を十分に安定できない場合、介助者の付き添いが必要です。
- ご自身で本製品を確実に取り付けできない場合は、危険ですので介助者に確実に取り付けしていただいでください。

警告事項(思わぬケガの恐れがあります)

- 本製品の取り付け確認は確実に行ってください。本製品を取り付ける際などは落とさないように慎重に取り付けてください。
- 製品各部を点検し、ハンドル部分の緩みや製品に傷・割れがないかを確認してください。
- ハンドル操作で固定する際、過度な力で締めないでください。浴槽が損傷する場合があります。
- 本製品と浴槽がしっかりと固定されていることを確認してください。緩んでいた場合、本製品が外れ、ケガをする恐れがあります。
- 本製品に傷・ひび割れ・ハンドルによる調整ができない等の異常があればすぐに使用をやめてください。
- 本製品を乱暴に揺すったりしないでください。浴槽や本製品が破損する恐れがあります。
- 用途以外には使用しないでください。

お手入れ方法

- 薄めた中性洗剤をスポンジか柔らかい布に含ませて汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、日陰干しか乾いた布で乾拭きしてください。
- タワシや磨き粉、研磨材入りのスポンジ等は使用しないでください。
- 塩素系洗剤・酸性・アルカリ・シンナー・クレゾール等は絶対に使用しないでください。
プラスチックや金属が劣化、または破損し、けがの原因になることがあります。
- 長期間使用しない場合は、汚れを落として高温多湿の場所は避け、屋内で保管してください。

〈保管方法〉

- 取扱説明書は本体とともに保管してください。
- 本製品を他の方にお譲りになるときは、必ず取扱説明書もお渡しください。

保 全

- 非常口、消火器、消火栓の前に放置しないでください。
- 乳幼児や子供の手の届くところには置かないでください。
- 改造等はしないでください。

廃 棄

- 各自治体の指示に従って処分・廃棄してください。

MADE IN CHINA 22.10



株式会社 島製作所

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目12-5
TEL 06-6793-0991 FAX 06-6793-0992

