

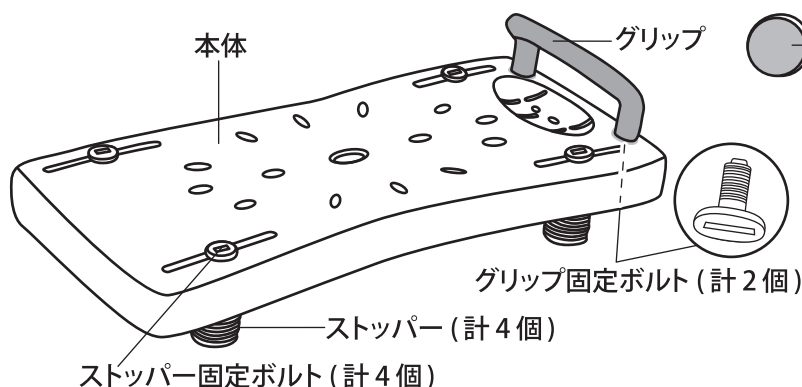
バスボード楽湯SP

〔取扱説明書〕 〔保管用〕

浴槽への出入りの補助としてのみご使用ください。

このたびは、バスボード楽湯SPをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、十分ご理解の上、ご使用ください。
読んだ後は大切に保管し、必要に応じてお読み直してください。
ご購入に際しては、ケアマネジャーまたは、福祉用具専門相談員等の専門家に、ご自身の体調や
状態をお伝えの上、適切な選択やフィッティングなどのアドバイスを受けてご利用ください。

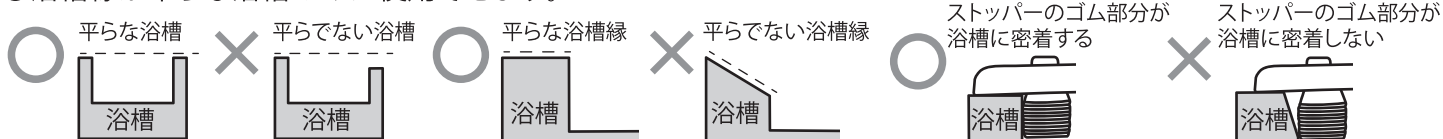
各部の名称・スペック



組立サイズ: 約H19×W70.5×D31.5cm
(ボードの厚さ約5cm)
重材 量: 約2.5kg
質: 本体/PP
グリップ/PA
脚部(ストッパー)/PA,TPR
最大使用者体重: 150kg

取り付けができる浴槽

●浴槽縁が平らな浴槽のみに使用できます。



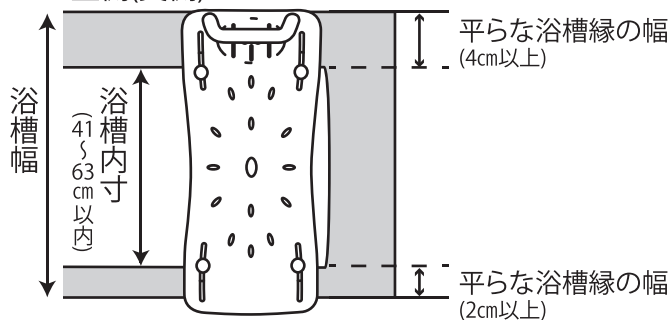
●浴槽内寸が41～63cmの浴槽のみ取り付けできます。

●壁側(奥側)の浴槽縁の幅が4cm未満の浴槽には
取付不可です。

●壁側(奥側)の浴槽縁の幅によっては取付不可の
場合があります。(例)浴槽内寸が41cmの場合、
壁側(奥側)の浴槽縁の幅は15cm以上必要です。

取り付け図

壁側(奥側)

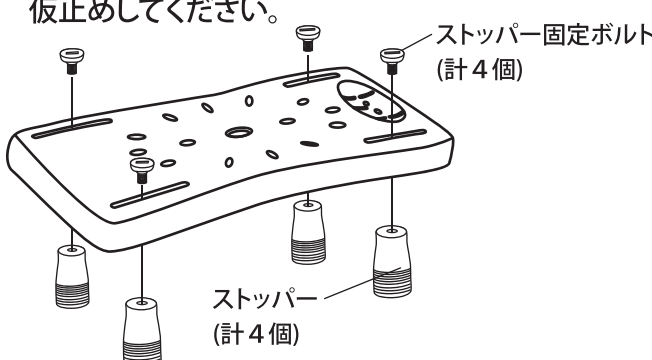


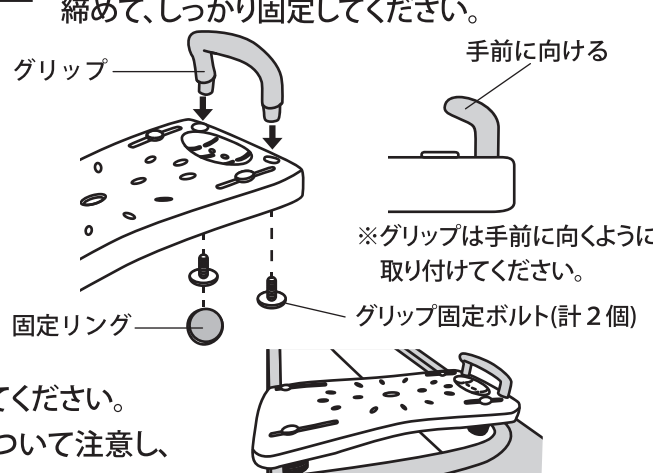
製品に不具合が発生した場合、まずはご購入販売店に連絡してください。

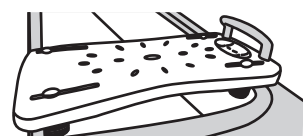
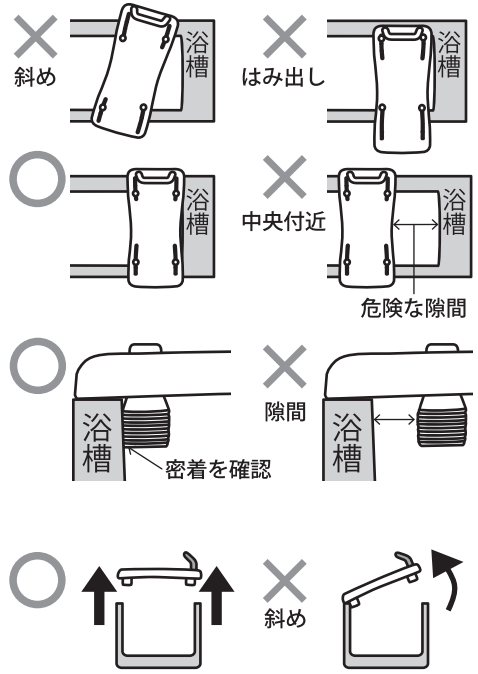
島製作所 お問い合わせ窓口 TEL:050-3385-7668 mail:shima@bi.mbn.or.jp
受付時間: 9:00～17:00 土、日、祝日休み

安全にお使いいただくために、ご使用前の注意と警告事項を必ずお読みください。

組み立て・取り付け方法

- 1 本体にストッパーをストッパー固定ボルトで仮止めしてください。


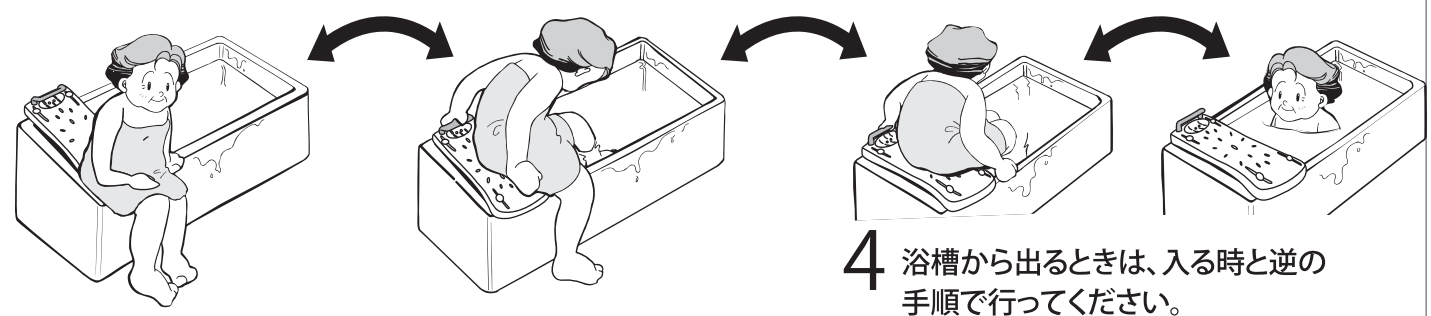
ストッパー固定ボルト (計4個)
ストッパー (計4個)
 - 2 グリップもグリップ固定ボルトを固定リングで締めて、しっかり固定してください。


グリップ
固定リング
グリップ固定ボルト (計2個)
※グリップは手前に向くように取り付けてください。
 - 3 バスボード本体を浴槽に乗せ、取り付け位置を決めてください。
※バスボード取り付け位置については下記のことについて注意し、原則として蛇口とは反対側に取り付けてください。

- 注** ●バスボードは浴槽に斜めに取り付けたり、浴槽から大きく手前にはみ出している状態で、取り付けないでください。
- バスボードは浴槽の中央付近に取り付けしないでください。また、浴槽との間には、できるだけ隙間をつくらないでください。身体が隙間にはまり込み、転倒し、ケガの恐れがあります。
- 4 ストッパーのゴム部分が、浴槽の内側に密着している状態で、ストッパーを手でしっかりと固定し、ストッパー固定ボルトを固定リングで締め、浴槽に固定してください。
浴槽の内側に4個のストッパーが密着していることを確認し、問題がなければ使用してください。
※固定リングを使ってバスボードを固定させてください。
- 注** ●バスボードを浴槽から取り外すときは、斜めに取り外さないでください。ストッパーが破損する恐れがあります。
- 

使用方法

※使用する前にバスボードが確実に取り付けられていることを確認してください。

※バスボードがひっくり返る恐れがあるので、浴槽より出ている部分には、体重をかけないでください。

- 1 ボードには、深く腰を掛けてください。
 - 2 体の向きを変え、グリップを握りながら、足を浴槽の中に片足ずつ入れてください。
 - 3 グリップを握りながら、バスボードの中央を目安に移動し、浴槽の底に足がついたら、体を反対方向に向けて、ゆっくりと浴槽に漬かってください。
 - 4 浴槽から出るときは、入る時と逆の手順で行ってください。
- 

安全にお使いいただくために、下記の事項を必ず守ってください。

ご使用前の注意(点検)

- 本製品は家庭用です。付け外しが簡単なため、不特定多数の方が利用する浴場(公衆浴場など)には適していませんので、使用しないでください。
- 必ず各部のボルトやグリップ等が、しっかり固定されていることを確認してください。
- 火のそばに置かないでください。樹脂が変形し、確実に固定できなくなったり、グリップの強度が弱くなる恐れがあります。
- 使用者がご自身で体を十分に安定させることができない場合、介助者の付き添いが必要です。
- ご自身でバスボードを確実に取り付けできない場合は、危険ですので、介助者に確実に取り付けていただいでください。

警告事項(思わぬケガの恐れがあります)

- 用途以外の使用や、浴槽以外での使用はやめてください。
- 最大使用者体重は150kgです。(ご使用される方の体重が150kg以下の方に限ります)
- バスボードの取り付けは **組み立て・取り付け方法** を参照して、確実に浴槽に取り付けてください。
- 製品各部を点検し、部品の緩みや傷・割れがないかを確認してください。
- 体やバスボードに石けんやシャンプーがついたままのご使用は、滑りやすく、危険ですので、よく洗い流してから使用してください。
- グリップは体を移動させるときにのみ、ご使用ください。
- グリップを持って、バスボードの取り外しなどはしないでください。
- 浴槽のふた代わりにしないでください。バスボードが変形、または破損し、ケガの原因になります。
- バスボードを踏み台にしないでください。
- バスボードを使用するときは、中央部にお座りください。
- 改造等はしないでください。

保管とお手入れ方法

- バスボードはこまめに清掃してください。本体・グリップ・ストッパーにカビや、ぬめりが発生すると、滑って転倒し、ケガの原因になります。
- 薄めた中性洗剤をスポンジか柔らかい布に含ませて汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、日陰干しか、乾いた布で拭き取ってください。
- タワシや磨き粉、研磨材入りのスポンジ等は使用しないでください。
- 本製品を清掃するときに洗剤を使われるときは、中性洗剤を使用してください。
(プラスチックが劣化、または破損し、ケガの原因になります)
- 長期間使用しない場合は、汚れを落として、高温多湿の場所は避け、屋内で保管してください。

〈保管方法〉

- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 本製品を他の方にお譲りになるときは、必ず取扱説明書もお渡しください。
- 非常口、消火器、消火栓の前に放置しないでください。
- 乳幼児や子供の手の届く所には置かないでください。

廃 棄

- 各自治体の指示に従って処分・廃棄してください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※取扱説明書に使用されているイラストは、説明をわかりやすくするための物ですので、現物とは多少異なることがあります。

交換パーツ

- グリップ…………… 1 個 ●グリップ固定ボルト…………… 1 個
- ストッパー…………… 1 個 ●ストッパー固定ボルト…………… 1 個

※お求めは製品を購入された販売店または、お近くの販売店をお願い致します。

MADE IN CHINA 24.10



株式会社 島製作所

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目12-5
TEL06-6793-0991 FAX06-6793-0992

