




バスグリップ

〔取扱説明書〕 〔保管用〕

この取扱説明書は必ずお読みいただき、大切に保管してください。

このたびは、バスグリップをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、十分ご理解の上、ご使用ください。
読んだ後は大切に保管し、必要に応じてお読み直してください。
ご購入に際しては、ケアマネジャーまたは福祉用具専門相談員等の専門家に、ご自身の体調や
状態をお伝えの上、適切な選択やフィッティングなどのアドバイスを受けてご利用ください。

●●●●●●●●●● 各部の名称 ●●●●●●●●●●

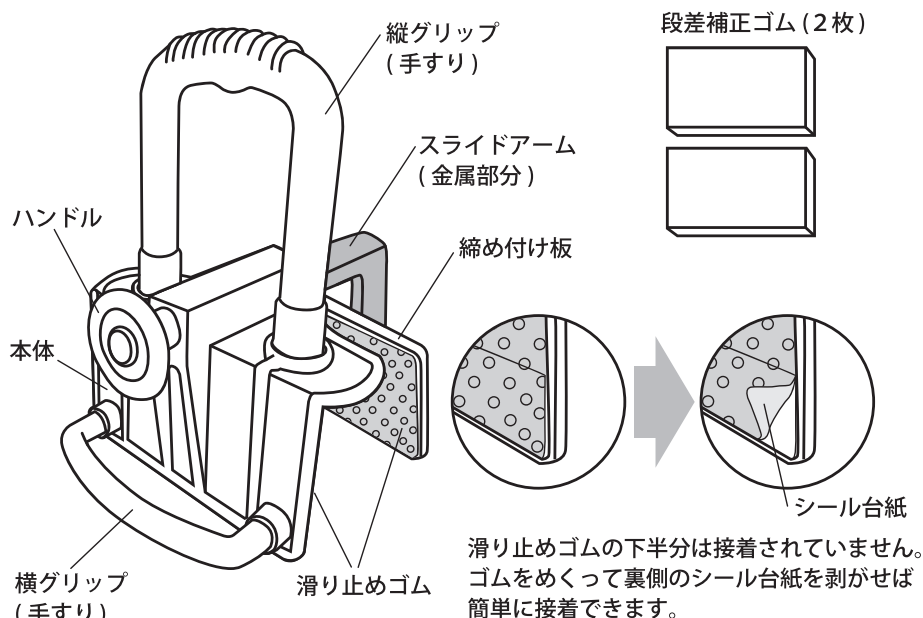

サイズ：約H30×W22.5×D17.5 cm 重量：約1.5 kg
材質：ナイロン樹脂、スライドアーム：アルミ合金



グリップにつかまりながら、片足ずつゆっくりと浴槽縁をまたいで出入りしてください。

製品に不具合が発生した場合、まずはご購入販売店に連絡してください。

島製作所 お問い合わせ窓口 TEL:050-3385-7668 mail:shima@bi.mbn.or.jp
受付時間：9：00～17：00 土、日、祝日休み


安全にお使いいただくために、ご使用前の注意と警告を必ず読んでからお使いください

取り付けができる浴槽


縁幅が55～140 mmであり、下記のタイプの浴槽のみ取り付けすることができます。

普通タイプの浴槽

浴槽の縁の断面図

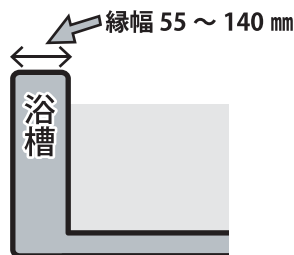


取り付けイメージ (横)

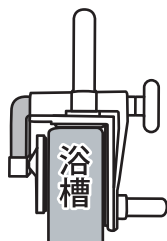


段差のあるタイプの浴槽

浴槽の縁の断面図

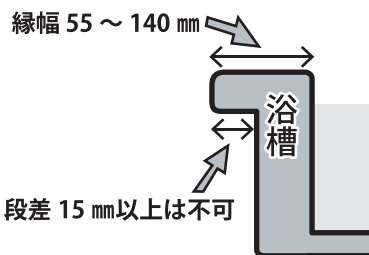

取り付けイメージ (横)

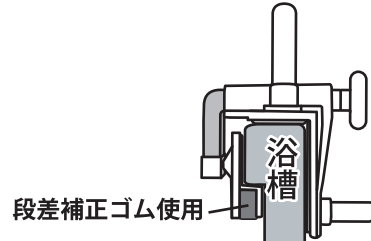


●別売りの補助板ゴムを使用すると46～54 mmの縁幅の浴槽にも取り付けすることができます。

段差のない浴槽に取り付ける方法


1 準備

締め付け板に貼られている滑り止めゴムの下半分は接着されていません。シール台紙を剥がして締め付け板に接着してください。

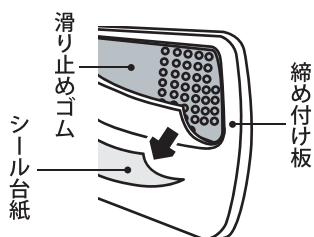


2 取り付ける

浴槽の取り付け面に水分や洗剤等が付いている場合、確実に固定できない場合があります。取り付け部分を乾いた布で拭いてから、横グリップが浴槽の内側に向くように取り付けてください。




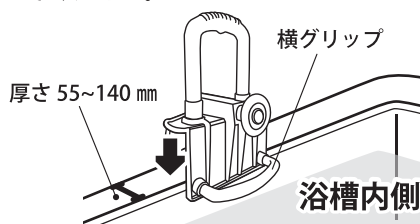


3 固定させる

ハンドルを回し、浴槽縁に確実に固定させるように締め付けてください。ハンドルの締め加減は縦グリップに左右の力を加えて、動かないことが目安です。

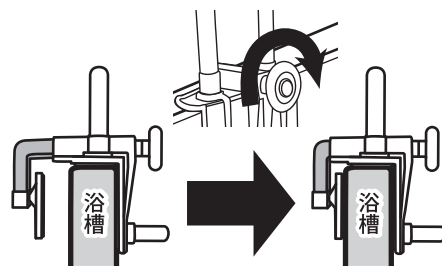

浴槽に段差がある場合の補正方法

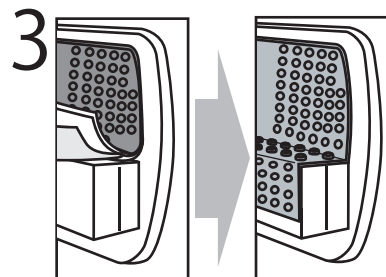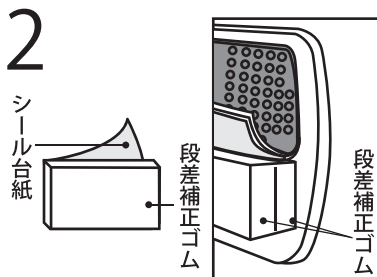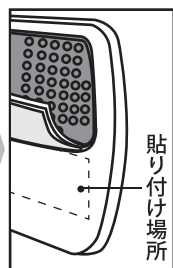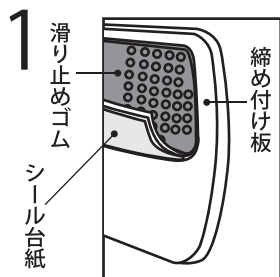

滑り止めゴムは階段状になるため、幾分足りない部分ができますが使用上特に問題はありません。

1 締め付け板に貼られている滑り止めゴムの下半分は接着されていません。締め付け板の接着されていない場所に段差補正ゴムを貼り付けて段差を補正しますので、滑り止めゴムのシール台紙を剥がさずにめくってください。

2 段差補正ゴムのシール台紙を剥がし、段差補正ゴムを貼ります。段差がおおよそ4～8 mm位で1枚。9～13 mm位で2枚重ね貼りしてください。

※段差補正ゴムの貼り付けは1枚ずつ確実に貼ってください。しっかりと接着されていないとグリップが外れ、転倒する恐れがあります。

※段差補正ゴムの重ね貼りは2枚までです。

※2枚重ねて段差を補正しても、浴槽と滑り止めゴムの間に4 mm以上の段差がある場合は取り付けできません。

3 滑り止めゴムのシール台紙を剥がして段差補正ゴムの上に重ねて接着します。
補正ができたら **段差のない浴槽に取り付ける方法** の取り付け方を参照して確実に浴槽に取り付けてください。

安全にお使いいただくために、下記の事項を必ず守ってください。

ご使用前の注意(点検)

- 本製品は家庭用です。付け、外しが簡単のため、不特定多数の方の利用する浴場(公衆浴場など)には適していませんので使用しないでください。
- 浴槽の取り付け面に水分や洗剤等がついている場合は、確実に固定できない場合があります。取り付け部分を乾いた布で拭いてから取り付けてください。
- 浴槽に段差がある場合は、**浴槽に段差がある場合の補正方法**を参照して本製品を確実に浴槽に取り付けてください。
- ご使用前に浴槽に本製品がしっかりと固定されていることを確認してください。
- 使用者が自分の身体を十分に安定できない場合は、必ず介助者の付き添いのもと、ご使用ください。
- 使用者の身体状況によっては、ご使用を中止されたり、介助者が付き添うなどの適切な判断をしてください。
- ご自身で本製品を確実に取り付けできない場合は、危険ですので介助者に確実に取り付けいただけてください。
- 毛染め液を使用される際は、製品につかないようにしてください。(付着した場所が劣化する恐れがあります)

警告事項(思わぬケガの恐れがあります)

- 本製品の取り付け確認は確実に行ってください。本製品を取り付ける際などは落とさないように慎重に取り付けてください。
- 製品各部を点検し、ハンドル部分の緩みや製品に傷・割れがないかを確認してください。
- ハンドル操作で固定する際、過度な力で締めないでください。浴槽が損傷する場合があります。
- 本製品と浴槽がしっかりと固定されていることを確認してください。緩んでいた場合、本製品が外れ、ケガをする恐れがあります。
- 本製品に傷・ひび割れ・ハンドルによる調整ができない等の異常があればすぐに使用をやめてください。
- 本製品を乱暴に揺すったりしないでください。浴槽や本製品が破損する恐れがあります。
- 石鹸やシャンプーなどで床やハンドル部が滑りやすくなっていますので、十分注意してください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造等はしないでください。

お手入れ方法

- 薄めた中性洗剤をスポンジか柔らかい布に含ませて汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、日陰干しか乾いた布で拭いてください。
- タワシや磨き粉、研磨材入りのスポンジ等は使用しないでください。
- 洗剤(塩素系・酸性・アルカリ性)・シンナー・クレゾール等は絶対に使用しないでください。その他の薬剤を使用しての殺菌消毒や温泉水、入浴剤などの使用は注意してください。(プラスチックや金属が腐食、または破損し、ケガの原因になることがあります)
- 長期間使用しない場合は、汚れを落として高温多湿の場所は避け、屋内で保管してください。

〈保管方法〉

- 取扱説明書は本体とともに保管してください。
- 本製品を他の方にお譲りになるときは、必ず取扱説明書もお渡しください。

ご使用後の注意

- 火のそばに置かないでください。パットや樹脂が変形し、確実に固定できなくなったり、強度が弱くなる恐れがあります。
- 非常口・消火器・消火栓の前に放置しないでください。
- 廃棄は各自治体の指示に従って処分・廃棄してください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※取扱説明書に使用されているイラストは、説明をわかりやすくするための物ですので、現物とは多少異なることがあります。

交換パーツ

- 段差補正ゴム……2 枚入り

オプションパーツ

- 補助板ゴム……1 枚入り

※お求めは製品を購入された販売店または、お近くの販売店で
お願い致します。

MADE IN CHINA 24.10



株式会社 島製作所

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目12-5
TEL 06-6793-0991 FAX 06-6793-0992

