

# シンフォニーSP メンテナンスチェックリスト

No.1

購入年月日          年          月          日

| 車体識別No.  | メンテナンス実施者                      |                          |                          |                          |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. バッグ部系統の点検 [メンテナンスガイドP.1～P.3]</b><br>※取扱説明書のバッグ内の有無<br>① バッグ部本体（3点）全てのホックを留めることが出来る<br>② バッグ部本体（3点）にほつれ、破れ、汚れがない<br>③ バッグの底板（有無）と割れがない<br>④ 底板のホックをバッグ底に留められる<br>⑤ 傘止めバンドの有無 左1ヶ所<br>⑥ 肘掛用ウレタンスポンジの破れ、汚れがない 左右2ヶ所 | 必要パーツ分類<br>コード                 | チェック履歴<br>/              | チェック履歴<br>/              | チェック履歴<br>/              |
|  | 弊社ホームページ<br>よりダウンロード           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | バッグ部系統<br>SP0604 SP0601        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | バッグ部系統<br>SP0604 SP0601        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | バッグ部系統<br>SP0700               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | バッグ部系統<br>SP0604 SP0601 SP0700 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | バッグ部系統<br>SP1200               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | バッグ部系統<br>SP5300               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>2. 補修スプレーの使用（外観点検） [メンテナンスガイドP.3]</b><br>※本体からバッグ3点を取り外してください<br>① フレーム部分に塗装剥げや傷がない   | 補修系統<br>SPP170 SPP171          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                                |                          |                          |                          |
| <b>3. フレームの点検 [メンテナンスガイドP.4]</b><br>※フレームの歪みや凹み、錆の点検<br>① フレームに歪み、がたつきがない<br>② フレームに凹みがない<br>③ フレームに錆がない   | <メーカー修理> 本体系統<br>SP0100 SP0101 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | 本体系統<br>SP0100 SP0101          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | 本体系統<br>SP0100 SP0101          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4. フレームの開閉点検 [メンテナンスガイドP.4]</b><br>※可動部の性能点検<br>① スムーズに車体を折りたたむことが出来る<br>② スムーズに車体を開くことが出来る<br>③ 車体を開いた状態で、座面がスムーズに上げ下げが出来る<br>④ フレームを折りたたんだ時、手を離しても車体は自立している   | <メーカー修理>                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | <メーカー修理>                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | <メーカー修理>                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | <メーカー修理>                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>5. ハンドルの高さ調節部点検 [メンテナンスガイドP.4]</b><br>※可動部の性能点検<br>① ハンドルの高さを調節する時、スムーズにハンドルを上げ下げ出来る  | <メーカー修理>                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |                                |                          |                          |                          |

## シンフォニーSP メンテナンスチェックリスト

No.2

| 6. 溶接部の点検 <span style="font-size: small;">【メンテナンスガイドP.5】</span>          | 必要パーツ分類<br>コード        | チェック履歴<br>/              | チェック履歴<br>/              | チェック履歴<br>/              |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ※がたつき、外れの点検  |                       |                          |                          |                          |
| ①前脚下部 左右2ヶ所  | 本体系統<br>SP0100 SP0101 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ②後脚ブレーキ調節部 左右2ヶ所   | 本体系統<br>SP0100 SP0101 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③ブレーキプレート部 左右2ヶ所   | 本体系統<br>SP0100 SP0101 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ④背もたれパイプ部 左右2ヶ所  | 本体系統<br>SP0100 SP0101 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑤座面受け部 左右2ヶ所   | 本体系統<br>SP0100 SP0101 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑥座面受け可動パイプ部バッグ側 左右2ヶ所  | 本体系統<br>SP0100 SP0101 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑦座面受け部後側U字型パイプ部 左右2ヶ所  | 本体系統<br>SP0100 SP0101 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑧座面受け可動パイプ部折りたたみレバー側 左右2ヶ所   | 本体系統<br>SP0100 SP0101 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>7. リベット部の点検 <span style="font-size: small;">【メンテナンスガイドP.6】</span></b> |                       |                          |                          |                          |
| ※錆や外れ、がたつきの点検  |                       |                          |                          |                          |
| ①ハンドル樹脂部 左右2ヶ所   | <メーカー修理>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ②前輪キャスター上部樹脂部 左右2ヶ所  | <メーカー修理>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③前脚と背もたれパイプつなぎ部 左右2ヶ所  | <メーカー修理>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ④車体折りたたみ開閉用バネ掛け部 左右2ヶ所   | <メーカー修理>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑤座面折りたたみバネ掛け部 左右2ヶ所  | <メーカー修理>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑥座面折りたたみ可動パイプ三角板部 左右6ヶ所  | <メーカー修理>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑦車体折りたたみ開閉用バネ掛け部（プレート側） 左右2ヶ所  | <メーカー修理>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑧肘掛樹脂部 左右2ヶ所   | <メーカー修理>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑨ブレーキプレート部 左右2ヶ所   | <メーカー修理>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**3. フレームの点検 4. フレームの開閉点検 5. ハンドルの高さ調節部点検**

**6. 溶接部分の点検 7. リベット部の点検**

上記項目の点検作業で異常があれば、これより先の点検作業でパーツ交換を行っても異常が改善されない場合があります

特に「フレームの歪み」は車輪の可動、ブレーキの制動に大きく影響します

※フレームの歪み具合により修理が出来ない場合があります

※フレームの凹みは製品の構造上、修理は出来ません（本体系統 SP0100 SP0101：フレーム交換推奨）

※溶接部分の異常は金属の性質上、修理は出来ません（本体系統 SP0100 SP0101：フレーム交換推奨）

# シンフォニーSP メンテナンスチェックリスト

No.3

| 8. シールシステムの点検 [メンテナンスガイドP.7]              | 必要パーツ分類<br>コード          | チェック履歴<br>/              | チェック履歴<br>/              | チェック履歴<br>/              |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ※剥がれや汚れの点検                                |                         |                          |                          |                          |
| ①反射シール 前後左右脚部 4ヶ所                         | シール系統<br>SP0800         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ②ブレーキシール ハンドル部左右 4ヶ所                      | シール系統<br>SP0900         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③本体表示シール バッグ内の底板 1ヶ所                      | シール系統<br>SP1000         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ④ブレーキ調節シール 左右 2ヶ所                         | シール系統<br>SP1100         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑤踏み込み注意シール 1ヶ所                            | シール系統<br>SP5700         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. バネシステムの点検 [メンテナンスガイドP.7]               |                         |                          |                          |                          |
| ※バネの外れや緩み、錆の点検                            |                         |                          |                          |                          |
| ①後輪ブレーキバネ 左右 2ヶ所                          | バネ系統<br>SP1400          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ②前輪キャストバネ 左右 2ヶ所                          | バネ系統<br>SP1500          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③車体折りたたみ開閉用バネ 左右 2ヶ所                      | バネ系統<br>SP1600          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ④座面折りたたみバネ 左右 2ヶ所                         | バネ系統<br>SP1700          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. ネジシステムの点検 [メンテナンスガイドP.8]              |                         |                          |                          |                          |
| ※ネジの抜け落ちや緩み、錆の点検                          |                         |                          |                          |                          |
| ①ブレーキ本体ネジ 左右 2ヶ所                          | ネジ系統<br>SP1800          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ②ブレーキレバー部ネジ 左右 2ヶ所                        | ネジ系統<br>SP1900          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③前輪キャスト受けネジ 左右 2ヶ所                        | ネジ系統<br>SP2000          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ④ワイヤー流れ止めネジ 左右 2ヶ所                        | ネジ系統<br>SP2100          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑤傘受けブラケットネジ 左 1ヶ所                         | ネジ系統<br>SP2200          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑥本体ネジ 左右 2ヶ所                              | ネジ系統<br>SP5100          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. 樹脂パーツ①の点検 [メンテナンスガイドP.9]              |                         |                          |                          |                          |
| ※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検                        |                         |                          |                          |                          |
| ①パイプエンドツメ6分パイプ用①（座面受け部φ13） 左右 2ヶ所         | 樹脂パーツ①<br>SP2500 SP2501 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ②パイプエンドツメ5分パイプ用①（座面折りたたみ可動パイプ部φ12） 左右 2ヶ所 | 樹脂パーツ①<br>SP5400 SP5401 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③パイプエンドツメ5分パイプ用②（座面受け可動パイプ部φ13） 左右 2ヶ所    | 樹脂パーツ①<br>SP5500 SP5501 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ④パイプエンドツメ4分パイプ用②（背もたれパイプ部φ11） 左右 2ヶ所      | 樹脂パーツ①<br>SP5200 SP5201 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑤パイプエンドツメ4分パイプ用①（ブレーキプレート部φ11） 左右 2ヶ所     | 樹脂パーツ①<br>SP2700 SP2701 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑥ハンドル高さ調節キャップ 左右 2ヶ所                      | 樹脂パーツ①<br>SP2300 SP2301 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑦傘受けブラケット 左 1ヶ所                           | 樹脂パーツ①<br>SP2900 SP2901 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑧前輪キャスト回転止めプレート 左右 2ヶ所                    | 樹脂パーツ①<br>SP3000 SP3001 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# シンフォニーSP メンテナンスチェックリスト

No.4

|   | 必要パーツ分類<br>コード                         | チェック履歴<br>/              | チェック履歴<br>/              | チェック履歴<br>/              |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1 2. 樹脂パーツ②の点検 [メンテナンスガイドP.9]</b>                            |  |                          |                          |                          |
| ※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検  |  |                          |                          |                          |
| ①ハンドル高さ調節ピン 左右2ヶ所   | 樹脂パーツ②<br>SP2402                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ②ハンドルグリップ 左右2ヶ所   | 樹脂パーツ②<br>SP2800                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③ワイヤー流れ止め 左右2ヶ所   | 樹脂パーツ②<br>SP3100                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>1 3. 車輪システムの点検 [メンテナンスガイドP.10]</b>                           |  |                          |                          |                          |
| ※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検 ※車輪部の劣化点検                                    |  |                          |                          |                          |
| ①車輪 前後6本  | 車輪系統<br>SP3400 SP3500<br>SP3401 SP3501 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ②車輪キャップの有無 前後6ヶ所  | 車輪系統<br>SP3600 SP3601                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③前輪キャスト受け 左右2ヶ所   | 車輪系統<br>SP3700 SP3701                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ④前輪キャスト 左右2ヶ所   | 車輪系統<br>SP4100 SP4101                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑤車輪止めナット 前後左右4ヶ所  | 附属パーツ系統<br>SP3800                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>1 4. ブレーキ系統・附属パーツ系統の点検 [メンテナンスガイドP.10]</b>                   |  |                          |                          |                          |
| ※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検  |  |                          |                          |                          |
| ①ブレーキレバー 左右2ヶ所  | ブレーキ系統<br>SP4200                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ②ブレーキワイヤーに折れ曲がりや金属部に錆がない 左右2ヶ所                                  | ブレーキ系統<br>SP4300                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③ワイヤー止めナットの抜け落ちやゆるみ、錆がない 左右2ヶ所                                  | ブレーキ系統<br>SP4600                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ④ブレーキ調節ネジ 左右2ヶ所   | ブレーキ系統<br>SP4700                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑤ブレーキワイヤーエンドかぶせの有無 左右2ヶ所  | 附属パーツ系統<br>SP4800                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>1 5. 車輪系統可動部の性能点検 [メンテナンスガイドP.11]</b>                        |  |                          |                          |                          |
| ※車輪の可動点検  |  |                          |                          |                          |
| ①前輪がスムーズに回転する 前4本   | 車輪系統<br>SP3900                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ②後輪がスムーズに回転する 後2本   | 車輪系統<br>SP4000                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③キャスト回転止めレバーを固定位置（上げた状態）で車体を前方へ軽く押した時、前輪と後輪が空回りせず車体が動く          | 車輪系統<br>SP3400 SP3500<br>SP3401 SP3501 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ※キャストの可動点検 [メンテナンスガイドP.11]                                      |  |                          |                          |                          |
| ①キャスト回転止めレバーが上下に可動する 左右2ヶ所                                      | 車輪系統<br>SP4100 SP4101                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ②キャスト回転止めレバーを下げた状態で前輪を右60度位置に保ち前輪を持ち上げた時スムーズに前輪が正面方向に転換する 左右2ヶ所 | バネ系統・車輪系統<br>SP1500<br>SP4100 SP4101   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③キャスト回転止めレバーを下げた状態で前輪を左60度位置に保ち前輪を持ち上げた時スムーズに前輪が正面方向に転換する 左右2ヶ所 | バネ系統・車輪系統<br>SP1500<br>SP4100 SP4101   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## シンフォニーSP メンテナンスチェックリスト

No.5

### 16. 走行点検 [メンテナンスガイドP.12]

|  | 必要パーツ分類<br>コード                       | チェック履歴<br>/              | チェック履歴<br>/              | チェック履歴<br>/              |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ①キャスト回転止めレバーを固定位置（上げた状態）で車体を違和感なく前方へ押すことができる               | <メーカー修理>                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ②キャスト回転止めレバーを下げた状態で車体を前方へ動かした時前輪キャストがスムーズに左右60度ずつに方向転換が出来る | バネ系統・車輪系統<br>SP1500<br>SP4100 SP4101 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③車体をゆっくりと前方へ走行させながら両側のブレーキレバーを握ると車体を制動させることが出来る            | パーツ交換マニュアル<br>P.3～P.5<br>ブレーキ設定参照    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ④車体をひろげた状態で尚且つ静止させた状態でブレーキレバーを下げると駐車用ストッパがかかる              | パーツ交換マニュアル<br>P.3～P.5<br>ブレーキ設定参照    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 17. 点検の終了にあたって [メンテナンスガイドP.13]

・バッグ部本体（3点）をフレームに装着してください

・バッグに取扱説明書を入れてください

※車体の保管の際、駐車用ストッパをかけた状態で保管された場合は後車輪が凹んでしまう恐れがあります

駐車用ストッパをかけない状態で車体を折りたたんでも自立する、出来る限り水平な場所での保管をお勧めします

お疲れ様でした

※点検が終了して異常が見当たらない車体も長時間使用しない場合は定期的に点検作業を行ってください

No.2021.01