

# シンフォニー S P スリム メンテナンスチェックリスト

No.1

購入年月日          年          月          日

車体識別No.	メンテナンス実施者				
<b>1. バッグ部システムの点検</b> [メンテナンスガイドP.1~P.3]  ①取扱説明書のバッグ内の有無 ----- ②バッグ部本体（2点）全てのホックを留めることができる ----- ③バッグ部本体（2点）にほつれ、破れ、汚れがない ----- ④本体表示の汚れや破れがない 座面部裏面 ----- ⑤バッグの底板（有無）と割れがない ----- ⑥バッグの形状保持板（有無）と割れがない ----- ⑦バッグの形状保持板の全てのホックを留めることができる ----- ⑧傘止めバンドの有無 左1ヶ所 ----- ⑨ハンドルウレタンスポンジの破れ、汚れがない 1ヶ所	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /	
	弊社ホームページ よりダウンロード	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	バッグ部系統 SR0301 SR0304 SR0305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	バッグ部系統 SR0400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	バッグ部系統 SR0500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	バッグ部系統 SR0500 SR0301 SR0304	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	バッグ部系統 SR0600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	バッグ部系統 SR0700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>2. 補修スプレーの使用（外観点検）</b> [メンテナンスガイドP.3] ※本体からバッグ2点を取り外してください  ①フレーム部分に塗装剥げや傷がない	補修系統 SR1302	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>3. フレームの点検</b> [メンテナンスガイドP.4] ※フレームの歪みや凹み、錆の点検  ①フレームに歪み、がたつきがない ----- ②フレームに凹みがない ----- ③フレームに錆がない	<メーカー修理> 本体系統 SR0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	本体系統 SR0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	本体系統 SR0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4. フレームの開閉点検</b> [メンテナンスガイドP.4] ※可動部の性能点検  ①スムーズに車体を折りたたむことができる ----- ②スムーズに車体を開くことができる ----- ③車体を開いた状態で、固定用ロックレバーで車体の開閉を固定することができる ----- ④車体を開いた状態で、座面がスムーズに上げ下げができる ----- ⑤フレームを折りたたんだ時、手を離しても車体は自立している ----- ⑥フレームを折りたたんだ時、開閉用ストップレバーをかけることができる	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<メーカー修理> 樹脂パーツ② SR3402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	樹脂パーツ② SR3500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5. ハンドルの高さ調節部点検</b> [メンテナンスガイドP.4] ※可動部の性能点検  ①ハンドルの高さを調節する時、スムーズにハンドルを上げ下げ出来る	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

シンフォニーSPスリム メンテナンスチェックリスト

No.2

6. 溶接部分の点検 [メンテナンスガイドP.5]

※がたつき、外れの点検

必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
①前脚下部 左右2ヶ所 本体系統 SR0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②後脚ブレーキ調節部 左右2ヶ所 本体系統 SR0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ブレーキプレート部 左右2ヶ所 本体系統 SR0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④固定用ロック部パイプ 左右2ヶ所 本体系統 SR0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤後脚U字型パイプ部 左右2ヶ所 本体系統 SR0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥座面可動パイプ部 左右2ヶ所 本体系統 SR0102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. リベット部の点検 [メンテナンスガイドP.6]

※錆や外れ、がたつきの点検

①前脚U字型パイプ部 左右2ヶ所 <メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②バッグ差し込みフレーム部 左右2ヶ所 <メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③座面可動パイプ部 左右2ヶ所 <メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④座面受け樹脂部 左右2ヶ所 <メーカー修理> 樹脂パーツ②SR3402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤車体折りたたみ開閉用バネ掛け部 左右2ヶ所 <メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥車体折りたたみ開閉用バネ掛け部 (丸型パイプ側) 左右2ヶ所 樹脂パーツ② SR3402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦固定用ロックレバーパイプ一体型樹脂部 左右2ヶ所 樹脂パーツ② SR3402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧車体開閉可動プレート部 (前脚側) 左右2ヶ所 <メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨車体開閉可動プレート部 (後脚側) 左右2ヶ所 <メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑩車体開閉可動プレート部 (ハンドル可動パイプ側) 左右2ヶ所 <メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑪開閉用ストッパレバー掛け部 左1ヶ所 <メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑫車体折りたたみ可動制御樹脂部 左右2ヶ所 <メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. フレームの点検 4. フレームの開閉点検 5. ハンドルの高さ調節部点検

6. 溶接部分の点検 7. リベット部の点検

上記項目の点検作業で異常があれば、これより先の点検作業でパーツ交換を行っても異常が改善されない場合があります

特に「フレームの歪み」は車輪の可動、ブレーキの制動に大きく影響します

※フレームの歪み具合により修理が出来ない場合もあります

※フレームの凹みは製品の構造上、修理は出来ません (本体系統 SR0102 : フレーム交換推奨)

※溶接部分の異常は金属の性質上、修理は出来ません (本体系統 SR0102 : フレーム交換推奨)

# シンフォニーSPスリム メンテナンスチェックリスト

No.3

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
<b>8. シールシステムの点検 [メンテナンスガイドP.7]</b>				
※剥がれや汚れの点検				
①反射シール 前後左右脚部 4ヶ所	シール系統 SR0800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキシール ハンドル部左右 2ヶ所	シール系統 SR0900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ブレーキ調節シール 左右 2ヶ所	シール系統 SR1000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスターシール 左右 2ヶ所	シール系統 SR1100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤固定用ロックレバー部シール 1ヶ所	シール系統 SR1200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥高さ調節キャップ確認シール 右1ヶ所	シール系統 SR6000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. バネシステムの点検 [メンテナンスガイドP.7]</b>				
※バネの外れや緩み、錆の点検				
①後輪ブレーキバネ 左右 2ヶ所	バネ系統 SR1400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②前輪キャスターバネ 左右 2ヶ所	バネ系統 SR1500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③車体折りたたみ開閉用バネ 左右 2ヶ所	バネ系統 SR1600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④座面折りたたみバネ 1ヶ所	バネ系統 SR1700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10. ネジシステムの点検 [メンテナンスガイドP.8]</b>				
※ネジの抜け落ちや緩み、錆の点検				
①ブレーキ本体ネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 SR1800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキ本体上部ネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 SR1900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ブレーキレバー部ネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 SR2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスター受けネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 SR2100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤前輪キャスター上部樹脂取付ネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 SR2200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ワイヤー流れ止めネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 SR2300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦傘受けブラケットネジ 左 1ヶ所	ネジ系統 SR2400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧ブレーキプレート取付ネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 SR2500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨開閉用ストップレバー取付ネジ 左 1ヶ所	ネジ系統 SR2600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑩キャスター切り替えレバー部ネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 SR2700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11. 樹脂パーツ①の点検 [メンテナンスガイドP.9]</b>				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①パイプエンドツメ6分パイプ用③（座面横部φ12.5） 左右 2ヶ所	樹脂パーツ① SR2802	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②パイプエンドツメ6分パイプ用④（ハンドルパイプ底部φ14.5） 左右 2ヶ所	樹脂パーツ① SR2902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ハンドル高さ調節キャップ 左右 2ヶ所	樹脂パーツ① SR3002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④傘受けブラケット 左 1ヶ所	樹脂パーツ① SR3102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# シンフォニーSPスリム メンテナンスチェックリスト

No.4

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
<b>1 2. 樹脂パーツ②の点検 [メンテナンスガイドP.10]</b>				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①ハンドル高さ調節ピン 左右2ヶ所	樹脂パーツ② SR3200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキタイヤ押さえ 左右2ヶ所	樹脂パーツ② SR3302	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③固定用ロックレバーパイプ一体型	樹脂パーツ② SR3402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④開閉用スットパレバー 左1ヶ所	樹脂パーツ② SR3500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ハンドルグリップ 左右2ヶ所	樹脂パーツ② SR3602	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ワイヤー流れ止め 左右2ヶ所	樹脂パーツ② SR3700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1 3. 車輪系統の点検 [メンテナンスガイドP.10]</b>				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検 ※車輪部の劣化点検				
①車輪 前後6本	車輪系統 SR3802 SR3902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②車輪キャップの有無 前後6ヶ所	車輪系統 SR4002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③前輪キャスト受け 左右2ヶ所	車輪系統 SR4102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスト 左右2ヶ所	車輪系統 SR4402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤キャスト切り替えレバー 左右2ヶ所	車輪系統 SR4500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥後輪軸通しカバー 左右2ヶ所	車輪系統 SR4600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦前輪キャスト上部樹脂 左右2ヶ所	車輪系統 SR4700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧後輪部樹脂 左右2ヶ所	車輪系統 SR4802	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨車輪止めナット 左右2ヶ所	附属パーツ系統 SR5600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1 4. ブレーキ系統・附属パーツの点検[メンテナンスガイドP.11]</b>				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①ブレーキレバー 1ヶ所	ブレーキ系統 SR4902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキワイヤーに折れ曲がりや金属部に錆がない 左右2ヶ所	ブレーキ系統 SR5002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ワイヤー止めナットの抜け落ちやゆるみ、錆がない 左右2ヶ所	ブレーキ系統 SR5100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ブレーキ調節ネジ 左右2ヶ所	ブレーキ系統 SR5200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ブレーキワイヤーエンドかぶせの有無 左右2ヶ所	附属パーツ系統 SR5800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# シンフォニーSPスリム メンテナンスチェックリスト

No.5

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
<b>15. 車輪系統可動部の性能点検 [メンテナンスガイドP.11]</b>				
※車輪の可動点検				
①前輪がスムーズに回転する 前 4 本	車輪系統 SR4200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②後輪がスムーズに回転する 後 2 本	車輪系統 SR4300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスト切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを固定位置（上げた状態）で車体を 前方へ軽く押した時、前輪と後輪が空回りせず車体が動く	車輪系統 SR3802 SR3902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>15. 車輪系統可動部の性能点検 [メンテナンスガイドP.12]</b>				
※キャストの可動点検				
①キャスト回転止めレバーが上下に可動する 左右 2ヶ所	車輪系統 SR4402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②キャスト切り替えレバーが上下に可動する 左右 2ヶ所	車輪系統 SR4500 SR4700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスト切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で前輪を右60度位置に保ち 前輪を持ち上げた時スムーズに前輪が正面方向に転換する 左右 2ヶ所	バネ系統 車輪系統 SR1500 SR4402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④キャスト切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で前輪を左60度位置に保ち 前輪を持ち上げた時スムーズに前輪が正面方向に転換する 左右 2ヶ所	バネ系統 車輪系統 SR1500 SR4402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤キャスト切り替えレバーを360度回転位置（上げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で前輪を持ち上げ、前輪キャストを 右回転、左回転共に360度ずつスムーズに手で回転させることが出来る 左右 2ヶ所	車輪系統 SR4402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>16. 走行点検 [メンテナンスガイドP.13]</b>				
①キャスト切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを固定位置（上げた状態）で車体を違和感なく前方へ押せる	＜メーカー修理＞	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②キャスト切り替えレバーを固定位置(下げた状態)で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で車体を前方へ動かした時 前輪キャストがスムーズに左右60度ずつに方向転換が出来る	バネ系統 車輪系統 SR1500 SR4402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスト切り替えレバーを360度位置(上げた状態)で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で車体を前方へ動かした時 前輪キャストがスムーズに左右360度方向転換が出来る	バネ系統 車輪系統 SR1500 SR4402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④車体をゆっくりと前方へ走行させながら両側のブレーキレバーを握り 車体を制動させることが出来る	パーツ交換マニュアル P.3～P.5 ブレーキ設定参照	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤車体をひろげた状態で尚且つ静止させた状態でブレーキレバーを 下げれば駐車用ストッパがかかる	パーツ交換マニュアル P.3～P.5 ブレーキ設定参照	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**17. 点検の終了にあたって [メンテナンスガイドP.14]**

・バッグ部本体（2点）をフレームに装着してください

・バッグに取扱説明書を入れてください

※車体の保管の際、駐車用ストッパをかけた状態で保管された場合は後車輪が凹んでしまう恐れがあります

※駐車用ストッパをかけない状態で車体を折りたたんでも自立する、出来る限り水平な場所での保管をお勧めします

※点検が終了して異常が見当たらない車体も長時間使用しない場合は定期的に点検作業を行ってください

お疲れ様でした

No.2020.10