

シンフォニープラス80・75 メンテナンスチェックリスト

No.1

購入年月日 年 月 日

車体識別NO.

メンテナンス実施者

1. バッグ部システムの点検 [メンテナンスガイドP.1～P.3]

必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
弊社ホームページ よりダウンロード	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
バッグ部系統 P80060 P80061 P75060 P75061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
バッグ部系統 P80070	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
バッグ部系統 P80060 P80061 P75060 P75061 P80070	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
バッグ部系統 P01600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
バッグ部系統 P00800 P00801	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
バッグ部系統 P03500 P03501	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. 補修スプレーの使用 (外観点検) [メンテナンスガイドP.3]

※本体からバッグ部本体を取り外して下さい

①フレーム部分に塗装剥げや傷がない	補修系統 POP170 POP171	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. フレームの点検 [メンテナンスガイドP.4]

※フレームの歪みや凹み、錆の点検

①フレームに歪み、がたつきがない	<メーカー修理> 本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②フレームに凹みがない	本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③フレームに錆がない	本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④肘掛樹脂部にがたつき、割れ(ひび)、傷がない	<メーカー修理> 本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. フレームの開閉点検 [メンテナンスガイドP.4]

※可動部の性能点検

①スムーズに車体を折りたたむことができる	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②スムーズに車体を開くことができる	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③車体を開いた状態で、座面がスムーズに上げ下げができる	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④フレームを折りたたんだ時、手を離しても車体は自立している	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤開閉用ロックレバーが確実にかけることができる	<メーカー修理> 樹脂パーツ② P03700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. ハンドルの高さ調節部点検 [メンテナンスガイドP.4]

※可動部の性能点検

①ハンドルの高さを調節する時、スムーズにハンドルを上げ下げ出来る	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

シンフォニープラス80・75 メンテナンスチェックリスト

No.2

6. 溶接部分の点検 【メンテナンスガイドP.5】	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
※がたつき、外れの点検				
①前脚下部 左右2ヶ所	本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②前脚上部 左右2ヶ所	本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③後脚ブレーキ調節部 左右2ヶ所	本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ブレーキプレート部 左右2ヶ所	本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤背もたれパイプ部 左右2ヶ所	本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥座面受け部 左右2ヶ所	本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦座面受け部後側U字型パイプ部 左右2ヶ所	本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧座面可動パイプ部 左右2ヶ所	本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨座面受け可動パイプ部 左右2ヶ所	本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. リベット部の点検 【メンテナンスガイドP.6】				
※錆や外れ、がたつきの点検				
①ハンドル樹脂部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②キャスター切り替えレバー部樹脂部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③車体折りたたみ開閉用バネ掛け部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④座面可動パイプ三角板部 左右6ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤車体折りたたみ開閉用バネ掛け部（プレート側） 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥肘掛樹脂部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦ブレーキプレート部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3. フレームの点検 4. フレームの開閉点検 5. ハンドルの高さ調節部点検</p> <p>6. 溶接部分の点検 7. リベット部の点検</p> <p>上記項目の点検作業で異常があれば、これより先の点検作業でパーツ交換を行っても異常が改善されない場合があります</p> <p>特に「フレームの歪み」は車輪の可動、ブレーキの制動に大きく影響します</p> <p>※フレームの歪み具合により修理が出来ない場合もあります</p> <p>※フレームの凹みは製品の構造上、修理は出来ません（本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011：フレーム交換推奨）</p> <p>※溶接部分の異常は金属の性質上、修理は出来ません（本体系統 P80010 P80011 P75010 P75011：フレーム交換推奨）</p>				

シンフォニープラス80・75 メンテナンスチェックリスト

No.3

8. シールシステムの点検 [メンテナンスガイドP.7] ※剥がれや汚れの点検	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
①反射シール 前後左右脚部 4ヶ所	シール系統 P01000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキシール ハンドル部左右 4ヶ所	シール系統 P01300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ブレーキ調節シール 左右 2ヶ所	シール系統 P01500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスターシール 左右 2ヶ所	シール系統 P00900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤サイズシール 後脚左 1ヶ所	シール系統 P80110 P75110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥背もたれ紙シール 背もたれ樹脂部 1ヶ所	シール系統 P01200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦踏みみ注意シール 1ヶ所	シール系統 P80570	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. バネシステムの点検 [メンテナンスガイドP.7] ※バネの外れや緩み、錆の点検				
①後輪ブレーキバネ 左右 2ヶ所	バネ系統 P01800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②前輪キャスターバネ 左右 2ヶ所	バネ系統 P01900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③車体折りたたみ開閉用バネ 左右 2ヶ所	バネ系統 P02000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④座面折りたたみバネ 左右 2ヶ所	バネ系統 P02100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. ネジシステムの点検 [メンテナンスガイドP.8] ※ネジの抜け落ちや緩み、錆の点検				
①ブレーキ本体ネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 P02200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキレバー部ネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 P02300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③前輪キャスター受けネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 P02400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ワイヤー流れ止めネジ（上部） 左右 2ヶ所	ネジ系統 P02500 P02501	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ワイヤー流れ止めネジ（下部） 左右 2ヶ所	ネジ系統 P02600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥車体開閉用バネ部サイドネジ 左右 2ヶ所	ネジ系統 P05800 P05801	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦本体ネジ（開閉ロック有側） 左 1ヶ所	ネジ系統 P05900 P05901	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧本体ネジ（開閉ロック無側） 右 1ヶ所	ネジ系統 P06000 P06001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨傘受けブラケットネジ 左 1ヶ所	ネジ系統 P02700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑩ハンドル高さ調節部六角ボルト 左右 2ヶ所	ネジ系統 P02800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑪ハンドル高さ調節部ノブナット 左右 2ヶ所	ネジ系統 P02900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑫ハンドル高さ調節部波型ワッシャー 左右 2ヶ所	ネジ系統 P03000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

シンフォニープラス80・75 メンテナンスチェックリスト

No.4

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
1 1. 樹脂パーツ①の点検 [メンテナンスガイドP.9]				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①パイプエンドツメ6分パイプ用②（座面横部φ14） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① P03100 P03101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②パイプエンドツメ6分パイプ用①（座面受け部φ13） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① P80740 P80741	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③パイプエンドツメ5分パイプ用①（座面折りたたみ可動パイプ部φ12） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① P07500 P07501	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④パイプエンドツメ5分パイプ用②（座面受け可動パイプ部φ13） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① P07600 P07601	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤パイプエンドツメ4分パイプ用①（ブレーキプレート部φ11） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① P03300 P03301	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥傘受けブラケット 左1ヶ所	樹脂パーツ① P03600 P03601	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 2. 樹脂パーツ②の点検 [メンテナンスガイドP.10]				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①ブレーキタイヤ押さえ 左右2ヶ所	樹脂パーツ② P0P570	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②開閉用ロックレバー 左1ヶ所	樹脂パーツ② P03700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ハンドルグリップ 左右2ヶ所	樹脂パーツ② P03400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ワイヤー流れ止め 左右4ヶ所	樹脂パーツ② P03800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 3. 車輪システムの点検 [メンテナンスガイドP.10]				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検 ※車輪部の劣化点検				
①車輪 前後6本	車輪系統 P80390 P80400 P80391 P80401	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②車輪キャップの有無 前後6ヶ所	車輪系統 P04100 P04101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③前輪キャスター受け 左右2ヶ所	車輪系統 P04200 P04201	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスター 左右2ヶ所	車輪系統 P04600 P04601	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤キャスター切り替えレバー 左右2ヶ所	車輪系統 P04700 P04701	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥車輪止めナット 前後左右4ヶ所	附属パーツ系統 P04300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 4. ブレーキ系統・附属パーツ系統の点検[メンテナンスガイドP.11]				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①ブレーキレバー 左右2ヶ所	ブレーキ系統 P04800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキワイヤーに折れ曲がりや金属部に錆がない 左右2ヶ所	ブレーキ系統 P80490 P75490	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ワイヤー止めナットの抜け落ちやゆるみ、錆がない 左右2ヶ所	ブレーキ系統 P05000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ブレーキ調節ネジ 左右2ヶ所	ブレーキ系統 P05100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ブレーキワイヤーエンドかぶせの有無 左右2ヶ所	附属パーツ系統 P05200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

シンフォニープラス80・75 メンテナンスチェックリスト

No.5

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
1 5. 車輪系統可動部の性能点検 [メンテナンスガイドP.11]				
※車輪の可動点検				
①前輪がスムーズに回転する 前 4 本	車輪系統 P80440	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②後輪がスムーズに回転する 後 2 本	車輪系統 P80450	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスト切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを固定位置（上げた状態）で車体を 前方へ軽く押した時、前輪と後輪が空回りせず車体が動く	車輪系統 P80390 P80400 P80391 P80401	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
※キャストの可動点検 [メンテナンスガイドP.12]				
①キャスト回転止めレバーが上下に可動する 左右 2ヶ所	車輪系統 P04600 P04601	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②キャスト切り替えレバーが上下に可動する 左右 2ヶ所	車輪系統 P04700 P04701	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスト切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で前輪を右60度位置に保ち 前輪を持ち上げた時スムーズに前輪が正面方向に転換する 左右 2ヶ所	バネ系統・車輪系統 P01900 P04600 P04601	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④キャスト切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で前輪を左60度位置に保ち 前輪を持ち上げた時スムーズに前輪が正面方向に転換する 左右 2ヶ所	バネ系統・車輪系統 P01900 P04600 P04601	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤キャスト切り替えレバーを360度回転位置（上げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で前輪を持ち上げ、前輪キャストを 右回転、左回転共に360度ずつスムーズに手で回転させることができる 左右 2ヶ所	車輪系統 P04600 P04601	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 6. 走行点検 [メンテナンスガイドP.13]				
①キャスト切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを固定位置（上げた状態）で車体を違和感なく前方へ押せる	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②キャスト切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で車体を前方へ動かした時 前輪キャストがスムーズに左右60度ずつに方向転換が出来る	バネ系統・車輪系統 P01900 P04600 P04601	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスト切り替えレバーを360度位置（上げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で車体を前方へ動かした時 前輪キャストがスムーズに左右360度方向転換が出来る	バネ系統・車輪系統 P01900 P04600 P04601	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④車体をゆっくりと前方へ走行させながら両側のブレーキレバーを握ると 車体を制動させることができる	パーツ交換マニュアル P.3～P.5 ブレーキ設定参照	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤車体をひろげた状態で尚且つ静止させた状態でブレーキレバーを 下げれば駐車用ストッパがかかる	パーツ交換マニュアル P.3～P.5 ブレーキ設定参照	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 7. 点検の終了にあたって [メンテナンスガイドP.14]				
<ul style="list-style-type: none"> ・バッグ部本体をフレームに装着してください ・バッグに取扱説明書を入れてください <p>※車体の保管の際、駐車用ストッパをかけた状態で保管された場合は後車輪が凹んでしまう恐れがあります 駐車用ストッパをかけない状態で車体を折りたたんでも自立する、出来る限り水平な場所での保管をお勧めします</p> <p>※点検が終了して異常が見当たらない車体も長時間使用しない場合は定期的に点検作業を行ってください</p>				
				お疲れ様でした
				No.2021.01