

ささえ普通型【スタンダード】 メンテナンスチェックリスト

No.1

購入年月日 年 月 日

ロットNo.	メンテナンス実施者			
1. 本体系統の点検 [メンテナンスガイドP.1～P.2]	必要パーツコード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
①取扱説明書の有無	弊社ホームページ よりダウンロード	☐	☐	☐
②手すり本体に傷、破損がない	HR0010	☐	☐	☐
③手すり本体に錆がない	HR0010	☐	☐	☐
④ベース本体に傷、破損がない	HR0020	☐	☐	☐
⑤ベース本体に錆がない	HR0020	☐	☐	☐
2. 溶接部の点検 [メンテナンスガイドP.2]				
①手すり本体接合部 1ヶ所	HR0010	☐	☐	☐
②ネジ無し使用禁止シール貼り付けフレーム部 2ヶ所	HR0020	☐	☐	☐
③ベース本体・ネジ付きパイプ接合部 左右6ヶ所	HR0020	☐	☐	☐
④ネジ付きパイプつまみネジ取り付け部 左右2ヶ所	HR0020	☐	☐	☐
3. 附属パーツ系統の点検 [メンテナンスガイドP.3]				
①スポンジグリップ（94cm）に破れ、汚れがない	HR0050	☐	☐	☐
②ゴムキャップの有無、偏った擦り減りがない 左右2ヶ所	HR0100	☐	☐	☐
③ベンリーバッグにほつれ、破れ、汚れがない	HR0080	☐	☐	☐
④ベンリーバッグの面ファスナーを確実に留めることができる	HR0080	☐	☐	☐
⑤ベースキャップの有無、変形や破損がない ネジ付きパイプ部2ヶ所	HR0090	☐	☐	☐
⑥全ての本体取付ネジ（8本SET）に汚れ、傷がない	HR0130	☐	☐	☐
4. ネジ系統の点検 [メンテナンスガイドP.4]				
①つまみネジ（1cm） ネジ付きパイプ部2ヶ所	HR0110	☐	☐	☐
②パイプつなぎネジ 1ヶ所	HR0140	☐	☐	☐
5. シール系統の点検 [メンテナンスガイドP.4]				
①ネジ無し使用禁止シール ベース本体中央フレーム部1ヶ所	HR0150	☐	☐	☐

ささえ普通型【スタンダード】 メンテナンスチェックリスト		No.2		
6. 性能点検 [メンテナンスガイドP.4～P.5]	必要パーツコード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
	HR0010	☐	☐	☐
	HR0020	☐	☐	☐
	HR0020 HR0090	☐	☐	☐
	HR0020 HR0110	☐	☐	☐
7.点検の終了にあたって [メンテナンスガイドP.5]				
・ゴムキャップと本体取付ネジ（8本SET）は本体に取り付けず同梱して、それ以外の附属パーツは確実に取り付けてください。 ・ベンリーバッグに取扱説明書を入れて本体と共に保管してください。				
お疲れ様でした No.2024.10				