

ささえニュータイプ【移動バー付き】 メンテナンスチェックリスト

No.1

購入年月日 年 月 日				
ロットNo.	メンテナンス実施者			
1. 本体系統の点検 [メンテナンスガイドP.1～P.2]	必要パーツコード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
①取扱説明書の有無	弊社ホームページ よりダウンロード	☐	☐	☐
②手すり本体に傷、破損がない	HRN010	☐	☐	☐
③手すり本体に錆がない	HRN010	☐	☐	☐
④ベース本体に傷、破損がない	HRN020	☐	☐	☐
⑤ベース本体に錆がない	HRN020	☐	☐	☐
⑥移動バーに傷、破損がない	HRN030	☐	☐	☐
⑦移動バーに錆がない	HRN030	☐	☐	☐
2. 溶接部の点検 [メンテナンスガイドP.2～P.3]				
①手すり本体接合部 1ヶ所	HRN010	☐	☐	☐
②ネジ無し使用禁止シール貼り付けフレーム部 2ヶ所	HRN020	☐	☐	☐
③ベース本体・ネジ付きパイプ接合部 左右6ヶ所	HRN020	☐	☐	☐
④ネジ付きパイプつまみネジ取り付け部 左右2ヶ所	HRN020	☐	☐	☐
⑤立ち上がり時注意シール貼り付けフレーム部 2ヶ所	HRN030	☐	☐	☐
⑥アジャスターつまみネジ取り付け部 1ヶ所	HRN030	☐	☐	☐
3. 附属パーツ系統の点検 [メンテナンスガイドP.3～P.4]				
①アジャスターセットに傷、破損がない	HRN040	☐	☐	☐
②アジャスターセットに錆がない	HRN040	☐	☐	☐
③アジャスターセットの各調節穴に破損、拡張がない	HRN040	☐	☐	☐
④スポンジグリップ（70cm）に破れ、汚れがない	HRN050	☐	☐	☐
⑤スポンジグリップ（25cm）に破れ、汚れがない	HRN060	☐	☐	☐
⑥スポンジグリップ（57cm）に破れ、汚れがない	HRN070	☐	☐	☐
⑦ベンリーバッグにほつれ、破れ、汚れがない	HRN080	☐	☐	☐
⑧ベンリーバッグの面ファスナーを確実に留めることができる	HRN080	☐	☐	☐
⑨ベースキャップの有無、変形や破損がない ネジ付きパイプ部2ヶ所	HRN090	☐	☐	☐
⑩全ての本体取付ネジ（8本SET）に汚れ、傷がない	HRN130	☐	☐	☐

ささえニュータイプ【移動バー付き】 メンテナンスチェックリスト

No.2

4. ネジ系統の点検 [メンテナンスガイドP.5]	必要パーツコード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
①移動バー足ゴム 移動バー下部1ヶ所	HRN100	☐	☐	☐
②つまみネジ（1cm） ネジ付きパイプ部2ヶ所、移動バー部1ヶ所	HRN110	☐	☐	☐
③つまみネジ（4.2cm） 移動バー部上下2ヶ所	HRN120	☐	☐	☐
④パイプつなぎネジ 1ヶ所	HRN140	☐	☐	☐
5. シール系統の点検 [メンテナンスガイドP.5]				
①ネジ無し使用禁止シール ベース本体中央フレーム部1ヶ所	HRN150	☐	☐	☐
②立ち上がり時注意シール 移動バーパイプ部1ヶ所	HRN160	☐	☐	☐
6. 性能点検 [メンテナンスガイドP.6～P.7]				
①手すり本体に歪み、がたつき、凹みがない	HRN010	☐	☐	☐
②ベース本体に歪み、がたつき、凹みがない	HRN020	☐	☐	☐
③移動バーに歪み、がたつき、凹みがない	HRN030	☐	☐	☐
④アジャスターセットに歪み、がたつき、凹みがない	HRN040	☐	☐	☐
⑤アジャスターセットの移動バー足ゴムをスムーズに回すことができる	HRN040 HRN100	☐	☐	☐
⑥アジャスターセットを移動バーに差し込んだ状態でスムーズに上下に動かすことができる	HRN030 HRN040	☐	☐	☐
⑦アジャスターセットを移動バーに差し込んだ状態で各調節穴につまみネジ（1cm）が確実に入る	HRN030 HRN040 HRN110	☐	☐	☐
⑧ベースキャップをネジ付きパイプに確実ににはめることができる	HRN020 HRN090	☐	☐	☐
⑨ベース本体のつまみネジ（1cm）をスムーズに回すことができる	HRN020 HRN110	☐	☐	☐
⑩移動バーのつまみネジ（4.2cm）をスムーズに回すことができる	HRN030 HRN120	☐	☐	☐
7.点検の終了にあたって [メンテナンスガイドP.8]				
・本体取付ネジ（8本SET）は本体に取り付けず同梱して、それ以外の附属パーツは確実に取り付けてください。 ・ベンリーバッグに取扱説明書を入れて本体と共に保管してください。				
お疲れ様でした No.2024.10				