

シンフォニーSlimBOX メンテナンスチェックリスト

No.1

購入年月日 年 月 日				
車体識別No.	メンテナンス実施者			
1. バッグ部システムの点検 [メンテナンスガイドP.1～P.3] ①取扱説明書のバッグ内の有無 ----- ②バッグ部本体（2点）全てのホックを留めることが出来る ----- ③バッグ部本体（2点）にほつれ、破れ、汚れがない ----- ④本体表示の汚れや破れがない ----- ⑤バッグの底板の有無と割れがない ----- ⑥傘止めバンドの有無 左1ヶ所	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
	弊社ホームページ よりダウンロード	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	バッグ部系統 X00301 X00303	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	バッグ部系統 X00301 X00303	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	バッグ部系統 X00400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	バッグ部系統 X00500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	補修系統 X01202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 補修スプレーの使用（外観点検） [メンテナンスガイドP.3] ※本体からバッグ2点を取り外して下さい ①フレーム部分に塗装剥げや傷がない	補修系統 X01202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理> 本体系統 X00102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	本体系統 X00102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. フレームの点検 [メンテナンスガイドP.4] ※フレームの歪みや凹み、錆の点検 ①フレームに歪み、がたつきがない ----- ②フレームに凹みがない ----- ③フレームに錆がない	<メーカー修理> 本体系統 X00102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	本体系統 X00102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	本体系統 X00102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. フレームの開閉点検 [メンテナンスガイドP.4] ※可動部の性能点検 ①開閉レバーをつまんだ時、レバーを握りきることが出来る ----- ②開閉レバーをつまみ、カチッと音が出て車体を完全に折りたたむことが出来る ----- ③開閉レバーをつまみ、カチッと音が出て車体を完全に開くことが出来る ----- ④開閉レバーロックを開閉レバーの間に入れ、ロックすることが出来る ----- ⑤車体を開いた状態で、座面をスムーズに上げ下げが出来る ----- ⑥車体を開いた状態で、カゴ受けをスムーズに開閉することが出来る ----- ⑦車体を折りたたんだ時、手を離しても車体は自立している	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ハンドルの高さ調節部点検 [メンテナンスガイドP.4] ※可動部の性能点検 ①ハンドルの高さを調節する時、スムーズにハンドルを上げ下げ出来る	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

シンフォニースリムBOX メンテナンスチェックリスト

No.2

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
6. 溶接部分の点検 [メンテナンスガイドP.5] ※がたつき、外れの点検				
①前脚下部 左右2ヶ所	本体系統 X00102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②後脚ブレーキ調節部 左右2ヶ所	本体系統 X00102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ブレーキプレート部 左右2ヶ所	本体系統 ブレーキ系統 X00102 X05102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④後脚U字型パイプ部 左右2ヶ所	本体系統 X00102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤カゴ受けパイプ部 左右2ヶ所	本体系統 X00102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥バッグ取付パイプ部 左右6ヶ所	本体系統 X00102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦座面取付パイプ部 左右2ヶ所	本体系統 X00102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. リベット部の点検 [メンテナンスガイドP.6] ※錆や外れ、がたつきの点検				
①座面可動パイプ部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②カゴ載せ可動パイプ部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③車体開閉可動プレート部（バッグ側） 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前脚上部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤本体樹脂後脚部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥車体開閉可動プレート部（後脚側） 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦車体折りたたみ可動制御樹脂部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧本体パイプ上部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨車体開閉可動プレート部（本体パイプ下部） 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑩車体開閉可動プレート部（前脚側） 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑪本体樹脂部（開閉用レバーパイプ部） 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑫バッグ取付パイプ部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. フレームの点検 4. フレームの開閉点検 5. ハンドルの高さ調節部点検

6. 溶接部分の点検 7. リベット部の点検

上記項目の点検作業で異常があれば、これより先の点検作業でパーツ交換を行っても異常が改善されない場合があります

特に「フレームの歪み」は車輪の可動、ブレーキの制動に大きく影響します

※フレームの歪み具合により修理が出来ない場合もあります

※フレームの凹みは製品の構造上、修理は出来ません（本体系統 X00102：フレーム交換推奨）

※溶接部分の異常は金属の性質上、修理は出来ません（本体系統 X00102：フレーム交換推奨）

シンフォニースリムBOX メンテナンスチェックリスト

No.3

8. シールシステムの点検 [メンテナンスガイドP.7] ※剥がれや汚れの点検	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
①反射シール 前後左右脚部4ヶ所	シール系統 X00600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキシール ハンドル部左右2ヶ所	シール系統 X00700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ブレーキ調節シール 左右2ヶ所	シール系統 X00800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスターシール 左右2ヶ所	シール系統 X00900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤開閉用レバーロック部シール 1ヶ所	シール系統 X01000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥踏込み注意シール 1ヶ所	シール系統 X01100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. バネシステムの点検 [メンテナンスガイドP.7] ※バネの外れや緩み、錆の点検				
①後輪ブレーキバネ 左右2ヶ所	バネ系統 X01300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②前輪キャスターバネ 左右2ヶ所	バネ系統 X01400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. ネジシステムの点検 [メンテナンスガイドP.8] ※ネジの抜け落ちや緩み、錆の点検				
①ブレーキ本体ネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 X01500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキ本体上部ネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 X01600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ブレーキレバー部ネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 X01700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスター受けネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 X01800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤前輪キャスター上部樹脂取付ネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 X01900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥カゴ受け部樹脂取付ネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 X02000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦傘受けブラケットネジ 左1ヶ所	ネジ系統 X02100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧ハンドルグリップ取付ネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 X02200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨ブレーキタイヤ押さえ取付ネジ (長) 左右2ヶ所	ネジ系統 X02300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑩ブレーキタイヤ押さえ取付ネジ (短) 左右2ヶ所	ネジ系統 X02400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑪キャスター切り替えレバー部ネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 X02500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

シンフォニースリムBOX メンテナンスチェックリスト

No.4

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
1 1. 樹脂パーツ①の点検 [メンテナンスガイドP.9]				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①パイプエンドツム6分パイプ用⑤（前脚部φ16） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① X02602	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②パイプエンドツム6分パイプ用②（後脚部φ15） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① X02702	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ハンドル高さ調節キャップ 左右2ヶ所	樹脂パーツ① X02802	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④傘受けブラケット 左1ヶ所	樹脂パーツ① X02902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 2. 樹脂パーツ②の点検 [メンテナンスガイドP.10]				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①ハンドル高さ調節ピン 左右2ヶ所	樹脂パーツ② X03002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキタイヤ押さえ 左右2ヶ所	樹脂パーツ② X03102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③カゴ受け部樹脂 左右2ヶ所	樹脂パーツ② X03202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ハンドルグリップ 左右2ヶ所	樹脂パーツ② X03302	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ワイヤー流れ止め 左右2ヶ所	樹脂パーツ② X03400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 3. 車輪システムの点検 [メンテナンスガイドP.10]				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検 ※車輪部の劣化点検				
①車輪 前後6本	車輪系統 X03502 X03602	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②車輪キャップの有無 前後6ヶ所	車輪系統 X03702	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③前輪キャスター受け 左右2ヶ所	車輪系統 X03802	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスター 左右2ヶ所	車輪系統 X04102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤キャスター切り替えレバー 左右2ヶ所	車輪系統 X04200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥前輪キャスター上部樹脂 左右2ヶ所	車輪系統 X04302	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦後輪部樹脂 左右2ヶ所	車輪系統 X04402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧車輪止めナット 前後左右4ヶ所	附属パーツ系統 X05200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 4. ブレーキ系統・附属パーツ系統の点検 [メンテナンスガイドP.11]				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①ブレーキレバー 左右2ヶ所	ブレーキ系統 X04502	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキワイヤーに折れ曲がりや金属部に錆がない 左右2ヶ所	ブレーキ系統 X04602	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ワイヤー止めナットの抜け落ちやゆるみ、錆がない 左右2ヶ所	ブレーキ系統 X04700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ブレーキ調節ネジ 左右2ヶ所	ブレーキ系統 X04800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ブレーキワイヤーエンドかぶせの有無 左右2ヶ所	附属パーツ系統 X05400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

