

S字クオッドケイン四点式 メンテナンスチェックリスト

購入年月日	年	月	日		No.2021.11
ロットNo.	メンテナンス実施者				
1. 本体システムの点検 [メンテナンスガイドP.1]	必要パーツ分類 コード				チェック履歴 /
①取扱説明書の有無	弊社ホームページ よりダウンロード				<input type="checkbox"/>
②上管に傷、破損がない	本体システム C30001・C31001				<input type="checkbox"/>
③上管の各調節穴に破損、拡張がない	本体システム C30001・C31001				<input type="checkbox"/>
④下管に傷、破損がない	本体システム C30002・C31002				<input type="checkbox"/>
2. 附属パーツシステムの点検 [メンテナンスガイドP.2]					
①止めネジの有無、破損がない	附属パーツシステム C30003・C31003				<input type="checkbox"/>
②止めネジリングの有無	附属パーツシステム C30004・C31004				<input type="checkbox"/>
③ゴムキャップの有無、片寄った擦り減りがない (4ヶ所)	附属パーツシステム C30005・C31005				<input type="checkbox"/>
④グリップの有無、摩耗、破れがない	附属パーツシステム C30006・C31006				<input type="checkbox"/>
⑤着脱式ストラップの有無、破損がない	附属パーツシステム C30007・C31007				<input type="checkbox"/>
⑥ストラップ受け (グリップ部エンドキャップ) の有無	附属パーツシステム C30008・C31008				<input type="checkbox"/>
⑦下管上部パイプキャップの有無	附属パーツシステム C30009・C31009				<input type="checkbox"/>
⑧下管下部パイプキャップの有無	附属パーツシステム C30010・C31010				<input type="checkbox"/>
⑨下管カバーの有無	附属パーツシステム C30011・C31011				<input type="checkbox"/>
3. 性能点検 [メンテナンスガイドP.3]					
①平面に置いたとき、4本の脚のゴムキャップが平面にすべて接地している	本体システム・附属パーツシステム C30002 C30005 C31002 C31005				<input type="checkbox"/>
②平面に置いたとき、平面に対して支柱が垂直になっている	本体システム C30002・C31002				<input type="checkbox"/>
③調節ピンのスプリングの弾力がある	本体システム C30002・C31002				<input type="checkbox"/>
④上管を180°回転させたとき、調節穴に調節ピンが入る	本体システム C30002・C31002				<input type="checkbox"/>
⑤各調節穴に調節ピンがスムーズに入る	本体システム C30001 C30002 C31001 C31002				<input type="checkbox"/>
⑥止めネジを確実に締めることができる	本体システム・附属パーツシステム C30001 C30003 C31001 C31003				<input type="checkbox"/>
⑦着脱式ストラップを外したりはめたりすることができる	附属パーツシステム C30007・C31007				<input type="checkbox"/>
⑧上管のストラップ受け (グリップ部エンドキャップ) が簡単に外れない	附属パーツシステム C30008・C31008				<input type="checkbox"/>