

カーボン四点式フラットグリップ® メンテナンスチェックリスト

購入年月日	年	月	日		No.2021.11
ロットNo.	メンテナンス実施者				
1. 本体システムの点検 [メンテナンスガイドP.1]	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /	
①取扱説明書の有無	弊社ホームページ よりダウンロード	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
②上管に傷、破損がない（布などで擦って傷がないか確認）	本体系統 C80001 C80002 C80003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③上管の各調節穴に破損、拡張がない	本体系統 C80001 C80002 C80003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④下管に傷や破損がない（布などで擦って傷がないか確認）	本体系統 C80004 C80009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 附属パーツシステムの点検 [メンテナンスガイドP.2]					
①止めネジの有無、破損がない	附属パーツ系統 C80005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
②ゴムキャップの有無、片寄った擦り減りがない 4ヶ所	附属パーツ系統 C80006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③グリップカバーの有無、摩耗、破れがない	附属パーツ系統 C80007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④下管上部パイプキャップの有無	附属パーツ系統 C80008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤上管附属ネジ（樹脂）の有無、傷や破損がない	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 性能点検 [メンテナンスガイドP.3]					
①平面に置いたとき、4本の脚のゴムキャップが平面にすべて接地している	本体系統・附属パーツ系統 C80004 C80009 C80006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
②平面に置いたとき、平面に対して支柱が垂直になっている	本体系統 C80004 C80009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③調節ピンのスプリングの弾力がある	本体系統 C80004 C80009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④上管を180°回転させたとき、調節穴に調節ピンが入る	本体系統 C80004 C80009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤各調節穴に調節ピンがスムーズに入る	本体系統 C80001 C80002 C80003 C80004 C80009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑥止めネジを確実に締めることができる	本体系統・附属パーツ系統 C80001 C80002 C80003 C80005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	