

# シンフォニーワイドSPⅡ メンテナンスチェックリスト

No.1

購入年月日      年      月      日				
車体識別No.	メンテナンス実施者			
<b>1. バッグ部システムの点検</b> [メンテナンスガイドP.1～P.3]  ①取扱説明書のバッグ内の有無  ②バッグ部本体（3点）全てのホックを留めることが出来る  ③バッグ部本体（3点）にほつれ、破れ、汚れがない  ④本体表示の汚れや破れがない  ⑤バッグの底板（有無）と割れがない  ⑥傘止めバンドの有無 左1ヶ所  ⑦形状保持板の有無 バッグ内左右2ヶ所  ⑧アームクッションの破れ、汚れがない 左右2ヶ所  ⑨ハンドルカバーの破れ、汚れがない 1ヶ所	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
	弊社ホームページ よりダウンロード	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	バッグ部系統 w30300 w30302	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	バッグ部系統 w30300 w30302	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	バッグ部系統 w30400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	バッグ部系統 w30500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	バッグ部系統 w30600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	バッグ部系統 w30700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	バッグ部系統 w30800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>2. 補修スプレーの使用（外観点検）</b> [メンテナンスガイドP.3] ※本体からバッグ3点を取り外して下さい  ①フレーム部分に塗装剥げや傷がない	補修系統 w31402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. フレームの点検</b> [メンテナンスガイドP.4] ※フレームの歪みや凹み、錆の点検  ①フレームに歪み、がたつきがない  ②フレームに凹みがない  ③フレームに錆がない  ④肘掛樹脂部にごたつき、割れ（ひび）、傷がない	<メーカー修理> 本体系統 w30100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	本体系統 w30100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	本体系統 w30100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. フレームの開閉点検</b> [メンテナンスガイドP.4] ※可動部の性能点検  ①スムーズに車体を折りたたむことが出来る  ②スムーズに車体を開くことが出来る  ③車体を開いた状態で、座面がスムーズに上げ下げが出来る  ④フレームを折りたたんだ時、手を離しても車体は自立している  ⑤開閉用ロックレバーが確実にかけることが出来る	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<メーカー修理> 樹脂パーツ② w34400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. ハンドルの高さ調節部点検</b> [メンテナンスガイドP.4] ※可動部の性能点検  ①ハンドルの高さを調節する時、スムーズにハンドルを上げ下げ出来る	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## シンフォニーワイドSPⅡ メンテナンスチェックリスト

No.2

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
<b>6. 溶接部分の点検 [メンテナンスガイドP.5]</b>				
※がたつき、外れの点検				
①前脚下部 左右2ヶ所	本体系統 w30100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②後脚ブレーキ調節部 左右2ヶ所	本体系統 w30100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ブレーキプレート部 左右2ヶ所	本体系統 w30100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④座面受け部 左右2ヶ所	本体系統 w30100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤座面受け部後側U字型パイプ 左右2ヶ所	本体系統 w30100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥座面可動パイプ部 左右2ヶ所	本体系統 w30100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦座面受け可動パイプ部 左右2ヶ所	本体系統 w30100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧背もたれパイプ上部 左右2ヶ所	本体系統 w30100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨背もたれパイプ下部 左右2ヶ所	本体系統 w30100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. リベット部の点検 [メンテナンスガイドP.6]</b>				
※錆や外れ、がたつきの点検				
①ハンドル樹脂部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキレバー部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③座面可動パイプ三角板部 左右4ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④車体折りたたみ開閉用バネ掛け部 (座面折りたたみパイプ側) 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤車体折りたたみ開閉用バネ掛け部 (プレート側) 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥肘掛樹脂部 左右2ヶ所	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>3. フレームの点検 4. フレームの開閉点検 5. ハンドルの高さ調節部点検</p> <p>6. 溶接部分の点検 7. リベット部の点検</p> </div> <p>上記項目の点検作業で異常があれば、これより先の点検作業でパーツ交換を行っても異常が改善されない場合があります</p> <p>特に「フレームの歪み」は車輪の可動、ブレーキの制動に大きく影響します ※フレームの歪み具合により修理が出来ない場合もあります</p> <p>※フレームの凹みは製品の構造上、修理は出来ません (本体系統 w30100 : フレーム交換推奨)</p> <p>※溶接部分の異常は金属の性質上、修理は出来ません (本体系統 w30100 : フレーム交換推奨)</p>				
<b>8. シールシステムの点検 [メンテナンスガイドP.7]</b>				
※剥がれや汚れの点検				
①反射シール 前後左右脚部4ヶ所	シール系統 w30900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキシール ハンドル部左右4ヶ所	シール系統 w36510	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ブレーキ調節シール 左右2ヶ所	シール系統 w31100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスターシール 左右2ヶ所	シール系統 w31200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤踏み込み注意シール 1ヶ所	シール系統 w31300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# シンフォニーワイドSPⅡ メンテナンスチェックリスト

No.3

9. バネ系統の点検 [メンテナンスガイドP.7]	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
※バネの外れや緩み、錆の点検				
①後輪ブレーキバネ 左右2ヶ所	バネ系統 w31500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②前輪キャスターバネ 左右2ヶ所	バネ系統 w31600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③車体折りたたみ開閉用バネ 左右2ヶ所	バネ系統 w31700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④座面折りたたみバネ 左右2ヶ所	バネ系統 w31800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10. ネジ系統の点検 [メンテナンスガイドP.8]</b>				
※ネジの抜け落ちや緩み、錆の点検				
①ブレーキ本体ネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 w31900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキレバー部ネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 w36520	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③前輪キャスター受けネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 w32100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスター上部樹脂取付ネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 w32200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤肘掛樹脂部止めネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 w32302	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ワイヤー流れ止めネジ（下部） 左右2ヶ所	ネジ系統 w32400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦車体開閉用バネ部サイドネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 w32502	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧本体ネジ（開閉ロック有側） 左1ヶ所	ネジ系統 w32602	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨本体ネジ（開閉ロック無側） 右1ヶ所	ネジ系統 w32702	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑩傘受けブラケットネジ 左1ヶ所	ネジ系統 w32800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑪ブレーキタイヤ押さえ取付ネジ（長） 左右2ヶ所	ネジ系統 w32902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑫ブレーキタイヤ押さえ取付ネジ（短） 左右2ヶ所	ネジ系統 w36530	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑬背もたれパイプ止めネジ（上部） 左右2ヶ所	ネジ系統 w33100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑭背もたれパイプ止めネジ（下部） 左右2ヶ所	ネジ系統 w33200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑮キャスター切り替えレバー部ネジ 左右2ヶ所	ネジ系統 w33300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑯ハンドル高さ調節部六角ボルト 左右2ヶ所	ネジ系統 w33400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑰ハンドル高さ調節部ノブナット 左右2ヶ所	ネジ系統 w33500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑱ハンドル高さ調節部波型ワッシャー 左右2ヶ所	ネジ系統 w33600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# シンフォニーワイドSP II メンテナンスチェックリスト

No.4

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
<b>1 1. 樹脂パーツ①の点検 [メンテナンスガイドP.9]</b>				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①パイプエンドツメ7分パイプ用②（ハンドルパイプ部φ18） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① w36602	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②パイプエンドツメ6分パイプ用②（座面横部φ14） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① w33702	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③パイプエンドツメ6分パイプ用①（座面受け部φ13） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① w33802	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④パイプエンドツメ5分パイプ用①（座面折りたたみ可動パイプ部φ12） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① w33902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤パイプエンドツメ5分パイプ用②（座面受け可動パイプ部φ13） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① w34002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥パイプエンドツメ4分パイプ用①（ブレーキプレート部φ11） 左右2ヶ所	樹脂パーツ① w34102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦傘受けブラケット 左1ヶ所	樹脂パーツ① w34202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1 2. 樹脂パーツ②の点検 [メンテナンスガイドP.10]</b>				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①ブレーキタイヤ押さえ 左右2ヶ所	樹脂パーツ② w34302	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②開閉用ロックレバー 左1ヶ所	樹脂パーツ② w34400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ワイヤー流れ止め 左右2ヶ所	樹脂パーツ② w34500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1 3. 車輪システムの点検 [メンテナンスガイドP.10]</b>				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検 ※車輪部の劣化点検				
①車輪 前後6本	車輪系統 w34602 w34702	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②車輪キャップの有無 前後6ヶ所	車輪系統 w34802	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③前輪キャスター受け 左右2ヶ所	車輪系統 w34902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④前輪キャスター 左右2ヶ所	車輪系統 w35202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤キャスター切り替えレバー 左右2ヶ所	車輪系統 w35300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥前輪キャスター上部樹脂 左右2ヶ所	車輪系統 w35402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦後輪部樹脂 左右2ヶ所	車輪系統 w35502	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧車輪止めナット 前後左右4ヶ所	附属パーツ系統 w36300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1 4. ブレーキ系統・附属パーツ系統の点検[メンテナンスガイドP.11]</b>				
※樹脂の割れ（ひび）や傷、汚れの点検				
①ブレーキレバーパイプ一体型 1ヶ所	ブレーキ系統 w35602	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②ブレーキワイヤーに折れ曲がりや金属部に錆がない 左右2ヶ所	ブレーキ系統 w35702	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ワイヤー止めナットの抜け落ちやゆるみ、錆がない 左右2ヶ所	ブレーキ系統 w35800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ブレーキ調節ネジ 左右2ヶ所	ブレーキ系統 w35900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ブレーキワイヤーエンドかぶせの有無 左右2ヶ所	附属パーツ系統 w36400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# シンフォニーワイドSPⅡ メンテナンスチェックリスト

No.5

	必要パーツ分類 コード	チェック履歴 /	チェック履歴 /	チェック履歴 /
<b>1 5. 車輪系統可動部の性能点検 [メンテナンスガイドP.11]</b>				
※車輪の可動点検				
①前輪がスムーズに回転する 前4本	車輪系統 w35000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②後輪がスムーズに回転する 後2本	車輪系統 w35100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスト切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを固定位置（上げた状態）で車体を 前方へ軽く押した時、前輪と後輪が空回りせず車体が動く	車輪系統 w34602 w34702	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
※キャストの可動点検 [メンテナンスガイドP.12]				
①キャスト回転止めレバーが上下に可動する 左右2ヶ所	車輪系統 w35202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②キャスト切り替えレバーが上下に可動する 左右2ヶ所	車輪系統 w35300 w35402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスト切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で前輪を右60度位置に保ち 前輪を持ち上げた時スムーズに前輪が正面方向に転換する 左右2ヶ所	バネ系統 車輪系統 w31600 w35202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④キャスト切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で前輪を左60度位置に保ち 前輪を持ち上げた時スムーズに前輪が正面方向に転換する 左右2ヶ所	バネ系統 車輪系統 w31600 w35202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤キャスト切り替えレバーを360度回転位置（上げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で前輪を持ち上げ、前輪キャストを 右回転、左回転共に360度ずつスムーズに手で回転させることができる 左右2ヶ所	車輪系統 w35202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1 6. 走行点検 [メンテナンスガイドP.13]</b>				
①キャスト切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを固定位置（上げた状態）で車体を違和感なく前方へ押せる	<メーカー修理>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②キャスト切り替えレバーを固定位置（下げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で車体を前方へ動かした時 前輪キャストがスムーズに左右60度ずつに方向転換が出来る	バネ系統 車輪系統 w31600 w35202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③キャスト切り替えレバーを360度位置（上げた状態）で尚且つ キャスト回転止めレバーを下げた状態で車体を前方へ動かした時 前輪キャストがスムーズに左右360度方向転換が出来る	バネ系統 車輪系統 w31600 w35202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④車体をゆっくりと前方へ走行させながらブレーキレバーを握り 車体を制動させることができる	パーツ交換マニュアル P.3～P.5 ブレーキ設定参照	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤車体をひろげた状態で尚且つ静止させた状態でブレーキレバーを 下げれば駐車用ストッパがかかる	パーツ交換マニュアル P.3～P.5 ブレーキ設定参照	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1 7. 点検の終了にあたって [メンテナンスガイドP.14]</b>				
・バッグ部本体（3点）をフレームに装着してください		・バッグに取扱説明書を入れてください		
※車体の保管の際、駐車用ストッパをかけた状態で保管された場合は後車輪が凹んでしまう恐れがあります				
※駐車用ストッパをかけない状態で車体を折りたたんでも自立する、出来る限り水平な場所での保管をお勧めします				
※点検が終了して異常が見当たらない車体も長時間使用しない場合は定期的に点検作業を行ってください				

お疲れ様でした

No.2021.01