

# シャワーチェア 楽湯くるまる コンパクト

## [取扱説明書] [保管用]

この取扱説明書は必ずお読みいただき、大切に保管してください。

このたびは、シャワーチェア 楽湯くるまるコンパクトをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この説明書を必ずお読みいただき、十分ご理解の上、ご使用ください。  
読んだ後は大切に保管し、必要に応じてお読み直してください。

ご購入に際しては、ケアマネージャーまたは、福祉用具専門相談員等の専門家に、ご自身の体調や状態をお伝えの上、適切な選択やフィッティングなどのアドバイスを受けてご使用ください。



### 目 次

ご使用前の注意(点検) ······	1
警告事項(思わぬケガの恐れがあります) ······	1
組立て方法 ······	2
各部の名称 ······	3
座面の回転方法 ······	3
座面の高さ調節 ······	4
お手入れ方法 ······	4
座面パットの着脱 ······	4
本体及びパットのお手入れ ······	4
ご使用後の注意 ······	4
保証書 ······	5

製品に不具合が発生した場合、まずはご購入販売店に連絡してください。

島製作所 お問い合わせ窓口 TEL:050-3385-7668 mail:shima@bi.mbn.or.jp  
受付時間：9：00～17：00 土、日、祝日休み

ご使用にあたっては、体調の状態により危険なこともありますので、  
ご自身で使用できるかをご判断ください。

転倒や故障の防止のために、下記の事項を必ず守ってください。

### ⚠ ご使用前の注意（点検）

- 組み立て及び調整は確実に行ってください。
- 浴室でご使用ください。浴槽内では使用しないでください。
- 製品各部を点検し、部品の緩み、傷、割れがないかを確認してください。
- 各部のネジ、ナットの緩み、サビや腐食などの異常がないかを確認してください。
- 4本の脚パイプがすべて同じ高さに設定されており、高さ調節用のロックボタンが確実にセットされているかを必ず確認してください。（転倒し、ケガの原因となります）
- 使用者が自分の身体を十分に安定できない場合は、必ず介助者の付き添いのもと、ご使用ください。
- 使用者の身体状況によっては、ご使用を中止されたり、介助者が付き添うなどの適切な判断をしてください。
- ゴムキャップが外れた状態で使用しないでください。（転倒し、けがの原因となります）
- ゴムキャップが破れたり、摩耗等があれば、すぐに交換してください。
- 毛染め液を使用される際は、製品につかないようにしてください。  
(付着した場所が劣化する恐れがあります)

### ⚠ 警告事項（思わぬケガの恐れがあります）

- 入浴用椅子以外の用途では、使用しないでください。
- 必ず平たんで、安定した場所で使用してください。
- 踏み台代わりに使用しないでください。
- 幼児や子供だけで使用させないでください。
- 座るときは、均等に体重が加わるように、座面の中央にゆっくりとお座りください。
- 座面に浅く座らないでください。また、座面から立ち上るときは、ゆっくりと行ってください。  
(転倒する恐れがあります)
- 背もたれに過度の荷重をかけた場合、本体が動いたり、転倒する恐れがありますので十分注意してください。
- 座る・立ち上がる・移動する場合、製品を支えにしないでください。（転倒する恐れがあります）
- 人が座っている状態のまま、本体を持って移動しないでください。
- 最大使用者体重は80kgです。（ご使用される方の体重が80kg以下の方に限ります）
- 勢いよく倒れかかるような座り方をしないでください。
- 石鹼やシャンプーなどで座面や床と接する部分が滑りやすくなっていますので、十分注意してください。
- サウナなどの高温の場所では使用しないでください。  
(熱くなった部分でのやけどや、製品の破損につながります)
- 分解・改造等はしないでください。

# 組立て方法

すべての部品がそろっているかをご確認ください。

部品一覧	
本体部分 (脚部上パイプ取付け済)	1台
脚部下パイプ	4本
六角レンチ	1本






- ①六角レンチで各ネジ止め部がしっかりと固定されていることをご確認ください。(全部で4箇所あります)

**注** ※緩んだ状態で使用されると大変危険です。  
※使用される前に必ずネジ止め部がしっかりと固定されているかをご確認ください。(緩んでいるときは六角レンチでしっかりと固定してください)

- ②本体部分に脚部下パイプを取り付けてください。  
(すべての脚部下パイプは同じです)

- A 脚部上パイプに脚部下パイプを入れてください。  
B 本体の脚部上パイプにあるロックボタンを押さえて脚部下パイプを挿入してください。  
C 脚部上パイプのロックボタンを脚部下パイプの座面高さ調節穴から「カチッ」と音がするようにセットしてください。  
すべての脚部パイプは同じ高さの座面高さ調節穴にセットしてください。

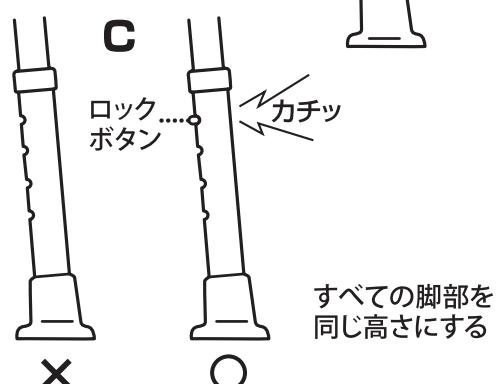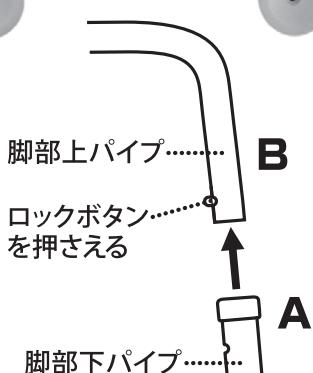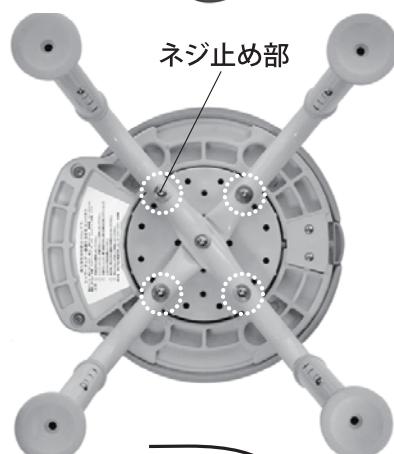

**注** ※組み立てから床に置いたときに、4本の脚部パイプのゴムキャップがすべて床面に接地していることを確認してください。

※組み立て後、座面回転ボタンが正しくセットされているかを確認ください。

## 各部の名称

使用サイズ：約H39～46.5×W33×D35cm

座面の高さ：約33～40.5cm 4段階調節(約2.5cmピッチ)

重 量：約2kg

材 質：アルミ、PP、PE

パット：EVA

ゴムキャップ：TPR

耐熱温度：80°C

最大使用者体重：80kg

TAISコード：00576-000022

分類コード：093303(入浴用チェア)



## 座面の回転方法

座面は90度ずつ360度回転可能です。方向転換するのに便利です。

- 座面回転ボタンを押しながら座面を回してください。90度回転させると座面回転ボタンが少し飛び出します。再度、回転ボタンを押すと座面が回転します。90度ずつ回転しますので適切な位置に合わせてください。

**注** ※座面が正しい位置にセットされていない場合、座面が回転しますので大変危険な場合があります。座面が回転しない位置にセットしてください。(ゆっくりと回転させながら座面回転ボタンが少し飛び出したところが正しい座面の位置です)

※座ったまま回転させる場合、バランスをくずすなど大変危険な場合もありますので、必ず介助者の付き添いのもとにご使用ください。




## 座面の高さ調節

- 座面の高さは33cmから40.5cmまで4段階に調節できます。
- 高さ調節は脚部にあるロックボタンを押しながら脚部下パイプを引いて高さ調節穴にセットしてください。なお、最適な高さは、座ってひざが直角に曲がり、足の裏がきちんと床についた状態です。ロックボタンが「カチッ」という音がして穴にはまっていればセット完了です。
- 高さ調節を行うときは、4本の脚パイプの高さが同じになるように正しくセットしてください。

**注** ※4本の脚部がすべて同じ高さに設定されており、高さ調節用のロックボタンが確実にセットされているかを必ず確認してください。(同じ高さにセットされていない場合や、ロックボタンが確実にセットされていないと転倒し、ケガをされる場合があります)


※ゴムキャップが外れていないかをご確認ください。

※高さ調節部のロックボタンのバネ(ステンレス製)が使用状況によってはサビたり腐食する場合がありますので、ご注意ください。

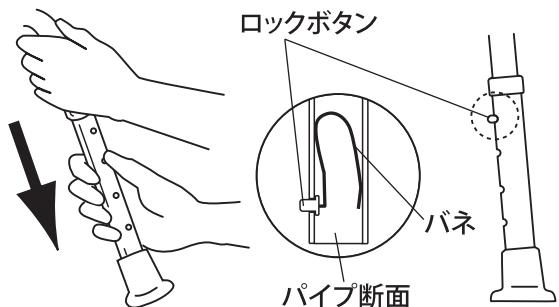


**注** ロックボタンを強く押しすぎると、ロックボタンがズレてしまい、高さ調節が正しく設定できず、転倒やケガをする恐れがあります。

※特に、細い棒や、工具でロックボタンを押すと、位置がズレてしまう恐れがあるので、やめてください。

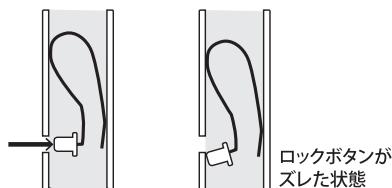

ロックボタンが脚部下パイプから出てこない場合(パイプの中にロックボタンが入りこんでしまった状態)、  
脚部下パイプを抜き、  
ロックボタンの位置を確認後、  
ズレを解消し、脚部下パイプをセットし直してください。

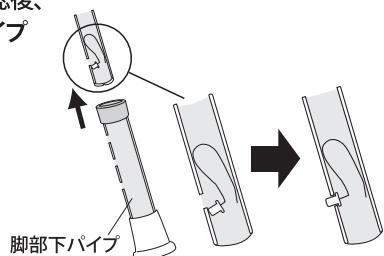

## お手入れ方法

### 座面パットの着脱方法

#### ①パットの取り外し方

座面からゆっくりパットを取り外してください。外れにくい場合は座面裏側から、パットの凸部を押してください。

#### ②パットの取り付け方

座面パットの凸部を本体座面にある穴に合わせて押し込んでください。

### 本体及びパットのお手入れ方法

● 薄めた中性洗剤をスポンジか柔かい布に含ませて汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、乾いた布で拭いてください。

**注**

※タワシや磨き粉、研磨材入りのスポンジ等は使用しないでください。

※塩素系洗剤・酸性・アルカリ・シンナー・クレゾール等は絶対に使用しないでください。

プラスチックや金属が劣化、または破損し、ケガの原因になることがあります。

## △ご使用後の注意

- 火のそばに置かないでください。パットや樹脂が変形し、確実に固定できなくなったり、強度が弱くなる恐れがあります。
- 非常口、消火器、消火栓の前に放置しないでください。
- 廃棄は各自治体の指示に従って処分・廃棄してください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

## 交換パーツ

- 座面パット……………1枚
- ゴムキャップ……………4個 (1台分)

※お求めは製品を購入された販売店または、お近くの販売店で  
お願い致します。

MADE IN TAIWAN 24.10