

SHIMA
SHIMA PRODUCT

シャワーチェア 楽湯くるまる コンパクト

〔取扱説明書〕 〔保管用〕

この取扱説明書は必ずお読みいただき、大切に保管してください。

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この説明書を必ずお読みいただき、十分ご理解の上、ご使用ください。

読んだ後は大切に保管し、必要に応じてお読み直してください。

ご購入に際しては、ケアマネージャーまたは福祉用具専門相談員等の専門家にご自身の体調や状態をお伝えの上、適切な選択やフィッティングなどのアドバイスを受けてご利用ください。



目次

ご使用前の注意(点検).....	1
警告事項.....	1
組立て方法.....	2
各部の名称.....	3
座面の回転方法.....	3
座面の高さ調節.....	4
お手入れ方法.....	4
座面パットの着脱.....	4
本体及びパットのお手入れ.....	4
注意事項.....	4
パーツの価格.....	5
保証書.....	5

この取扱説明書に関しまして、ご不明な点やご質問などがありましたら、
弊社サービス係、またはご購入販売店までお問い合わせください。

株式会社 島製作所 サービス係 ☎ 06-6793-0991

ご使用にあたっては、体調の状態により危険なこともありますので、
十分注意してください。

転倒や故障の防止のために、下記の事項を必ず守ってください。

ご使用前の注意（点検）

- 組立てる際には、乳幼児や子供を近づけないでください。
- 組立てるときに、手や指を挟まないように十分注意してください。
- 組立て及び調整は確実に行ってください。
- 製品各部を点検してください。
- 各部のネジ、ナットが緩んでいないか、サビや腐食などの異常がないかを確認してください。
- 4本の脚パイプがすべて同じ高さに設定され、高さ調節用のロックボタンが確実にセットされているかを確認してください。
- 使用者が、ご自身の身体を十分に安定できない場合など、身体状況によっては使用を中止されたり、介助者が付き添うなどの適切な判断をしてください。
- ゴムキャップが外れたままでの使用はしないでください。
- ゴムキャップに摩耗や破損等があれば、すぐに交換してください。

警告事項（思わぬケガの恐れがあります）

- 必ず平たんで安定した場所で使用してください。
- 座面を踏み台として使用しないでください。
- 乳幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
- 座面に浅く座らないでください。
- 座面から立ち上がる時は、ゆっくりと行ってください。
- 背もたれに過度の荷重をかけた場合、本体が動いたり、転倒する恐れがありますので十分注意してください。
- 座るときや、立ち上がる場合、背もたれを支えにしないでください。
- 背もたれを支えにしての移動や立ち上がりをしてしないでください。
- 人が座っている状態で本体を持って移動しないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 最大使用者体重は80kgです。体重が80kgを超える方は使用できません。
- 勢いよく倒れかかるような座り方をしないでください。
- 座るときはゆっくりと座面中央にお座りください。
- 石鹸やシャンプーなどで座面や床と接する部分が滑りやすくなっていますので十分注意してください。

組立て方法

すべての部品がそろっているかをご確認ください。

部品一覧	
本体部分 (脚部上パイプ取付け済)	1台
脚部下パイプ	4本
六角レンチ	1本





① 六角レンチで各ネジ止め部がしっかりと固定されていることをご確認ください。(全部で4箇所あります)

注 ※緩んだ状態で使用されると大変危険です。
 ※使用される前に必ずネジ止め部がしっかりと固定されているかをご確認ください。(緩んでいるときは六角レンチでしっかりと固定してください)


② 本体部分に脚部下パイプを取り付けてください。
 (すべての脚部下パイプは同じです)

- A 脚部上パイプに脚部下パイプを入れてください。
- B 本体の脚部上パイプにあるロックボタンを押さえて脚部下パイプを挿入してください。
- C 脚部上パイプのロックボタンを脚部下パイプの座面高さ調節穴から「カチッ」と音がするようにセットしてください。
- D すべての脚部パイプは同じ高さの座面高さ調節穴にセットしてください。

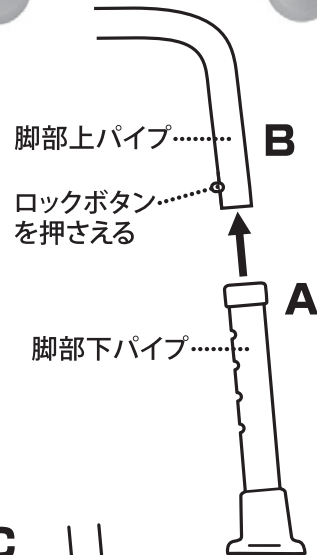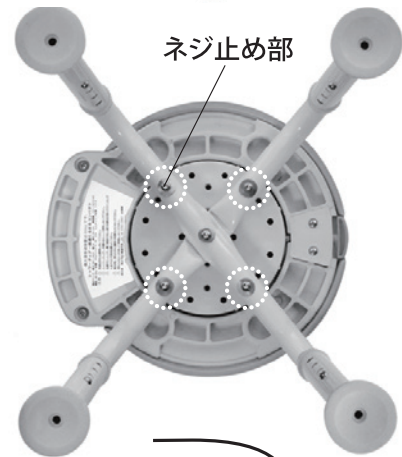

注 ※組立ててから床に置いたときに、4本の脚部パイプのゴムキャップがすべて床面に接地していることを確認してください。

※組立て後、座面回転ボタンが正しくセットされているかを確認ください。

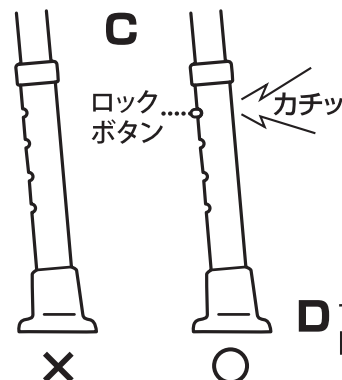

D すべての脚部を同じ高さにする

X

O

各部の名称

使用サイズ：約H39～46.5×W33×D35 cm

座面の高さ：約33～40.5 cm 4段階調節(約2.5 cm ピッチ)

重量：約2kg

材質：アルミ、PP、PE

パット：EVA

ゴムキャップ：合成ゴム

耐熱温度：80℃

最大使用者体重：80kg

TAIS コード：00576-000022

分類コード：093303(入浴用チェア)



座面の回転方法

座面は90度ずつ360度回転可能です。方向転換するのに便利です。

- 座面回転ボタンを押しながら座面を回してください。90度回転させると座面回転ボタンが少し飛び出てきます。再度、回転ボタンを押すと座面が回転します。90度ずつ回転しますので適切な位置に合わせてください。

注 ※座面が正しい位置にセットされていない場合、座面が回転しますので大変危険な場合があります。座面が回転しない位置にセットしてください。(ゆっくりと回転させながら座面回転ボタンが少し飛び出したところが正しい座面の位置です)


※座ったまま回転させる場合、バランスをくずすなど大変危険な場合もありますので、必ず介助者の付き添いのもとにご使用ください。



座面の高さ調節

- 座面の高さは33cmから40.5cmまで4段階に調節できます。
- 高さ調節は脚部にあるロックボタンを押しながら脚部下パイプを引いて高さ調節穴にセットしてください。
なお、最適な高さは、座ってひざが直角に曲がり、足の裏がきちんと床についた状態です。ロックボタンが「カチッ」という音がして穴にはまっていればセット完了です。
- 高さ調節を行うときは、4本の脚パイプの高さが同じになるように正しくセットしてください。

- 注** ※4本の脚部がすべて同じ高さに設定されており、高さ調節用のロックボタンが確実にセットされているかを必ず確認してください。
同じ高さにセットされていない場合や、ロックボタンが確実にセットされていないと転倒しけがをされる場合があります。
※ゴムキャップが外れていないかをご確認ください。
※高さ調節部のロックボタンのバネ(ステンレス製)が使用状況によってはサビたり腐食する場合がありますのでご注意ください。

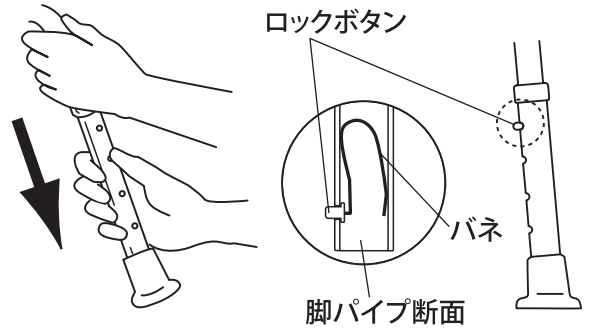

お手入れ方法

座面パットの着脱方法

①パットの取り外し方

座面からゆっくりパットを取り外してください。
外れにくい場合は座面裏側から、パットの凸部を押し込んでください。

②パットの取り付け方

座面パットの凸部を本体座面にある穴に合わせて押し込んでください。

本体及びパットのお手入れ方法

- 薄めた中性洗剤をスポンジか柔かい布に含ませて汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、乾いた布で拭いてください。

- 注** ※タワシや磨き粉、研磨材入りのスポンジ等は使用しないでください。
※塩素系洗剤・酸性・アルカリ・シンナー・クレンジール等は絶対に使用しないでください。
プラスチックや金属が劣化、または破損し、けがの原因になることがあります。

⚠ 注意事項

〈環境〉 ●火のそばに置かないでください。樹脂が変形し、性能を維持できなくなります。

〈使用前〉 ●使用者が、ご自身の身体を十分に安定できない場合など、身体状況によっては使用を中止されたり、介助者が付き添うなどの適切な判断をしてください。
●ゴムキャップに摩耗や破損等があれば、すぐに交換してください。

〈使用中〉 ●用途以外には使用しないでください。
●最大使用者体重は80kgです。体重が80kgを超える方は使用できません。
●浴用の洗い場でご使用ください。浴槽内では使用しないでください。
●座るときはゆっくりと座面中央にお座りください。
●座ったまま移動しないでください。
●座面を踏み台として使用しないでください。

〈保全〉 ●非常口、消火器、消火栓の前に放置しないでください。
●各部の破損、緩みがないかを確認してください。
●改造等はしないでください。

〈廃棄〉 ●各自治体の指示に従って処分・廃棄してください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

パーツの価格

- 座面パット……………1枚 3,388 円(税抜 3,080円)
- ゴムキャップ……………4個 2,662 円(税抜 2,420円)
(1台分)

お買い求めは、お近くの販売店でお願いします

MADE IN TAIWAN 22.10