


伸縮細型ネックステッキ

取扱説明書

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

△この製品は、つえ無しで自立歩行できる方が、より安心して歩行できるように補助的に使用するものです。つえ無しで歩行できない方の使用には適しません。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、よくご理解の上、ご利用ください。
読んだ後は大切に保管し、必要に応じてお読みください。

品名	品番	長さ	ゴムキャップ 内径	重量	本体材質	グリップ
伸縮細型ネックステッキ	67シリーズ	約67～89.5cm	15mm	約240g	アルミ合金	PP

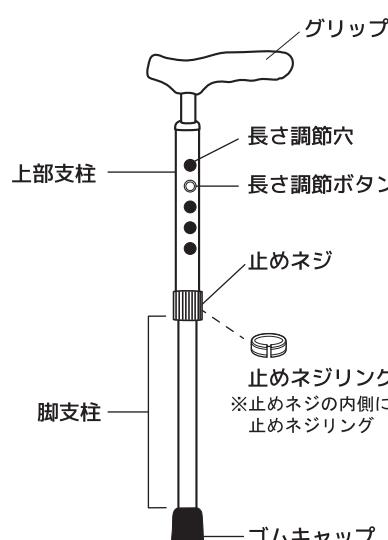

ご使用方法

長さ調節の方法

- 止めねじを緩めてください。
- 長さ調節ボタンを押して、適当な長さ調節穴に合わせてください。
- 止めねじを確実に締めてください。

△注意


止めねじを確実に固く締めても、長さ調節ボタンを押すと簡単にスライドするときは、止めねジリング(止めねじの中に入っている)が抜け落ちている場合があります。止めねジリングが入っているか確認してください。

ストラップの外し方・取り付け方

ストラップに少し強く力を加えると、簡単に本体から取り外し・取り付けができます。
※指を挟まないよう、注意してください。

つえの長さの目安

身体に合ったつえをお選びください。その他に握りの大きさや重さも注意してお選びください。つえの先を足先の前方外側20cmにおき、肘は30～40度屈曲した位置にくるように、つえをつく状態が正しいつえの長さの目安です。

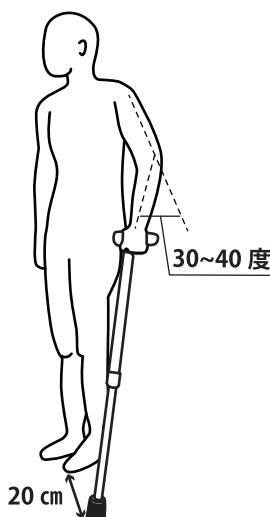

図：つえの長さの目安


支柱の中心に重心がかかるように握ってください。グリップの一部分だけ握ると、荷重が片寄ってしまい、不安定になり、大変危険です。

グリップの握り方

図：握り方1

図：握り方2

図：握り方1

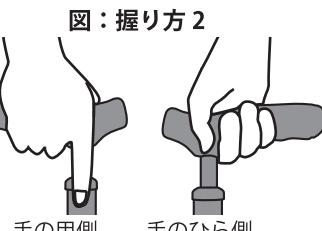

△注意

- 長さ調節ボタンが、長さ調節穴に確実にはまっていることを確認してください。
- 止めねじが確実に締まっていることを確認してください。

△ご使用上の注意

次のような場合は、ご使用には適しません。

- つえ無しで歩行のできない方の使用には適しません。
(体重をかけ過ぎたりすると、かえって肩や手を痛めることもあるからです)

次の場合は、ご使用を停止してください。

- 購入時に自立歩行ができていても、自立歩行ができなくなつた場合。
(例えば、手すり等につかまらなければ歩行できなくなつた場合や、介助者に手伝つてもらわなければ歩行できない場合はご使用を中止してください)
- リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない場合はご使用を中止してください。
(ただし、医師などの指導のもとでの使用は含みません)

- 身体に合ったつえをお選びください。
(長さ調節のできるつえは、からだに合った長さにしてご使用ください)
- 使用中も含め、支柱の継ぎ目や長さ調節部が確実に固定されているかを確認してご使用ください。
- ご使用前に各部を点検した後、ご使用ください。

- キズやひび、持ち手の緩みなどがないかを確認してください。
(本体にキズやひびがある場合、使用しないでください)
- ゴムキャップが摩耗したり、劣化して外れやすくなつてないか確認してください。
(摩耗してたり、劣化して外れやすくなつたりした場合は、早めに取り替えてください)

- ぬれた路面・凍つってしまった路面は大変滑りやすいので十分注意してください。
- 滑り止め効果の効きにくい場所では使用しないでください。
- 道路の側溝や凹みのある所では、ゴムキャップがはまり込んでしまうことがあるので十分注意してください。
- 握り先端に過大な力をかけるような使い方をしないでください。
- 用途以外(例えば、登山・トレッキングポール・護身用など)には使用しないでください。
- ご使用中などでぬれたりした場合は、必ず水気を拭き取ってください。
- 製品の改造は行わないでください。

ご使用後及び保管方法

- 汚れや水気を拭き取り、ゴムキャップの底についている砂などは取り除いてください。
- お子様の手の届かない所に、保管してください。



SGマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。MADE IN TAIWAN 24.06

製品に不具合が発生した場合、まずはご購入販売店に連絡してください。

島製作所 お問い合わせ窓口 TEL:050-3385-7668 mail:shima@bi.mbn.or.jp
受付時間：9:00～17:00 土、日、祝日休み

伸縮細型 ネックステッキ

取扱説明書（保証書付）

【製品サイズ】

長さ 約 67 ~ 89.5 cm

本体重量 約 240g

ゴムキャップ内径 15mm

【材質】

本体：アルミ合金

グリップ：PP

ゴムキャップ：合成ゴム

伸縮細型ネックステッキ
67-FD4 花柄紺



4945528 073548

SHIMA
SHIMA PRODUCT
株島製作所

⚠ ご使用前の注意

棒状つえは、つえ無しで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。次のような場合の使用には適しません（体重をかけすぎたりすると、かえって肩や手を痛めることもあるからです）。

また、購入時に自立歩行ができるいても、次のような状態になった場合は、ご使用を停止してください。

①つえ無しで歩行できない場合（例えば、手すり等につかまらなければ歩行できなくなつた場合や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない場合）。

②リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない場合（ただし、医師などの指導のもとでの使用は含みません）。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※取扱説明書に使用されているイラストは、説明をわかりやすくするための物ですので、現物とは多少異なることがあります。



SHIMA
SHIMA PRODUCT 株式会社 島製作所

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目12-5
TEL 06-6793-0991 FAX 06-6793-0992