

アルミMIX四点可動式 スマートタイプ 75MA

[取扱説明書] [保管用]


この取扱説明書は必ずお読みいただき、大切に保管してください。

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、十分ご理解の上、ご使用ください。

ご使用に際しては、ケアマネジャーまたは福祉用具専門相談員に
ご自身の体調や状態をお知らせのうえ、ご相談ください。

各部の名称

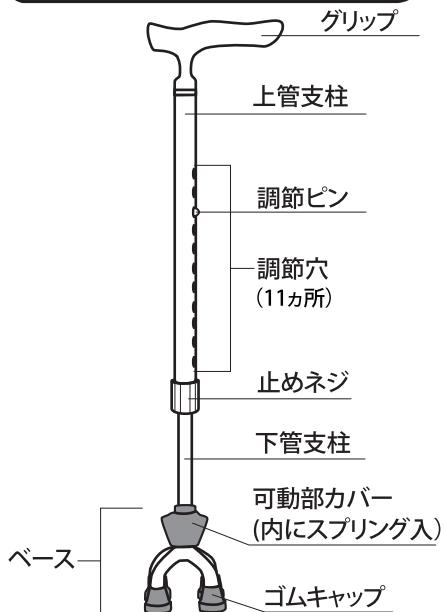

材質：本体 / アルミ
グリップ / カーボン
ベース / ナイロン樹脂
ゴムキャップ / TPR
長さ：約62.5～88cm
重量：約420g
ベースの大きさ：約10×10 cm
ゴムキャップ内径：15mm

安全に関するご注意



- この製品は、歩行用つえです。
それ以外の用途には使用しないでください。
- 弊社のサービス員以外の分解、改造は、絶対にしないでください。(強度や耐久性が低下し、事故につながる恐れがあり、大変危険です)
- 本製品を火気に近付けないでください。
(グリップ等が変形したり、熱くなった箇所で、やけどをするなど、大変危険です)
- 滑りやすい床面や、ぬれている床面では、転倒する場合がありますので、十分ご注意ください。
- 次のような場所、状況でのご使用は危険です。使用を避けるか、介助者に同行してもらってください。
 - ・深い砂利道や砂道など、凸凹の激しい道
 - ・夜間など、暗くて歩く場所が見えにくい状況
 - ・雨や雪、強風、凍結した道



- 調節ピンが、確実に固定されているか、必ず確認してください。
- つえを投げたり、落としたり、衝撃を加えないでください。
- 劣化の原因になりますので、湿気の多い所や、雨風の当たる所に放置せず、屋内で保管してください。

製品に不具合が発生した場合、まずは購入された販売店にご連絡ください。

島製作所 お問い合わせ窓口
受付時間：9:00～17:00

TEL:050-3385-7668
mail:shima@bi.mbn.or.jp
土、日、祝日休み

ご使用にあたっては、体調の状態により危険なこともありますので、十分注意してください。

⚠ 警告事項

- 調節ピンが調節穴に入っている状態でベースを固定してグリップをひねったり、無理に引っぱったりしないでください。可動部のスプリングの破損につながります。
- ベースを固定した状態で、前後に15度以上傾けないでください。また、左右に力を強くかけないでください。可動部のスプリングが破損する恐れがあります。
- 雪・凍結等の滑り止め効果の効きにくい場所では使用しないでください。
- つえ以外の目的には、使用しないでください。
- 乳幼児や子供の手の届く所には放置しないでください。
- 分解・改造はしないでください。

⚠ 注意事項

※ご使用前

- ご自分の体に合った長さに調節して、ご使用ください。
- 各部を点検(傷やひび、持ち手の緩みなどがないかを確認)した後、ご使用ください。
- ゴムキャップは破れたり、摩耗等があれば、すぐに交換してください。
- ぬかるみのある場所・滑りやすい路面等での使用はしないでください。
- 坂道など、斜面では十分に注意してください。
- 握り先端に、過大な力をかけるような使い方をしないでください。
- 止めネジをしっかりと締めているか確認して、ご使用ください。
- 使用者がご自分で体を十分に安定できない場合は、介助者の付き添いが必要です。
- 平らな路面で、全てのゴムキャップが接地しているかを確認してからご使用ください。
- ベース部分に傷やひびがないか確認してください。傷やひびがある場合は使用せずに、ご購入販売店へ下管支柱の交換(有料)を依頼してください。
- グリップ部(カーボン部分)に傷やひびがある場合、使用しないでください。
(カーボンが折れたりする場合があり、大変危険です)

※グリップ部(カーボン部分)の点検方法

カーボン部分にタオル等を巻きつけ、拭くようにしてください。傷やひびがある場合、タオル等がひっかかります。(傷やひびがある場合は、ご購入販売店へ上管支柱の交換(有料)を依頼してください)

※使用後(保管・お手入れ)

- ぬれたときは、乾いた布で水分を取り、日陰で乾燥してください。
- 水に浸けたり・雨ざらしにしないでください。サビや劣化の原因となります。
- 使用後は平らな路面に置き、可動部のスプリングに、負担のかからない状態で保管してください。
- 汚れを付けたまま放置せず、乾いた布などで拭き取り、必ず落してください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、汚れを落とし、高温多湿の場所は避け、日陰で保管してください。
- 非常口・消火器・消火栓の前に放置しないでください。
- 各部の破損・緩み・摩耗がないか確認してください。
- 本製品を他の方にお譲りになるときは、必ず取扱説明書も合わせてお渡しください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。

※廃棄について

- 各自治体の指示に従って処分・廃棄してください。


長さ調節の方法

- 止めねじを緩めてください。
- 調節ピンを押して、適当な長さの調節穴に合わせてください。
- 調節ピンがカチッという音がして飛び出せば、セット完了です。

(注意) 調節ピンが、長さ調節穴に確実にはまっていることを確認してください。

- 止めねじを確実に締めてください。


(注意) 止めねじを強く締めすぎると、止めねじが割れることがあります。強く締めすぎないでください。

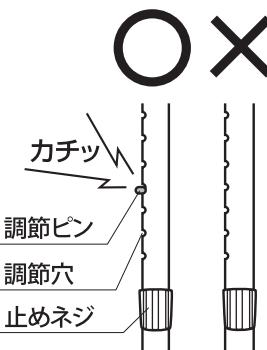

つえの長さの目安

体に合った長さにつえを調節してください。


つえの先を足先の前方外側 20cm に置き、肘は 30 ~ 40 度屈曲した位置にくるようにつえを突く状態が、正しいつえの長さの目安です。

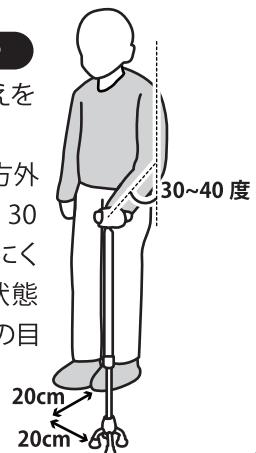


グリップの向きの変え方

調節穴を 180 度簡単に切り替え、ゴムキャップの片減りを軽減させることができます。


- ①止めねじを緩めます。

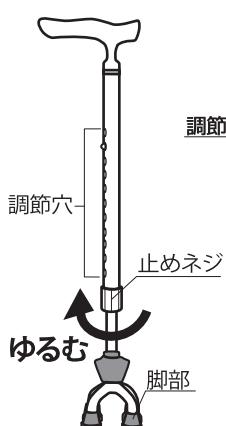

- ②調節ピンを押して、グリップを 180 度回転します。

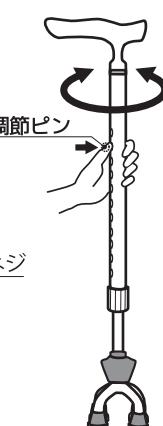

- ③長さを合わせて止めねじをしっかりと締めます。

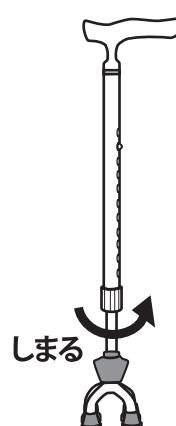


注意

- 調節後、調節ピンが確実に飛び出していることをご確認ください。
- ガタつきなどが無いか、十分にご確認の上ご使用ください。



可動部の取り扱い方法

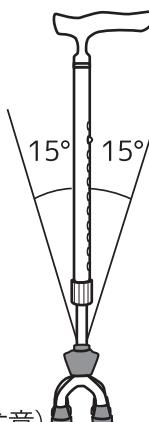

(注意)

- グリップを握り本体を前方に突いたとき、可動部のベースが動き地面に接地します。
- ベースを固定した状態で前後に 15 度以上傾けないでください。また、左右に力を強くかけないでください。可動部のスプリングが破損する恐れがあります。


- ご使用前には必ず、平らな路面に置き、路面に対して支柱がほぼ垂直であることを確認してください。垂直でない場合、可動部のスプリングが破損している場合がありますので、使用せずにご購入販売店へ点検(有料)の依頼をしてください。
- 調節ピンが調節穴に入っている状態で、ベースを固定して、グリップをひねったり、無理に引っ張ったりしないでください。可動部のスプリングの破損につながります。
- ベース部分の材質は樹脂ですので、下管支柱は 3~4 年に一度交換されることをお勧めします。

グリップの握り方

支柱の中心に重心がかかるように握ってください。

(注意)


上記、握り方 1、握り方 2 以外の握り方をされると、重心をかける所が不安定になり、危険です。

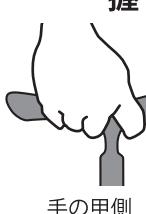

手の甲側



手のひら側

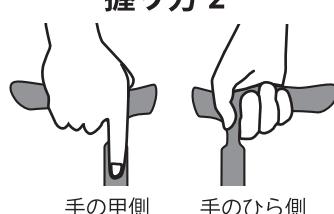

手の甲側 手のひら側

この取扱説明書に関しまして、ご不明な点や、ご質問などございましたら、弊社サービス係、または、
ご購入販売店までお問い合わせください。

交換パーツ

● ゴムキャップ(4個SET)

※お求めは製品を購入された販売店または、
お近くの販売店でお願い致します。

※製品改良のため、仕様・外観は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

MADE IN CHINA 24.10



株式会社 島製作所

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目12-5
TEL 06-6793-0991 FAX 06-6793-0992

