

アルミ四点小タイプ

[取扱説明書]

[保管用]


この取扱説明書は必ずお読みいただき、大切に保管してください。

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、十分ご理解の上、ご使用ください。

ご使用に際しては、ケアマネージャーまたは福祉用具専門相談員にご自身の体調や状態をお知らせの上、ご相談ください。

各部の名称

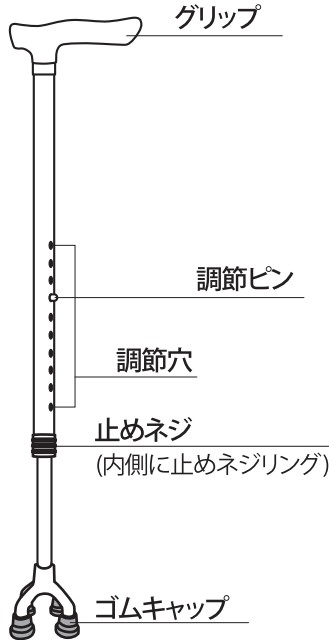

材 質：本体 / アルミ
グリップ / PP
ゴムキャップ / 合成ゴム

長 さ：約67～90cm

重 量：約450g

ベースの大きさ：約10×10 cm

ゴムキャップ内径：15mm

安全に関するご注意



警告

- この製品は、歩行用つえです。それ以外の用途には使用しないでください。
- 弊社のサービス員以外の分解、改造は、絶対にしないでください。(強度や耐久性が低下し、事故につながる恐れがあり、大変危険です)
- 本製品を火気に近づけないでください。(グリップ等が変形したり、熱くなった箇所ので、やけどをするなど、大変危険です)
- 滑りやすい床面や、ぬれている床面では、転倒する場合がありますので、十分ご注意ください。
- 次のような場所、状況でのご使用は危険です。使用を避けるか、介助者に同行してもらってください。
 - ・ 深い砂利道や砂道など、凸凹の激しい道
 - ・ 夜間など、暗くて歩く場所が見えにくい状況
 - ・ 雨や雪、強風、凍結した道



注意

- 調節ピンが、確実に固定されているか、必ず確認してください。
- つえを投げたり、落としたり、衝撃を加えないでください。
- 劣化の原因になりますので、湿気の多い所や、雨風の当たる所に放置せず、屋内で保管してください。

ご使用にあたっては、体調の状態により危険なこともありますので、
十分注意してください。

警告事項

- 雪・凍結等の滑り止め効果の効きにくい場所では使用しないでください。
- つえ以外の目的には、使用しないでください。
- 乳幼児や子供の手の届く所には放置しないでください。
- 分解・改造はしないでください。

注意事項

※ご使用前

- ご自分の体に合った長さに調節して、ご使用ください。
- 各部を点検（傷やひび、持ち手の緩みなどがないかを確認）した後、ご使用ください。
- ゴムキャップは破れたり、摩耗等があれば、すぐに交換してください。
- むかるみのある場所・滑りやすい路面等での使用はしないでください。
- 坂道など、斜面では十分に注意してください。
- 握り先端に、過大な力をかけるような使い方をしないでください。
- 止めネジをしっかりと締めているか確認して、ご使用ください。
- 使用者がご自分で体を十分に安定できない場合は、介助者の付き添いが必要です。
- 平らな路面で、全てのゴムキャップが接地しているかを確認してからご使用ください。
- ベース部分に傷やひびがないか、確認してください。傷やひびがある場合は使用しないでください。

※使用後（保管・お手入れ）

- むれたときは、乾いた布で水分を取り、日陰で乾燥してください。
- 水に浸けたり・雨ざらしにしないでください。サビや劣化の原因となります。
- 使用後は平らな路面に置き、負担のかからない状態で保管してください。
- 汚れを付けたまま放置せず、乾いた布などで拭き取り、必ず落としてください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、汚れを落とし、高温多湿の場所は避け、日陰で保管してください。
- 非常口・消火器・消火栓の前に放置しないでください。
- 各部の破損・緩み・摩耗がないか確認してください。
- 本製品を他の方にお譲りになるときは、必ず取扱説明書も合わせてお渡しください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。

※廃棄について

- 各自治体の指示に従って処分・廃棄してください。



長さ調節の方法

- 止めネジを緩めてください。
 - 調節ピンを押して、適当な長さの調節穴に合わせてください。
 - 調節ピンがカチッという音がして飛び出せば、セット完了です。
- (注意)** 調節ピンが、長さ調節穴に確実にハマっていることを確認してください。
- 止めネジを確実に締めてください。

つえの長さの目安

体に合ったつえをお選びください。握りの大きさや重さも注意してお選びください。

つえの先を足先の前方外側 20cm に置き、肘は 30～40 度屈曲した位置にくるようにつえをつく状態が、正しいつえの長さの目安です。

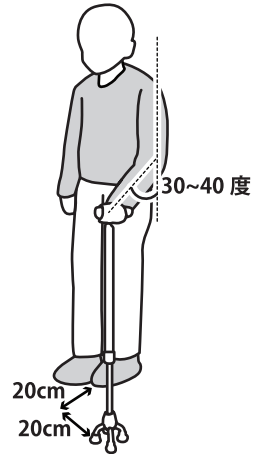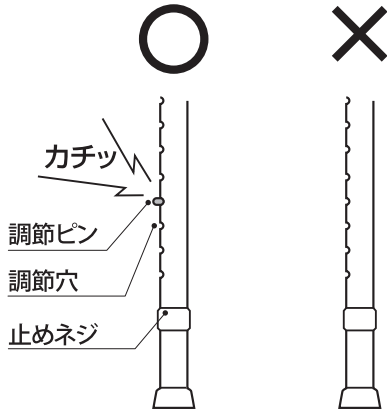


(注意) 止めネジを確実に強く締めても、調節ピンを押すと簡単にスライドするときは、止めネジリング (止めネジの中に入っている部品) が抜け落ちている可能性があります。

ステッキの握り方

支柱の中心に重心がかかるように握ってください。


握り方 1

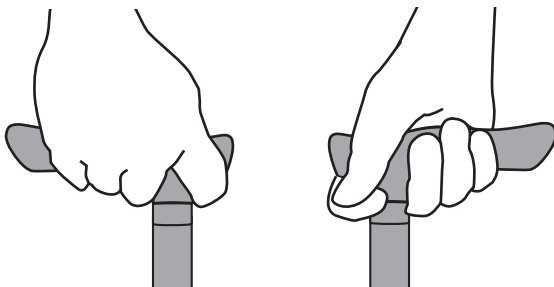

手の甲側

手のひら側

握り方 2

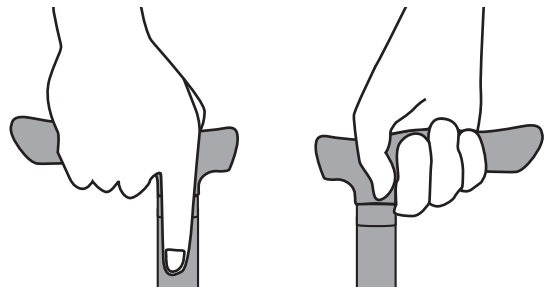

手の甲側

手のひら側

(注意) 上記以外の握り方をされると、重心をかける場所が不安定になり、危険です。

パーツの価格

- ゴムキャップ …………… 1 セット (4 個) 1,573 円 (税抜 1,430 円)

お買い求めは、お近くの販売店でお願いします。

この取扱説明書に関しまして、ご不明な点や、ご質問などがございましたら、弊社サービス係、または、ご購入販売店までお問い合わせください。

※製品改良のため、仕様・外観は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

MADE IN CHINA 22.10



株式会社 島製作所

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目12-5
TEL06-6793-0991 FAX06-6793-0992



外袋 説明書