

ささえ 普通型【スタンダード】

ささえ ニュータイプ【移動バー付き】

[取扱説明書] [保管用]

この取扱説明書は必ずお読みいただき、大切に保管してください。

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


- ・布団の落下防止器具ではなく、起き上がり・立ち上がりのための『手すり』です。手すり以外の目的で使用しないでください。
- ・家庭用木製ベッドに本体取付ネジ8本で固定すれば、すぐに使える簡単で便利な「手すり」です。
(ベッドの種類・取り付ける場所など、取扱説明書に書かれている内容を必ず守ってください)
- ・取扱説明書をよく読んで、正しく取り付け、取扱説明書に記載の無い使い方は危険ですので、絶対にしないでください。

安全にお使いいただくために、下記の事項を必ず守ってください。


- ① 製品の上に腰掛けたり、子供の遊具のようにぶら下がったり、製品を持ってベッドを移動させたりするなど無理な力を加えるような使い方をしないでください。(破損や事故の原因になります)
- ② **手すり**の間に手や足、頭を入れないでください。窒息・骨折の原因になります。
- ③ **手すり**はベッドの右側にも、左側にも付けられます。
- ④ ベッドの横幅93cm以上あれば、左右同時に2台取り付ける事もできます。
- ⑤ ベッドの底板にベースを**本体取付ネジ**でしっかりと固定してください。
(固定しないまま使用する事は危険ですから絶対にしないでください)
- ⑥ **本体取付ネジ**のねじ込み不十分はネジの頭でマットレスを傷つけます。
- ⑦ **本体取付ネジ**の効かない材質の底板ではご使用できません。
〔下図(A)〈取り付けできないベッド〉参照〕
(下図の「取り付けできないベッド」を確認してください)
- ⑧ ご使用前に各部の締め付けネジが緩んでおらず、しっかりと固定されている事を確認してください。
- ⑨ 裏面「組み立て方法と各部の名称」をお読みいただき、取り付けてください。

ベッド各部の名称(下図参照) ヘッドボード：ベッドの頭部に立っている板、
側板：ベッド左右の板、底板：マットレスを載せている板

○ <取り付けできるベッド>

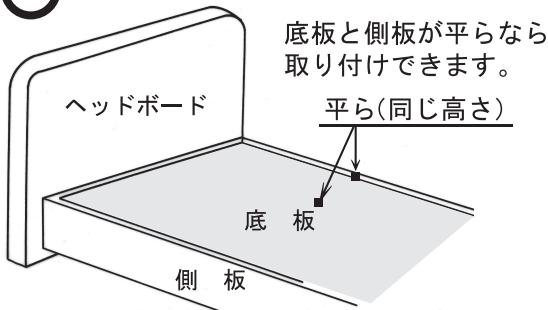

✗ <取り付けできないベッド>

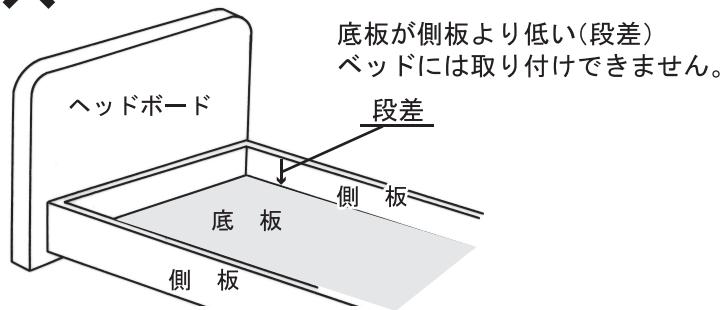

<取り付けできるベッド>

- 木製ベッドで側板と底板が平らなベッド
- 底板にネジで**ベース**を固定できるベッド
- 床から底板表面までの高さが20~35cmのベッド
※ キャスター付きのベッドは固定して使用してください。

(A) <取り付けできないベッド>

- 側板と底板に段差のあるベッド
- ウォーターベッドや畳ベッド
- 底板が金属やスノコ・網のベッド
- パイプや折りたたみベッド
- 電動ギア等で背上げなどができるベッド
- その他**ベース**を固定できない全てのベッド

製品に不具合が発生した場合、まずはご購入販売店に連絡してください。

解決しない場合は、製品・お問い合わせ窓口までご連絡ください。

お問い合わせ窓口 TEL:050-3385-7668


受付時間：9:00～17:00

mail:shima@bi.mbn.or.jp

土、日、祝日休み


ささえ 普通型【スタンダードタイプ】組み立て方法と各部の名称

組み立てるときには周囲に人がいないことを確認し、指などを挟まないように確実に行ってください。

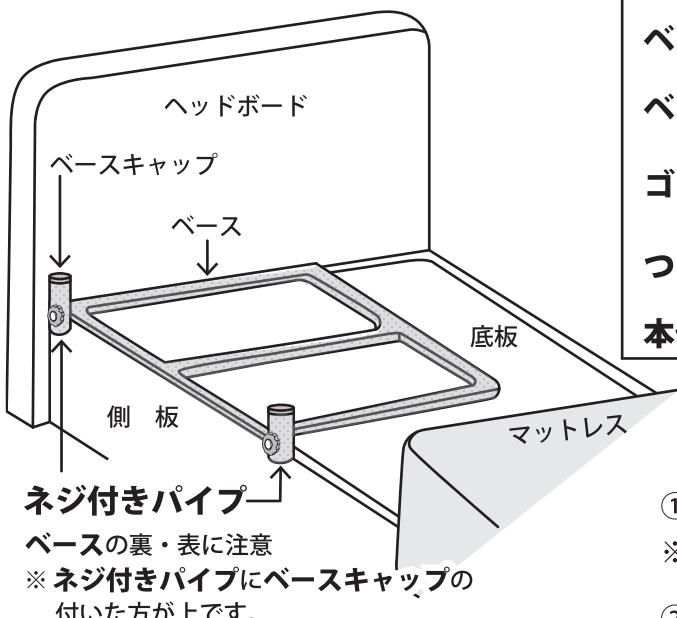

【部品一覧】

本体手すり・・・1本

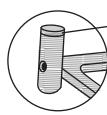

ベースキャップ

ベース (底板に固定して本体を支える部分) ・・・ 1個



ベンリーバッグ (新聞・眼鏡・薬等が入るバッグ) ・・・ 1個



ゴムキャップ ・・・ 2個



つまみネジ1cm (本体手すり固定用) ・・・ 2個



本体取付ネジ (ベース固定用) ・・・ 8本



<組み立て・取り付け方法>

① マットレスをずらし、底板の上にベースを置きます。

※ 取り付けの際、ベースの裏、表にご注意ください。


② ベースを側板にピッタリ寄せます。

(ベッドの横幅 93cm 以上あれば、左右同時に2台の取り付け可能です)

③ 本体手すりが水平に保つよう、ベースのネジ付きパイプに垂直に差し込んでください。

※ ヘッドボードと本体手すりの隙間は首を挟み込まないよう、6cm未満、頭を挟み込まないように、23.5cm以上にしてください。

6cm未満、23.5cm以上

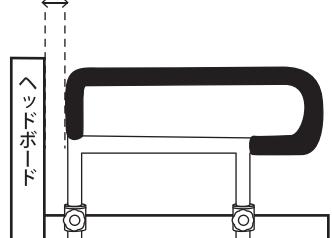

④ ベースのネジ付きパイプに、通した本体手すりの2本のパイプをゴムキャップの底までしっかりと差し込んでください。

⑤ 再度、ベースが側板にピッタリ寄せてある事を確認してから本体取付ネジ8本で底板にしっかりと固定してください。


※ 底板が薄いベッドはネジが貫通します。ネジ先で指や引出しに入れる物が傷つかないように注意してください。

⑥ 本体手すりのゴムキャップが両端ともピッタリ床に着くまでおし下げる、両端とも床に付いていることを確認し、ネジ付きパイプのつまみネジ1cmを締めてしっかりと固定してください。

⑦ ベンリーバッグを取り付けて完成です。


⑧ マットレスを戻してご使用ください。

※ ベッドの右側に取り付ける場合でも要領は同じです。

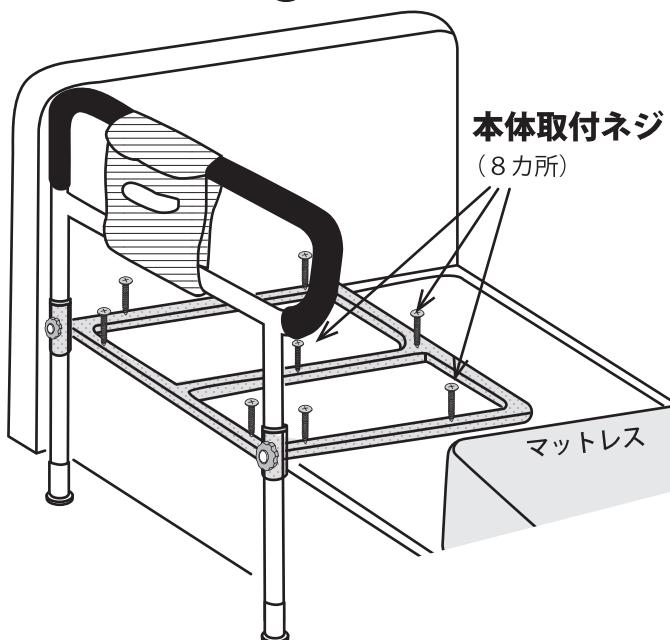

ささえ ニュータイプ組み立て方法と各部の名称

組み立てるときには周囲に人がいないことを確認し、指などを挟まないように確実に行ってください。

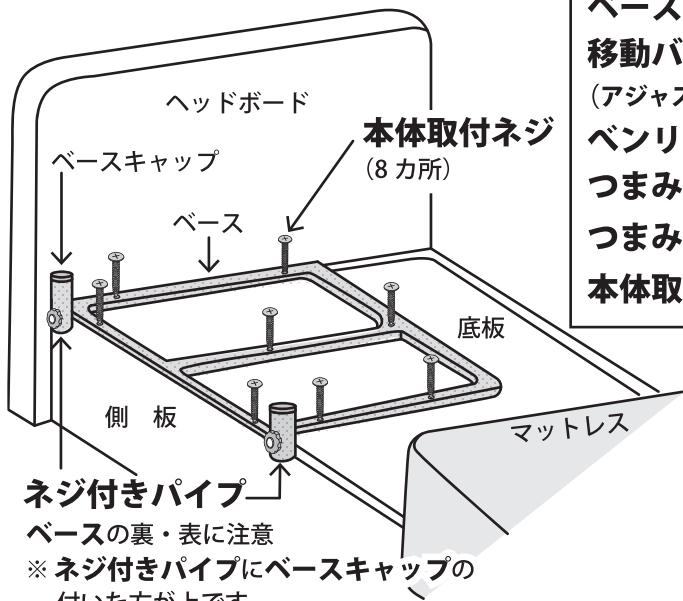

【部品一覧】

本体手すり…1本



ベースキャップ

ベース (底板に固定して本体を支える部分)…1個

移動バー手すり…1本



(アジャスター: 移動バー足ゴム…1個、つまみネジ1cm…1個)

ベンリーバッグ (新聞・眼鏡・薬等が入るバッグ)…1個



つまみネジ4.2cm (移動バー固定用)…2個



つまみネジ1cm (本体手すり固定用)…2個



本体取付ネジ…8本



<組み立て・取り付け方法>

- マットレスをずらし、底板の上にベースを置きます。
- ベースを側板にピッタリ寄せて、**本体取付ネジ**(8本)でしっかり固定してください。


※ 取り付けの際、ベースの裏、表にご注意ください。
(ネジ付きパイプにベースキャップの付いた方が上です)

※ 底板が薄いベッドはネジが貫通します。ネジ先で指や引出しに入れる物が傷つかないように注意してください。

- 本体手すり**の2本の足をベースのネジ付きパイプに垂直に差し込んでください。

※ ヘッドボードと**本体手すり**の隙間は
首を挟み込まないように、6cm未満、
頭を挟み込まないように、23.5cm以上にしてください。

6cm未満、23.5cm以上

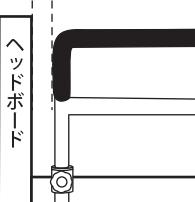

- つまみネジ1cmを締めて、
本体手すりをしっかり固定してください。

- 本体手すり**に移動バー手すりを取り付け、
つまみネジ4.2cmで、しっかり固定してください。

- 床に脚が着くまで下ろしてください。


アジャスターにより、

長さを調節した後、


移動バー足ゴムを

回しながら最終調整を


してください。

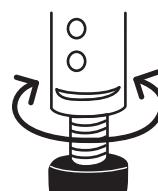

アジャスター

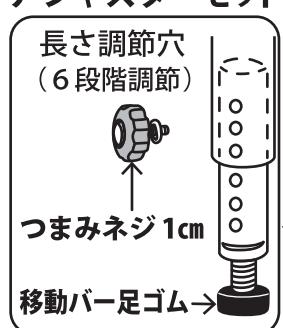

移動バー手すり

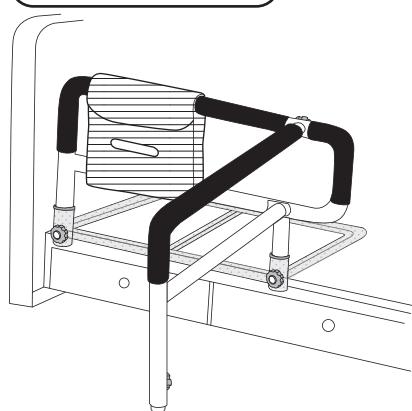

- ベンリーバッグを取り付けて完成です。

- マットレスを戻してご使用ください。

※ ベッドの右側に取り付ける場合でも要領は同じです。

ご使用上の警告

- 安全の為、使用される前に、ネジが緩んでいないか、製品がしっかりと固定されているかを確認してください。
- 定期的に各部を点検し、傷や変形、亀裂や破損などの異常がある場合は、使用しないでください。
- 介助が必要な方、予測できない行動をとられる方（認知症など）、自分で危険な状態を回避できない方には介助者が付き添うなど、安全に十分配慮してください。
- 本製品は1人用です。2人以上同時に使用しないでください。（製品が破損する恐れがあります）
- 手が濡れた状態でささえを使用したり、製品を濡らしたりしないでください。
- 本製品に、別の製品を組み合わせて使用しないでください。（安全の保証ができません）

設置場所(保管場所)について

- 屋外や直射日光の当たる場所、火や熱器具のそばに設置しないでください。
(金属部分が熱くなり、火傷の原因や、製品の破損等に繋がります)
- 濡れる場所・不安定な場所・柔らかい床では使用しないでください。

※ 製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※ 取扱説明書に使用されているイラストは、説明をわかりやすくするための物ですので、現物とは多少異なることがあります。

MADE IN VIETNAM 23.07



株式会社 島製作所

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目12-5
TEL 06-6793-0991 FAX 06-6793-0992

